


Rollator Carl-Oskar / Rebel

Brukarinformation


- Läs alla varningar och instruktioner noggrant innan du använder rollatorn.
- Säkerställ att rollatorn är ordentligt uppfälld innan användning.
- Rollatorn får endast användas som gång- och sittstöd.
- Det är förbjudet att stå på rollatorn.
- Använd inte produkten i trappor eller rulltrappor.
- Iakttag extra försiktighet när rollatorn används i backar eller på ojämnt underlag.
- Sitt aldrig på rullatorn och rulla dig fram med fötterna.
- Fördela vikten jämnt för att förhindra att rollatorn välter när du sätter dig.
- Parkeringsbromsen skall vara ilagd om rollatorn används som stöd när du sätter dig ned eller reser dig upp.
- Placera inget på den hopfällda rollatorn vid förvaring eller transport då det kan skada rollatorn.
- Förvara inte rollatorn nära en värmekälla då detta kan skada vissa detaljer.
- Var försiktig vid hantering av rollatorn så att du inte skadar dig när den har varit utsatt för extremt höga eller låga temperaturer.
- Förvara inte rollatorn utomhus.
- Spara bruksanvisningen för framtida användning.

Utfällning


1. Lossa den större plastdelen på fällningslåset och för rollatorns handtag utåt.

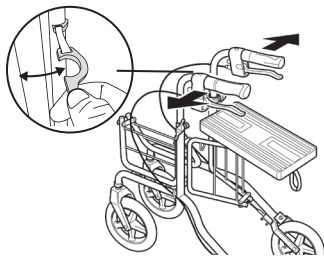

2. Tryck sitsen framåt.

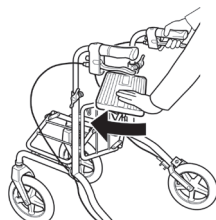


3. Viktigt! Kontrollera att låset greppar om grinden.

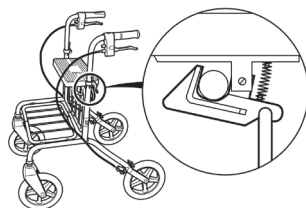


Hopfällning

1. Dra i den röda ögla så att låset frigör grinden.

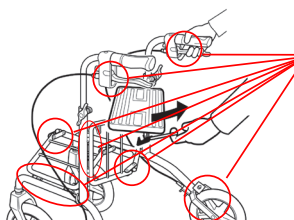


Varning!
Klämrisk!

2. Dra sitsen bakåt och för handtagen inåt.

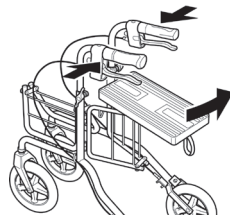


Justering av körhandtag

Lossa vingvreden och justera körhandtagen till handledshöjd. Lås vingvreden.

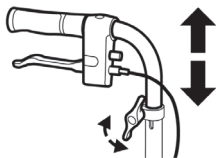

Lossa vingvreden och justera körhandtagen till handledshöjd. Lås vingvreden.

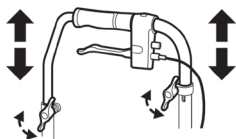

Parkeringsbroms

Tryck bromshandtaget nedåt för parkeringsläge.



Varning!

Parkeringsbromsa innan Du sätter dig.

Färdbroms

Dra bromshandtaget uppåt för färdbroms.



OBS!

Kontinuerlig bromsning leder till onormalt slitage på hjul och broms.

Bromsjustering

Lossa låsmuttern, justera bromsen genom att skruva på justerhylsan. Efter justering skruva åt låsmuttern.




Viktigt!

Handtagen får inte höjas över den nedre markeringen "0" på handtagsrörets sidor.

Körhandtagen ska vara riktade bakåt. Handtagsrörets markering ska vara i linje med streck på klamma på rörets sidor.




Streck på klamma

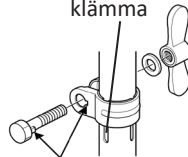

Varning!

Handtagen får ej vinklas utåt eftersom rollatorns tipprisk då ökar. Vinkeln mellan handtagens longitudinella linje och rollatorns framåtriktning måste alltid vara 180°.

Vid montering av vingvreden är det viktigt att klacken på skruven hamnar i spåret i skruvhålet.

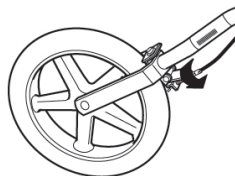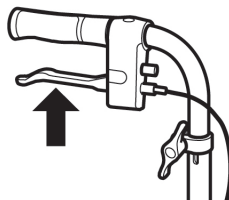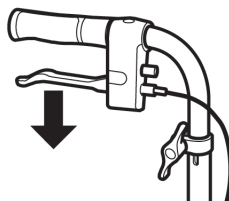

Rollator Carl-Oskar / Rebel

Rengöring och service

Vid rengöring rekommenderas vatten och mildt rengöringsmedel. Maskintvätt 60°C i 7-8 min kan användas, observera efterbehandlingskraven. Undvik att spola med tryck mot lager (hjul, framgafflar).



OBS!

Använd inte lacknafta, bensin eller andra lösningsmedel.



Viktigt!

Vid byte av delar på rollatorn ska endast originaldelar användas för att CE-märkningen ska gälla.



Viktigt!

Egna ingrepp/ändringar på rollatorn är inte tillåtet.



Viktigt!

Utför regelbunden översyn av rollatorn för att den ska fungera tryggt och säkert för brukaren.

Översyn bör genomföras regelbundet enligt rekonditioneringsanvisning:

Carl-Oskar, art. nr.: 99211

Rebel, art. nr.: 99212.

För mer information om service, rekonditionering, reservdelar och tillbehör, se Human Cares hemsida: www.humancaregroup.com eller kontakta oss via adress, telefonnummer eller e-mailadress enligt sista sidan.