



## Parade



För att hjälpmedlet skall fungera tryggt och säkert för brukaren bör översyn av hjälpmedlet göras en gång per år. Därför rekommenderas följande åtgärder.

### ☐ Rengöring

Vid rengöring rekommenderas vatten och mildt rengöringsmedel. Maskintvätt 60°C i 7-8 min kan användas, observera efterbehandlingskraven. Undvik att spola med tryck mot lager (hjul, framgafflar). **OBS:** Använd inte lacknåta, bensin eller andra lösningsmedel.

### ☐ Efterbehandling

Direkt efter tvätt skall alla lager (hjul, framgaffel) roteras 10 varv så att lagerfettet kan fördelas. Blås rent leder, trånga utrymmen samt dräneringshål och spreja dem sedan med tunnflytande olja.

### ☐ Lacken

Kontrollera skador i lacken. För att förhindra korrosionsskador, bättra på repor. Bättringsfärg kan beställas från Human Care.

### ☐ Rörstomme

Svets och skruvförband kontrolleras. Vid större korrosion ska rollatorn bytas.



Handtag på rollatorer efter 150122



Handtag på rollatorer före 150122

### ☐ Handtag

Kontrollera att handtagsrören går att skjuta ner i chassit. Handtagen ska inte gå att kunna rotera, byt grepp vid behov. Notera att befintliga handtag kan uppgraderas till 89055 (se reservdelslista och sprängskiss).

*Notera: Rollatorer med produktionsdatum senare än 150122 levereras med hantagskit med art no 89055. Rollatorer tillverkade tidigare än detta datum kan uppgraderas med art. nr: 89055 alternativt gamla handtagen (art.nr: 00022 och 00021, se reservdelslista och ritning).*

### ☐ Bromsar

Kontrollera att både färd- och parkeringsbroms fungerar. Wirar ska vara hela och uppklamrade.

### ☐ Vingvred

Kontrollera funktionen.

### ☐ Reflexer

Kontrollera att reflexerna är kvar och att de syns.

### ☐ CE-märkning

Kontrollera att CE-märkningen finns kvar och att den går att läsa.

### ☐ Hjul

Kontrollera att hjulen inte är slitna och att de snurrar lätt utan oljud.

### ☐ Smörjning

Grindbusningar och gångjärn ska fungera utan oljud. Smörj vid behov.

### ☐ Framgafflar

Kontrollera att infästning och lager inte glappar, kontrollera att gaffeln enkelt kan rotera. Om justering av framgaffel skall ske skall M12 samt M6 skruv bytas.

### ☐ Ihopfällningsmekanismen

Ska vara hel och låsningen ska fungera.

### ☐ Sittdyna

Kontrollera att dynan sitter fast och att skruvarna är åtdragna.

### ☐ Stabilitet

Kontrollera att alla hjul står stadigt på underlaget och att det inte finns någon skevhet i chassit.

### ☐ Provkörning

Gör en slutlig kontroll genom en provkörning.





Rekonditioneringen skall endast ske av en person som har god kännedom om hur arbetet ska utföras. En felaktig utförd rekonditionering kan resultera i en olycka/tillbud. Vid oklarheter kontakta alltid återförsäljare.

Om det har uppstått korrosion som är kraftigare än ytrost ska rollatorn tas ur bruk och lämnas för återvinning.


Rollatorn får endast användas som gångstöd samt sittstöd vid stillastående. Egna ingrepp i hjälpmedlet är inte tillåtet.

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Produktnummer:                                                           |
| Ägare:                                                                   |
| Anmärkningar / Anteckningar:<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |
| Åtgärdad av:                                                             |
| Ort och datum:                                                           |

| Nr | Benämning                                                                               | Antal | Art. nr.      | Övrig information                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Bakre hjulkit</b>                                                                    |       | <b>50933</b>  |                                                                                                             |
| 1  | Bakre hjul                                                                              | 1     |               | Komplett med lager och distansrör.                                                                          |
| 2  | Låsmutter                                                                               | 1     |               |                                                                                                             |
| 3  | Kåpa                                                                                    | 1     |               |                                                                                                             |
|    | <b>Främre hjulkit</b>                                                                   |       | <b>50934</b>  |                                                                                                             |
| 4  | Främre hjul                                                                             | 1     |               | Komplett med lager och distansrör.                                                                          |
| 5  | Låsmutter                                                                               | 1     |               |                                                                                                             |
| 6  | Hjulbult                                                                                | 1     |               |                                                                                                             |
| 7  | <b>Vingvred komplett</b>                                                                |       | <b>50937</b>  | Smörj vingvredet vid behov.                                                                                 |
|    | Vingvred                                                                                | 1     |               |                                                                                                             |
|    | Skruv                                                                                   | 1     |               |                                                                                                             |
|    | Bricka                                                                                  | 1     |               |                                                                                                             |
| 8  | Handtag Cobra höger                                                                     | 1     | 00022         | Gäller t.o.m. 2015-01-21                                                                                    |
| 9  | Handtag Cobra vänster                                                                   | 1     | 00021         | Gäller t.o.m. 2013-12-31                                                                                    |
| 10 | Handtag ERGO                                                                            | 1     | 20-024        | Gäller fr.o.m. 2015-01-22                                                                                   |
| 11 | <b>Skruv och mutter handtag</b><br>(gäller bara gamla handtag art. nr: 00022 och 00021) |       | <b>50935</b>  | Skruvvar och muttrar måste bytas vid demontering. Den kortare muttern skall monteras i mitten av handtaget. |
|    | Skruv                                                                                   | 3     |               |                                                                                                             |
|    | Mutter 22mm                                                                             | 2     |               |                                                                                                             |
|    | Mutter 21,5mm                                                                           | 1     |               |                                                                                                             |
| 12 | <b>Handtagskit</b>                                                                      | 1     | <b>89055</b>  | För vänster och höger.                                                                                      |
| 13 | <b>Grindlåskit</b>                                                                      |       | <b>10-018</b> |                                                                                                             |
|    | Grindlås                                                                                | 1     |               |                                                                                                             |
|    | Skruv till grindlås                                                                     | 4     |               |                                                                                                             |
|    | Dragögla                                                                                | 1     |               |                                                                                                             |
| 14 | Dragögla                                                                                | 1     | 10-009        |                                                                                                             |
| 15 | <b>Vajer komplett</b>                                                                   |       | <b>89050</b>  |                                                                                                             |
|    | Hölje                                                                                   | 1     |               |                                                                                                             |
|    | Vajer                                                                                   | 1     |               |                                                                                                             |
|    | Vajerlås                                                                                | 1     |               |                                                                                                             |
|    | Ändavslutning                                                                           | 1     |               |                                                                                                             |
| 16 | Reflex                                                                                  | 1     | 00028         |                                                                                                             |
| 17 | Fällningslås                                                                            | 1     | 73004         |                                                                                                             |

## REKONDITIONERINGSANVISNING

Standardhandtag på rollatorer producerade efter  
2015-01-22 (reservdel för tidigare versioner)

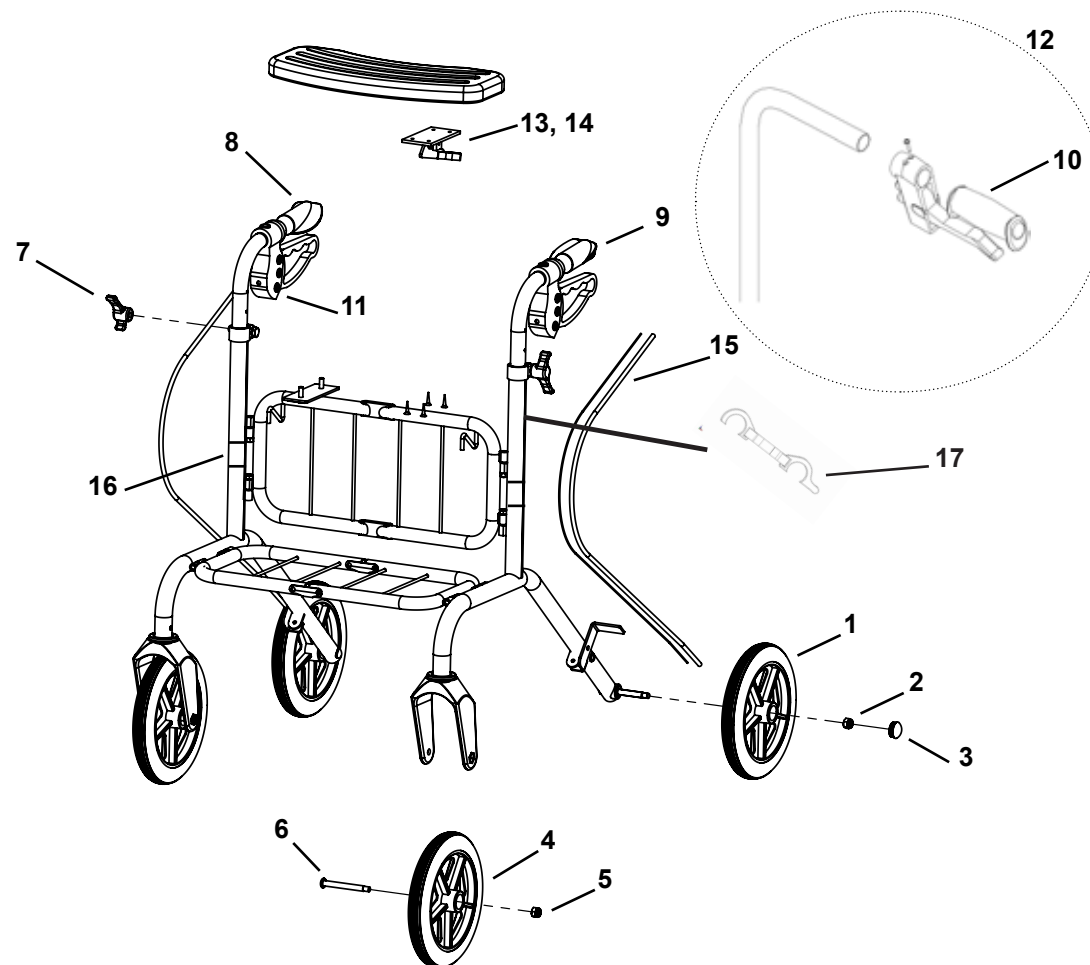

• Årstaängsvägen 21B, 117 43 Stockholm •  
• Tel. 08 - 510 132 00 • Fax 08 - 665 35 10 •  
• [www.humancaregroup.com](http://www.humancaregroup.com) •