

Staffan Gåbord

Denna rekonditioneringsanvisning gäller för rollatorn och dess tillgängliga tillbehör och reservdelar.



För att hjälpmedlet skall fungera tryggt och säkert för brukaren bör översyn av hjälpmedlet göras en gång per år. Därför rekommenderas följande åtgärder.

☐ Regöring & Desinfektion

Vid rengöring rekommenderas vatten och mildt rengöringsmedel. Maskintvätt 60°C i 10 min kan användas, torkning max 70°C i 10 min, observera efterbehandlingskraven. Undvik att spola med tryck mot lager (hjul, framgafflar). **OBS!** Använd INTE lacknafta, bensin eller andra lösningsmedel. Desinfektion utförs av behörig personal med lämplig skyddsutrustning och enligt desinfektionsmedelstillverkarens instruktioner. Vid rengöring använd en svamp eller mjuk trasa som inte repar produkten. Använd ett godkänt kemiskt desinfektionsmedel som innehåller 70-80% etanol. Använd ej rengöringsmedel med slipmedel, klor eller fenol. Vid frågor om desinfektion eller lämpliga desinfektionsmedel kontakta Human Care.

☐ Efterbehandling

Efter tvätt skall alla leder, trånga utrymmen samt dräneringshål blåsas torra och sprejas med tunnflytande olja. Om avfettningsmedel använts bör de rörliga delarna smörjas.

☐ Lacken

Kontrollera skador i lacken. För att förhindra korrosionsskador, bättra på repor. Bättringsfärg kan beställas från Human Care HC AB.

☐ Rörstomme

Svets och skruvförband kontrolleras. Vid större korrosion ska rollatorn bytas.

☐ Handtag

Ska sitta fast. Kontrollera att handtagsrören går att skjuta ner i chassit. Byt greppet vid behov.

☐ Bromsar

Kontrollera att både färd- och parkeringsbroms fungerar. Wirar ska vara hela och uppklamrade.



☐ Vingvred

Kontrollera funktionen.

☐ CE-märkning

Kontrollera att CE-märkningen finns kvar och att den går att läsa.

☐ Hjul

Kontrollera att hjulen inte är slitna och att de snurrar lätt utan oljud.

☐ Smörjning

Framgafflarna ska fungera utan oljud, smörj vid behov.

☐ Framgafflar

Kontrollera att de snurrar lätt.

☐ Stabilitet

Kontrollera att alla hjul står stadigt på underlaget och att det inte finns någon skevhet i chassit.

☐ Provkörning

Gör en slutlig kontroll genom en provkörning.



REKONDITIONERINGSANVISNING

Observera!

Rekonditioneringen skall endast ske av en person som har god kännedom om hur arbetet ska utföras. En felaktig utförd rekonditionering kan resultera i en olycka/tillbud. Vid oklarheter kontakta alltid återförsäljare.

Vid byte av delar på hjälpmedlet ska endast originaldelar användas för att CE märkningen ska gälla.

Vid demontering av hjul måste hjulmutter och pinnbult bytas, då de innehåller en självläsning som förstörs när de demonteras.

Om det har uppstått korrosion som är kraftigare än ytrost ska gåbordet tas ur bruk och lämnas för återvinning.

Avsedd användning

Gåbordet får endast användas som gångstöd. Egna ingrepp i hjälpmedlet är inte tillåtet.

Produktnumber:

Ägare:

Noteringar:

Åtgärdad av:

Plats och datum:

Reservdelsslista

Nr	Namn	Antal	Art. nr	Övrig info
1	Knopp	2	20-014	
2	Hjulkit	4	89015	Pinnbult och hjulmutter måste bytas vid demontering av hjulet.
3	Hjul komplett	4		
4	Hjulmutter	4		
4	Pinnbult	4		
5	Vingvred Komplet	4	50937	Smörj vingvredet vid behov.
5	Vingvred	4		
6	Skruv	4		
7	Bricka	4		
8	RA handtag	2	20-064	
9	Handbroms komplett	2	10650	Komplett med hållare, bromshandtag och nit.
10	Handtag	2	00020	
11	Gåbordsdyna	1	20-053	
12	Dynfäste Gåbord höger	1	400-023H	Staffan GB hög
13	Dynfäste Gåbord höger	1	400-023V	Staffan GB hög
14	Teleskoprör	1	400-025	Staffan GB låg
	Hölje	2	00013	Staffan GB låg
	Hölje	2	00014	Staffan GB hög
	Vajer	2	00005	Staffan GB låg
	Vajer	2	00003	Staffan GB hög

