





Viktig! Denna snabbguide ersätter inte användarmanualen. Ladda ner manualen på www.humancaregroup.com. **Läs alla instruktioner före användning!**

Komponenter

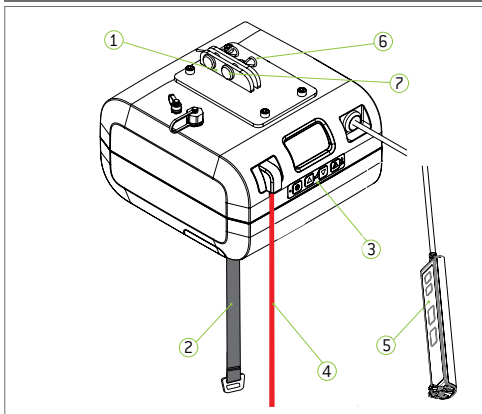

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1 Fäste för åkvagn | 5 Handkontroll (IPX7) |
| 2 Lyftbälte | 6 Låssprintar |
| 3 Sekundärpanel | 7 Bultar |
| 4 Nödstoppsband | |

Sekundär manöverpanel, funktioner

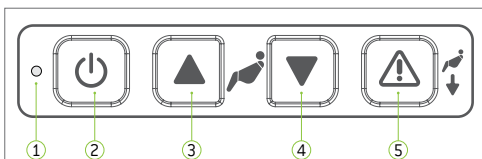

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1 Statusindikator | 4 Ned-knapp |
| 2 På/Av | 5 Nödsänkning |
| 3 Upp-knapp | |


Statusindikatorlampor

- | | |
|---|---|
| Blinkande grönt
På / Klar för användning
Fullt batteri | Fast röd
Fallspärr aktiverad
Felsökning! |
| Blinkande gult
På / Klar för användning
Batterinivå Normal | Fast gul
Laddning pågår
Funktioner blockerade |
| Blinkande rött
På / Klar för användning
Låg batterinivå
Ladda batteri | Blinkande grönt / gult
Servicevarning
Utför inspektion |
| Fast grön
Lyft i användning | Blinkande röd / gul
Servicevarning
Svagt batteri |




Viktig! Denna lyft är designad och testad för användning inomhus med en patient åt gången. Denna produkt får inte nedsänkas i vatten. **Läs alla instruktioner för komplett produktinformation!**

Handkontrollfunktioner

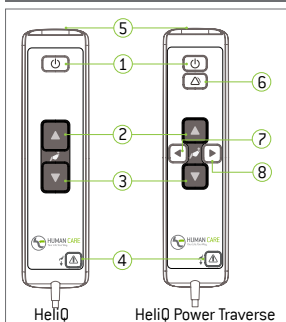

- 1 Av / på-knapp
2 Upp-knapp
3 Ned-knapp
4 Nödsänkning
5 Laddningsingång och USB-C
- Endast för Power Traverse:
6 Larmknapp
7 Lyft bakåt
8 Lyft framåt

Laddning av Lyft

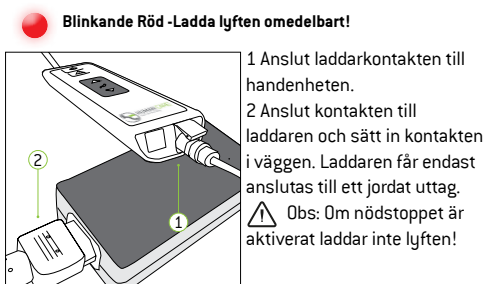


Viktig! Lyften kan endast användas med en Human Care-laddare som måste kopplas bort före användning.

Modeller: 55100H, 55110H, 55120H
(PT) 55130H, 55140H, 55150H
Human Care HC AB. Alla rättigheter förbehållna.



Använda lyften

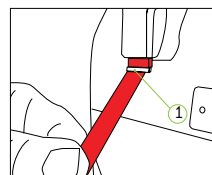

Aktivera nödstopp

Dra i den röda bandet för att aktivera.

Avaktivera nödstopp


Tryck upp knappen [1] placerad över nödstoppsbandet.



Viktig! Nödsänkning får endast användas i nödsituationer. Funktionen har en fördröjning på 3 sekunder.



1 Via handkontroll: Tryck samtidigt ned knappen [3] och nödsänkknappen på handkontroll [5]. 2 Sekundärpanel: Tryck ner knappen [4] och nödsänkknappen [5] samtidigt.

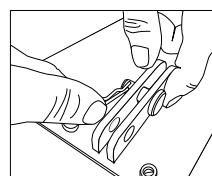


Upphängning av lyften

Lyften monteras direkt på åkvagnen i skenan. **Använd inga distansremmar.** Ta bort låssprintarna som håller bultarna på plats. Ta bort bultarna och linjera hålen i skenan med hålen i åkvagnen. Skjut in bultarna genom hålen och säkra på plats med låssprintar. För att ta ner, gör i omvänd ordning.




Viktig! Bältet måste förbli spänt när det matas in i hissen.

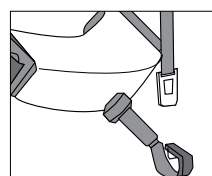

Byglar

Sänk lyftbandet till en bekväm arbetshöjd. Anslut bygeln till lyften genom att kroka i bygeln diagonalt under lyftbandet.

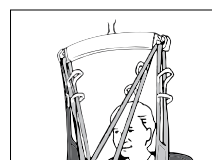

Selar

Fäst först selens huvudöglor till lyftbygeln. Se till att remmarna sitter fast under urhaknings-skydden.



Korrekt lyfteknik

Använd inte lyftbygeln för att flytta patienten och lyften. Håll inte fast i krokarna när du utför ett lyft. När patienten är säkrad i lyftbandet, höj lyften, håll selen och placera / flytta patienten.

Skötselanvisning



Lyften bör laddas varje natt.



Torka av lyftkassetten med en lätt fuktad torkduk.



Desinficeras med DuPont™ Virkon®.



Använd ALDRIG starka rengöringsmedel på lyftkassetten



Spola ALDRIG lyftkassetten med vatten



Aktivera nödstoppet om lyftkassetten inte ska användas



Viktig! Använd endast godkända metoder för transport! Lyften skall transporteras och lagras liggande horisontellt. Vila på vagnen för att flytta eller använda godkänd bärräm¹.

¹ Varning! Vid användning av remmen måste extra försiktighet iaktas att inte skrynkla eller böja lyftbältet.

Inspektion

Årlig inspektion - Lyften skall inspekteras minst en gång per år av personal kvalificerad av Human Care. Byt ut lyftbältet minst vartannat år som en förebyggande åtgärd.

Månadsvis inspektion - Kontrollera lyftbanden för skador eller förslitningar. Mata ut hela lyftbanden för inspektion.

Daglig inspektion - Kontrollera att inga synliga skador finns på lyften. Kontrollera att lyften är korrekt monterad i mellanstycke eller löpvagn. Kontrollera alltid lyftselen före varje användning. Vid skador, byt ut lyftselen.

Felsökning

Om kontrollampen inte lyser, kontrollera följande:

- Strömbrytaren är på
- Batterierna är helt urladdade - ladda eller byt ut
- Nödstoppsknappen trycks inte in (inaktivera genom att vrida medurs)

Om kontrollampen blinkar, kontrollera följande:

- Handkontrollknappen fungerar inte upp / ner när den trycks ned (byt ut vid behov)
- Lyften är i sitt översta läge. Tryck på Ned-knapp på handkontrollen eller manöverpanelen för att sänka.
- Lyften är i sitt nedersta läge. Tryck på Upp-knappen på handkontrollen eller manöverpanelen för att höja.

Indikatorlampan lyser fast röd:

- Lyftmotorn är överhettad. Låt lyftmotorn svalna.
- Lyften är överbelastad. Sänk ner med nödfiringsknappen.

Indikatorlampan lyser fast gult:

- Laddning pågår.

Om lyftbältet inte matas ut ordentligt:

- Dra bältet uppåt samtidigt som du trycker ner ner-knappen på handkontrollen/lyftpanelen.

Om indikatorn ändras till rött blinkande:

- Batterierna måste laddas, patienten kan lyftas några gånger till.