





Viktigt! Denna snabbguide ersätter inte användarmanualen. Ladda ner manualen på www.humancaregroup.com. **Läs alla instruktioner före användning!**

Komponenter

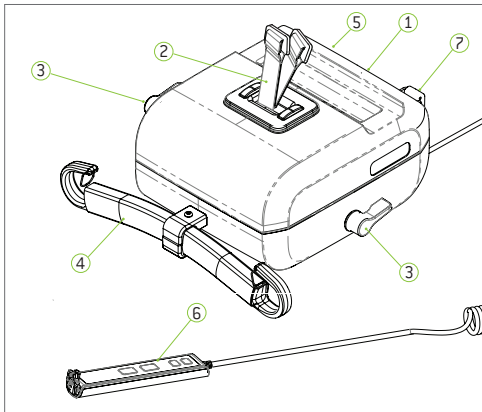

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1 Sekundär manöverpanel | 5 Nödstopp |
| 2 Lyftband | 6 Handkontroll (IPX7) |
| 3 Riktningsspak | 7 Benkrok |
| 4 Bygel | |

Sekundär manöverpanel, funktioner

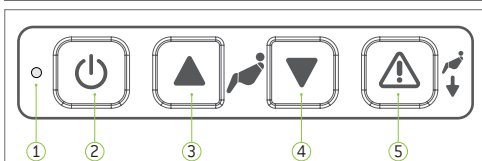

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1 Statusindikator | 4 Ned-knapp |
| 2 På/Av | 5 Nödsänkning |
| 3 Upp-knapp | |


Statusindikatorlampor

- | | |
|---|---|
| Blinkande grönt
På / Klar för användning
Fullt batteri | Fast röd
Fallspärr aktiverad
Felsökning! |
| Blinkande gult
På / Klar för användning
Batterinivå Normal | Fast gult
Laddning pågår
Funktioner blockerade |
| Blinkande rött
På / Klar för användning
Låg batterinivå
Ladda batteri | Blinkande grönt / gult
Servicevarning
Utför inspektion |
| Fast grön
Lyft i användning | Blinkande röd / gult
Servicevarning
Svagt batteri |




Viktigt! Denna lyft är designad och testad för användning inomhus med en patient åt gången. Denna produkt får inte nedsänkas i vatten. **Läs alla instruktioner för komplett produktinformation!**

Handkontrollfunktioner

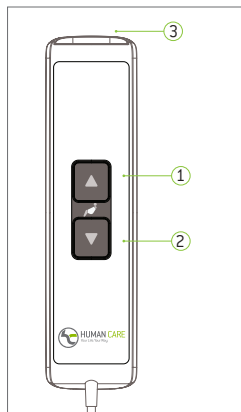

- 1 Upp
- 2 Ner
- 3 Laddningsingång och USB-C

Laddning av Lyft

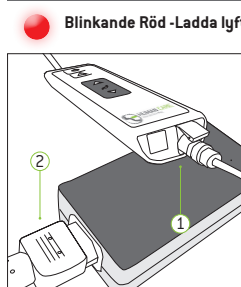

Blinkande Röd -Ladda lyften omedelbart!

- 1 Anslut laddarkontakten till handenheten.
 - 2 Anslut kontakten till laddaren och sätt in kontakten i väggen. Laddaren får endast anslutas till ett jordat uttag.
- Obs:** Om nödstoppet är aktiverat laddar inte lyften!



Viktigt! Lyften kan endast användas med en Human Care-laddare som måste kopplas bort före användning.

Modell: 55300H

Human Care HC AB. Alla rättigheter förbehållna.



Rum till rumöverföringsfunktion




Rum till rum överföringar

Aktivera önskat band genom att vrida riktningsspaken. Om spaken är riktad mot benkroken är bandet närmast benkroken aktiv. Om den är riktad mot bygeln är bandet närmast bygeln aktiv.



Viktigt! Vrid inte spaken förrän båda banden är anslutna till respektive åkvagn. Spaken måste alltid peka mot det anslutna bältet.

Använda lyften

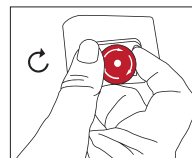

Aktivera nödstopp

Tryck ner den röda knappen för att aktivera.

Avaktivera nödstopp


Vrid den röda knappen medsols.



Viktigt! Nödsänkning får endast användas i nödsituationer. Funktionen har en fördröjning på 3 sekunder.




För att aktivera, tryck samtidigt på "Ner" -knappen [4] och sekundärpanelens nedsänkknapp [5].

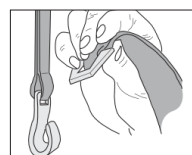

Upphängning av lyft

Placera lyften på en lämplig yta. Mata ut lyftbandet genom att dra ut det försiktigt samtidigt som du trycker på "Ned" -knappen, antingen på handkontrollen eller på sekundärpanelen. Kroka i lyftbältet på mellanstycke så att det hålls ordentligt i läge (kroka enklast i uppför i den vinkel som visas). **Se till att lyftbältet är ordentligt på plats före användning.**

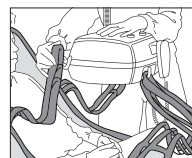

Selar

Fäst först selens huvudöglor till lyftbygeln, sedan remmarna till benkrokarna. Se till att remmarna sitter fast under urhakningsskyddet.



Korrekt lyfteknik

Använd inte lyftbygeln för att flytta patienten och lyften. Håll inte fast i krokarna när du utför ett lyft. När patienten är säkrad i lyftbandet, höj lyften, håll selen och placera / flytta patienten.

Skötselanvisning



Lyften bör laddas varje natt.



Desinficeras med DuPont™ Virkon®.



Spola ALDRIG lyftkassetten med vatten



Torka av lyftkassetten med en lätt fuktad torkduk.



Använd ALDRIG starka rengöringsmedel på lyftkassetten



Aktivera nödstoppet om lyftkassetten inte ska användas



Viktigt! Använd endast godkända metoder för transport! Lyften skall transporteras och lagras liggande horisontellt. Vila på vagnen för att flytta eller använda godkänd bärräm¹.

¹ Varning! Vid användning av remmen måste extra försiktighet iaktas att inte skrynkla eller böja lyftbältet.

Inspektion

Årlig inspektion - Lyften skall inspekteras minst en gång per år av personal kvalificerad av Human Care. Byt ut lyftbältet minst vartannat år som en förebyggande åtgärd.

Månadsvis inspektion - Kontrollera lyftbanden för skador eller förslitningar. Mata ut hela lyftbanden för inspektion.

Daglig inspektion - Kontrollera att inga synliga skador finns på lyften. Kontrollera att lyften är korrekt monterad i mellanstycke eller löpvagn. Kontrollera alltid lyftselen före varje användning. Vid skador, byt ut lyftselen.

Felsökning



Om kontrollampen inte lyser, kontrollera följande:

- Strömbrytaren är på
- Batterierna är helt urladdade - ladda eller byt ut
- Nödstoppknappen trycks inte in (inaktivera genom att vrida medurs)



Om kontrollampen blinkar, kontrollera följande:

- Handkontrollknappen fungerar inte upp / ner när den trycks ned (byt ut vid behov)
- Lyften är i sitt översta läge. Tryck på Ned-knapp på handkontrollen eller manöverpanelen för att sänka.
- Lyften är i sitt nedersta läge. Tryck på Upp-knappen på handkontrollen eller manöverpanelen för att höja.



Indikatorlampen lyser fast röd:

- Lyftmotorn är överhettad. Låt lyftmotorn svalna.
- Lyften är överbelastad. Sänk ner med nödföringsknappen.



Indikatorlampen lyser fast gult:

- Laddning pågår.



Om lyftbältet inte matas ut ordentligt:

- Dra bältet uppåt samtidigt som du trycker ner ner-knappen på handkontrollen/lyftpanelen.



Om indikatorn ändras till rött blinkande:

- Batterierna måste laddas, patienten kan lyftas några gånger till.