



## Brukarinformation

- Läs alla varningar och instruktioner noggrant innan du använder rollatorn.
- Säkerställ att rollatorn är ordentligt uppfälld innan användning.
- Rollatorn får endast användas som gång- och sittstöd.
- Det är förbjudet att stå på rollatorn.
- Använd inte produkten i trappor eller rulltrappor.
- Iakttag extra försiktighet när rollatorn används i backar eller på ojämnt underlag.
- Sitt aldrig på rollatorn och rulla dig fram med fötterna.
- Fördela vikten jämnt för att förhindra att rollatorn välter när du sätter dig.
- Parkeringsbromsen skall vara ilagd om rollatorn används som stöd när du sätter dig ned eller reser dig upp.
- Placera inget på den hopfällda rollatorn vid förvaring eller transport då det kan skada rollatorn.
- Förvara inte rollatorn nära en värmekälla då detta kan skada vissa detaljer.
- Var försiktig vid hantering av rollatorn så att du inte skadar dig när den har varit utsatt för extremt höga eller låga temperaturer.
- Förvara inte rollatorn utomhus.
- Spara bruksanvisningen för framtida användning.

### Utfällning

1. Dra i låsbygeln under sitsen och rollatorn fälls ut automatiskt och låses.

Viktigt! Kontrollera att den röda låsspärren faller ner av sin egen vikt.

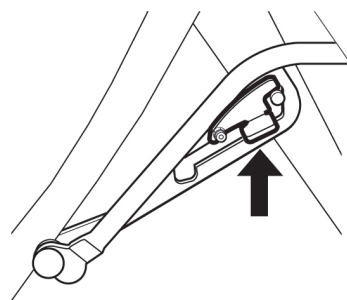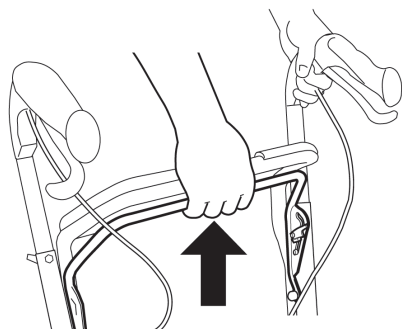


### Hopfällning

1. Lyft upp den röda låsspärren.

2. Dra låsbygeln uppåt. Rollatorn fälls ihop automatiskt.

3. För ihop stativet tills rollatorn låser i hopfällt läge.

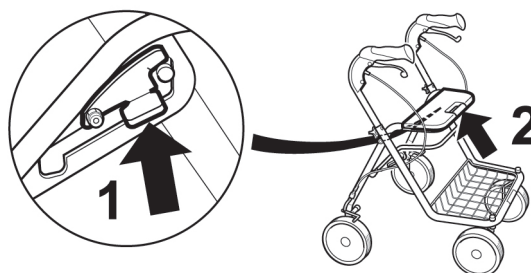


### Justering av körhandtag

Lossa vingvreden och justera körhandtagen till handledshöjd. Lås vingvreden.

Vinkling i sidled av handtagen:  $\pm 0^\circ$ .



Viktigt! Handtagen får inte höjas över markeringen "MAX" på handtagsrörens sidor. Körhandtagen ska vara riktade framåt. Handtagsrörets siffror ska vara i linje med slits på rörets sidor.

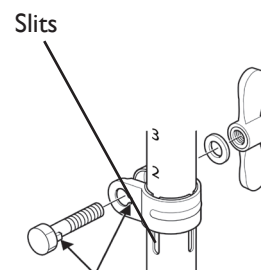

**Varning!** Handtagen får ej vinklas utåt eftersom rollatorns tipprisk då ökar.

Vid montering av vingvreden är det viktigt att klacken på skruven hamnar i spåret i skruvhålet.




### Parkeringsbroms

Tryck bromshandtaget nedåt för parkeringsläge.

**Varning!** Parkeringsbromsa innan Du sätter dig.

### Färdbroms

Dra bromshandtaget uppåt för färdbroms.

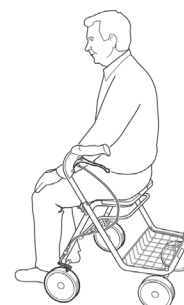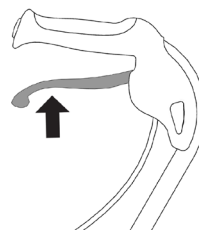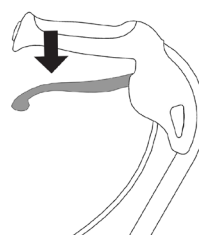


OBS! Bromsen består av en bromsspak för varje hjul, där höger bromsspak påverkar höger hjul, och vänster bromsspak påverkar vänster hjul. Bromshandtaget drar i en wire som löper i ett hölje. Wiren drar i en bromsbygel som trycker på hjulet. Vid enhandsbroms påverkar en bromsspak båda hjulen.

### Bromsjustering

Justera bromsen genom att lossa på kontramuttern och därefter skruva upp eller ner justermuttern. Efter justering lås kontramuttern mot justermuttern.

OBS! Kontinuerlig bromsning leder till onormalt slitage på hjul och broms.

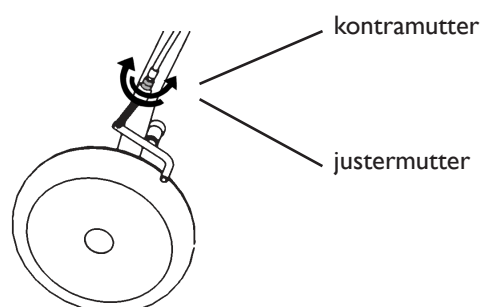

## **Rengöring och service**

Viktigt!

Vid byte av delar på rollatorn ska endast originaldelar användas för att CE-märkningen ska gälla.

Viktigt!

Egna ingrepp/ändringar på rollatorn är inte tillåtet.

Viktigt!

Utför regelbunden översyn av rollatorn för att den ska fungera tryggt och säkert för brukaren.

Översyn bör genomföras regelbundet enligt rekonditioneringsanvisning 99210.

För mer information om service, rekonditionering, reservdelar och tillbehör, se Human Cares hemsida: [www.humancaregroup.com](http://www.humancaregroup.com) eller kontakta oss via adress, telefonnummer eller e-mailadress enligt sista sidan.