


Brukarinformation

- Läs alla varningar och instruktioner noggrant innan du använder rollatorn.
- Säkerställ att rollatorn är ordentligt uppfälld innan användning.
- Rollatorn får endast användas som gång- och sittstöd.
- Det är förbjudet att stå på rollatorn.
- Använd inte produkten i trappor eller rulltrappor.
- Iakttag extra försiktighet när rollatorn används i backar eller på ojämnt underlag.
- Sitt aldrig på rollatorn och rulla dig fram med fötterna.
- Fördela vikten jämnt för att förhindra att rollatorn välter när du sätter dig.
- Parkeringsbromsen skall vara ilagd om rollatorn används som stöd när du sätter dig ned eller reser dig upp.
- Placera inget på den hopfällda rollatorn vid förvaring eller transport då det kan skada rollatorn.
- Förvara inte rollatorn nära en värmekälla då detta kan skada vissa detaljer.
- Var försiktig vid hantering av rollatorn så att du inte skadar dig när den har varit utsatt för extremt höga eller låga temperaturer.
- Förvara inte rollatorn utomhus.
- Spara bruksanvisningen för framtida användning.

Användning


För att få bästa möjliga gångutrymme kan sitsen fällas upp när man går med rollatorn. Detta gör även att man bättre kan nå arbetsytor, hyllor mm.

För att få ytterligare gångutrymme går lastgallret att ta bort.

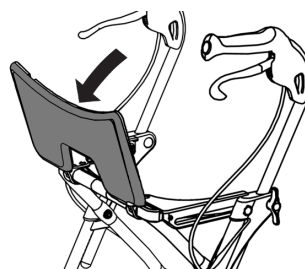

Steghjälp


För att lättare komma över högre trösklar eller liknande, finns en steghjälp som man trycker på med foten för att luta rollatorn.

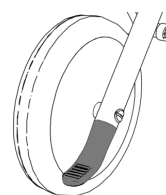

Utfällning


1. Tryck ner den röda knappen
2. Skjut rollatorn ifrån dig. Rollatorn låses i utfällt läge automatiskt.

Viktigt! Det finns två lägen vid hopfällning, transportläge och förvarings / ståläge. För att ytterligare fälla ihop/ isär rollatorn från ståläge, tryck in den röda knappen. Se till att wiren inte är i vägen eller tar i vid utfällning.

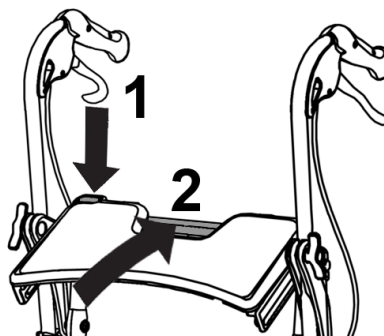

Hopfällning


1. Placera vänster hand på vänster handtag.
2. Tryck ner den röda knappen med höger tumme samtidigt som du lyfter rollatorn uppåt. Håll emot med vänster hand.
3. Släpp knappen vid stäläge eller hopfällt läge och rollatorn låses automatiskt.

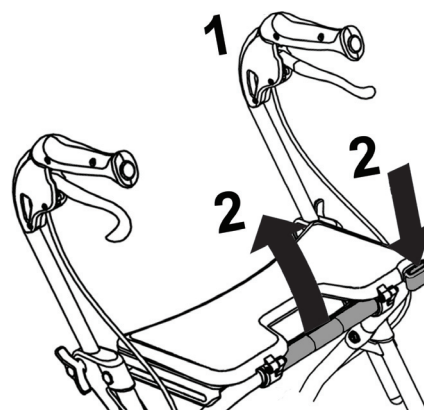

Varning! Rollatorn får under inga omständigheter användas som sitt- eller gångstöd i hopfällt läge.

Justering av körhandtag

1. Handtaget justeras genom att skruva ut vingvredet för att sedan kunna skjuta ned eller upp handtagsröret.
2. Vid önskat läge, skruva fast vingvredet ordentligt. Mellan markering "MAX" och 5 ska handtaget vinklas 3° , eller mer, inåt mot centrum (motsvarande 1 cm mätt från körhandtagets framkant). Mellan markering 5 till 9 kan handtaget vinklas rakt fram, 0° .

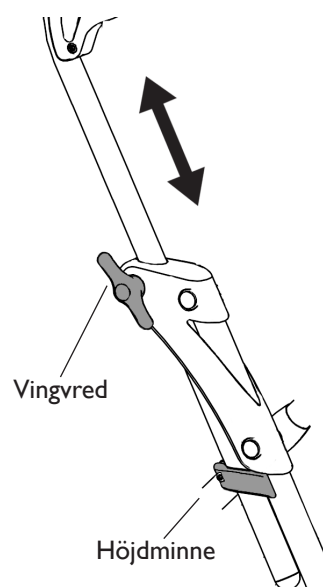

Viktigt! Handtagen får inte höjas över markeringen "MAX" på handtagsrörens sidor. Körhandtagens sidor skall vara riktade framåt. Handtagsrörets siffror skall vara i linje med markering.

OBS! Rollatorn har ett höjdminne som fungerar så att handtagen i sitt maxläge har den höjden som förskrivaren har ställt in. Detta gör att du enkelt får tillbaka rätt handtagshöjd efter justering. Höjdminnet fungerar upp till höjden 96 cm, vid högre handtagshöjd tas höjdminnet bort. Skjut ner handtagen för att minska utrymmesbehovet vid frakt.

Vinkeln mellan handtagens longitudinella linje och rollatorns framåtriktning måste alltid vara 3° , eller mer, då handtagen är positionerade mellan markeringen "MAX" och 5 på handtagsröret.


Parkeringsbroms

Tryck bromshandtaget nedåt för parkeringsläge.

Varning! Parkeringsbromsa innan Du sätter dig.

Färdbroms

Dra bromshandtaget uppåt för färdbroms.

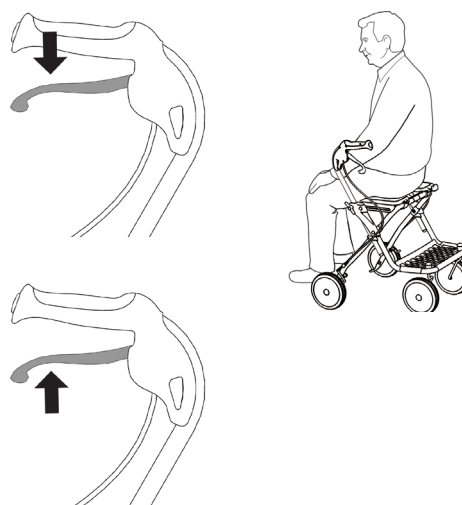


OBS! Bromsen består av en bromsspak för varje hjul, där höger bromsspak påverkar höger hjul, och vänster bromsspak påverkar vänster hjul. Bromshandtaget drar i en wire som löper i ett hölje. Wiren drar i en bromsbygel som trycker på hjulet. Vid enhandsbroms påverkar en bromsspak båda hjulen.

Bromsjustering

Justera bromsen genom att lossa på kontramuttern och därefter skruva upp eller ner justermuttern. Efter justering lås kontramuttern mot justermuttern.

OBS! Kontinuerlig bromsning leder till onormalt slitage på hjul och broms.

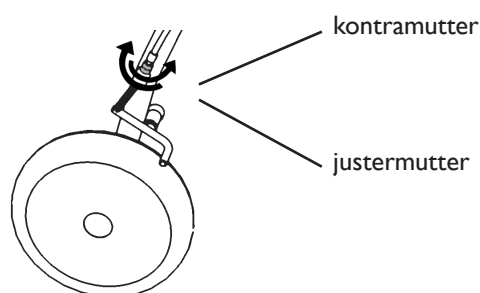

Rengöring och service

Viktigt!

Vid byte av delar på rollatorn ska endast originaldelar användas för att CE-märkningen ska gälla.

Viktigt!

Egna ingrepp/ändringar på rollatorn är inte tillåtet.

Viktigt!

Utför regelbunden översyn av utrustningen för att den ska fungera tryggt och säkert för brukaren.

Översyn bör genomföras regelbundet enligt rekonditioneringsanvisningar, art. nr. 99209.

För mer information om service, rekonditionering, reservdelar och tillbehör, se Human Cares hemsida: www.humancaregroup.com eller kontakta oss via adress, telefonnummer eller e-mailadress enligt sista sidan.