


## Brukarinformation, Gåbord


### Montering av dynan

Montera fast dynfästena i dynan med de tillhörande skruvarna.

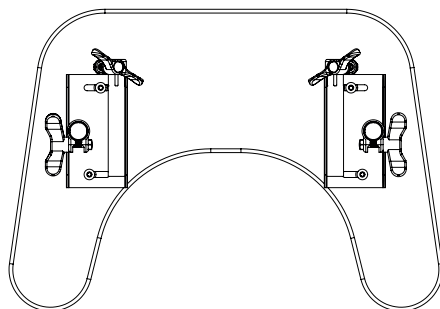


### Utfällning


1. För sidorören utåt.

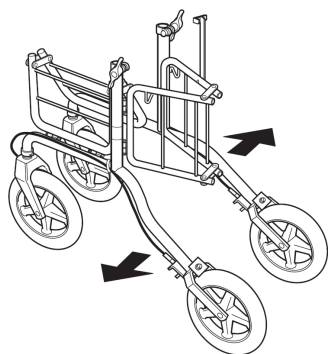


2. Tryck grinden framåt.

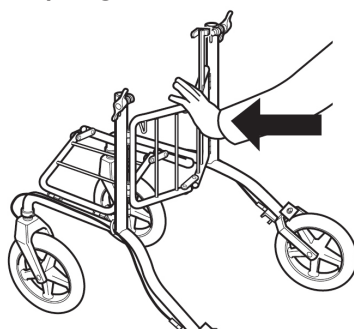


3. Lås grinden genom att fälla ner spärren.

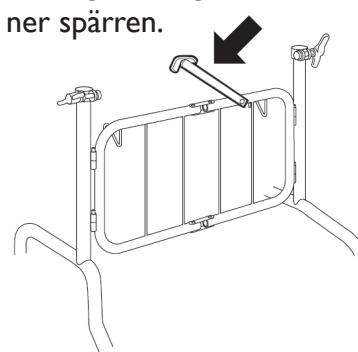

4. Sätt dit bordet och skruva fast det med vingvreden.

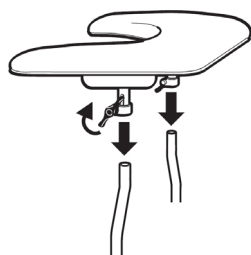

Viktigt!  
Vid fastskruvning med vingvreden är det viktigt att klacken på skruven hamnar i spåret i skruvhålet.

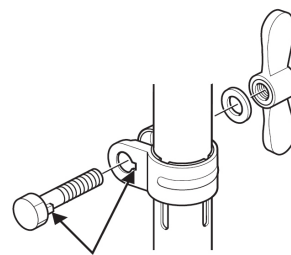

### Hopfällning

Hopfällningen av gåbordet görs i omvänd ordning mot utfällningen.

### Justering av höjd


Justera bordet till rätt höjd. Lossa vingvreden och justera handtagen till rätt höjd. Lås vingvreden.

Viktigt! Rören får inte höjas över markeringen "0".



### Justera avståndet till handtagen


Det inre röret får inte gå innanför det yttre röret.

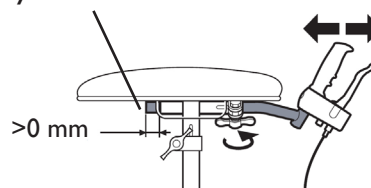


## Brukarinformation, RA-rollator

### Utfällning, RA-rollator med sits


1. För handtagen utåt.

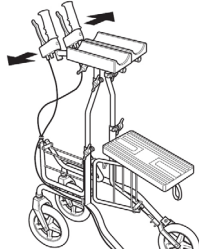


2. Tryck sitsen framåt.

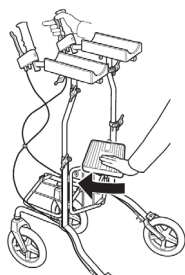

3. Viktigt!  
Kontrollera att låset greppar om grinden.

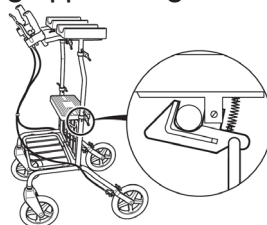


4. Viktigt! Stagen till armstöden ska peka inåt.

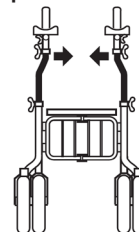


### Hopfällning, RA-rollator med sits

1. Dra i den röda öglan så att låset frigör grinden.

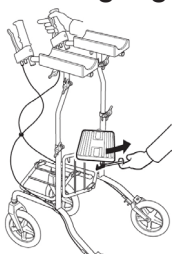


2. Dra sitsen bakåt och för handtagen inåt.

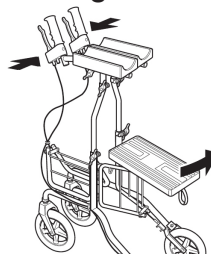


### Utfällning, RA-rollator utan sits

Fäll ner spärren.

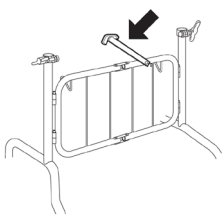


### Hopfällning, RA-rollator utan sits

Vik upp spärren, dra grinden bakåt och för handtagen inåt.

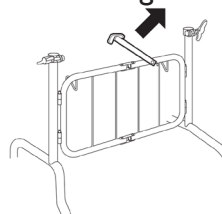


### Justering av höjd

Lossa vingvreden och justera körhandtagen till rätt handledshöjd. Lås vingvreden.

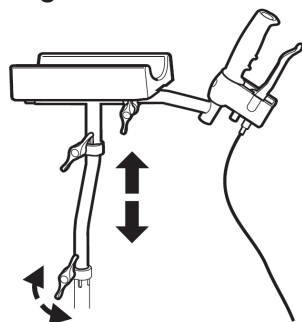

### Viktigt!

Vid fastskruvning med vingvreden är det viktigt att klacken på skruven hamnar i spåret i skruvhålet.

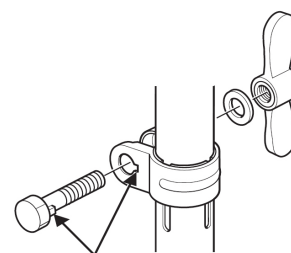

Viktigt! Rören får inte höjas över markeringen "0".

**Varning!** Vinkeln mellan handtagens longitudinella linje och rollatorns framåtriktning måste alltid vara 10°.


## Brukarinformation, Gåbord & RA-rollator

- Läs alla varningar och instruktioner noggrant innan du använder RA-rollatorn/gåbordet.
- Säkerställ att RA-rollatorn/gåbordet är ordentligt uppfälld innan användning.
- RA-rollatorn/gåbordet får endast användas som gång- och sittstöd.
- Det är förbjudet att stå på RA-rollatorn/gåbordet.
- Använd inte produkten i trappor eller rulltrappor.
- Iakttag extra försiktighet när RA-rollatorn/gåbordet används i backar eller på ojämnt underlag.
- Sitt aldrig på RA-rollatorn/gåbordet och rulla dig fram med fötterna.
- Fördela vikten jämnt för att förhindra att RA-rollatorn/gåbordet välter när du sätter dig.
- Parkeringsbromsen skall vara ilagd om RA-rollatorn/gåbordet används som stöd när du sätter dig ned eller reser dig upp.
- Placera inget på den hopfällda RA-rollatorn/gåbordet vid förvaring eller transport då det kan skada den.
- Förvara inte RA-rollatorn/gåbordet nära en värmekälla då detta kan skada vissa detaljer.
- Var försiktig vid hantering av RA-rollatorn/gåbordet så att du inte skadar dig när den har varit utsatt för extremt höga eller låga temperaturer.
- Förvara inte RA-rollatorn/gåbordet utomhus.
- Spara bruksanvisningen för framtida användning.

### Parkeringsbroms

Tryck bromshandtaget neråt för parkeringsläge.


**Varning!** Parkeringsbromsa innan Du sätter dig, gäller endast modeller med sits.

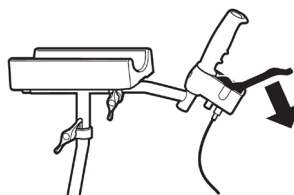

### Färdbroms


Drag bromshandtaget inåt för färdbroms.

**OBS!** Kontinuerlig bromsning leder till onormalt slitage på hjul och broms.

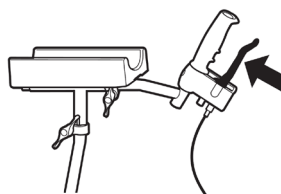

### Bromsjustering

Lossa låsmuttern, justera bromsen genom att skruva på justerhylsan. Efter justering skruva åt låsmuttern.

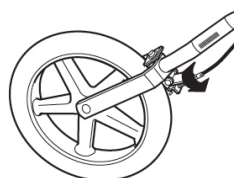

## **Rengöring och service**

Viktigt!

Vid byte av delar på rollatorn ska endast originaldelar användas för att CE-märkningen ska gälla.

Viktigt!

Egna ingrepp/ändringar på rollatorn är inte tillåtet.

Viktigt!

Utför regelbunden översyn av utrustningen för att den ska fungera tryggt och säkert för brukaren.

Översyn bör genomföras regelbundet enligt rekonditioneringsanvisning:

Carl-Oskar RA & GB, art. nr.: 99213

Rebel RA & GB, art. nr.: 99214

För mer information om service, rekonditionering, reservdelar och tillbehör, se Human Cares hemsida: [www.humancaregroup.com](http://www.humancaregroup.com) eller kontakta oss via adress, telefonnummer eller e-mailadress enligt sista sidan.