


Trolley walker / RA-rollator Staffan

Brukarinformation gåbord

Utfällning


1. Lyft undan bordet och fäll upp ramen.
2. För ut sidorören något i sidläge och fäll därefter upp dem.
3. Viktigt! Se till att låsspärrarna fixerar sidorören med ramen.
4. Se till så att körhandtagen är i sitt minimi läge, placera därefter bordet och dra åt vingmuttrarna.
5. Justera körhandtagen till lämpligt läge.

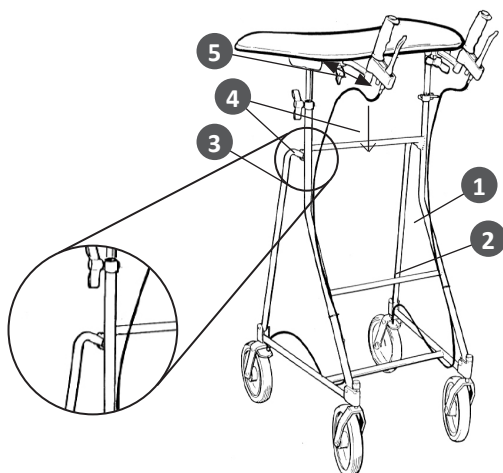

Hopfällning

Innan hopfällning ska körhandtagen justeras och placeras i sitt minimi läge. Detta för att minska slitaget på höljet till bromsvajern.

Hopfällningen av gåbordet görs i omvänd ordning mot utfällningen. Efter hopfällningen placeras bordet som bilden visar.

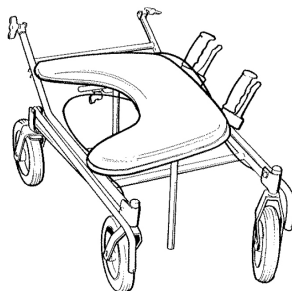

Varning!

Uppmärksamma klämriskerna i samband med hopfällningen


Justering av höjd

1. Ställ in stödbordet till önskad höjd genom att lossa vingmuttrarna.
2. Justera körhandtagen till lämpligt läge genom att lossa vingmuttrarna under armstöden.



Viktigt!

Stödbordet får inte höjas över markeringen "MAX" på handtagsrörens sidor.

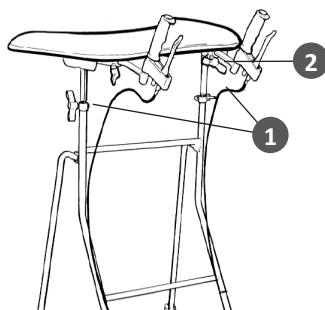


Brukarinformation RA-rollator

Utfällning

Se till så att körhandtagen är i sitt minimi läge innan utfällning.

1. För ut sidorören något i sidläge och fäll där efter upp dem.
2. Viktigt! Se till att låsspärrarna fixerar sidorören med ramen.
3. Justera körhandtagen till lämpligt läge.

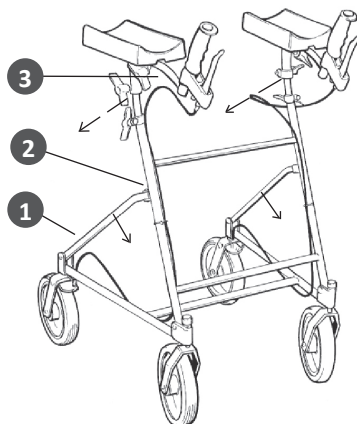

Hopfällning


Innan hopfällning ska körhandtagen justeras och placeras i sitt minimi läge. Detta för att minska slitaget på höljet till bromsvajern.

Hopfällningen av RA-rollatorn görs i omvänd ordning mot utfällningen.



Varning!

Uppmärksamma klämrisker i samband med hopfällningen

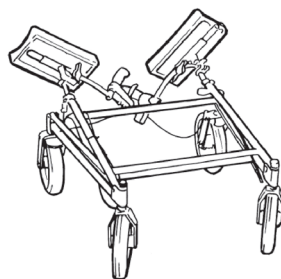


Justering av höjd

1. Ställ in RA-stöden till önskad höjd genom att lossa vingmuttrarna.
2. Justera körhandtagen till lämpligt läge genom att lossa vingmuttrarna under armstöden.



Viktigt!



RA-stöden får inte höjas över markeringen "MAX" på handtagsrörens sidor.

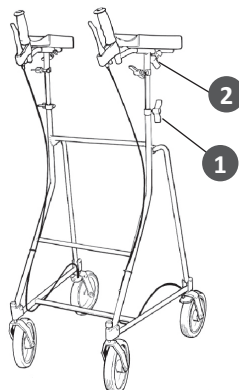

Trolley walker / RA-rollator Staffan


Brukarinformation gåbord & RA-rollator

- Läs alla varningar och instruktioner noggrant innan du använder RA-rollatorn/gåbordet.
- Säkerställ att RA-rollatorn/gåbordet är ordentligt uppfälld innan användning.
- RA-rollatorn/gåbordet får endast användas som gångstöd.
- Det är förbjudet att stå på RA-rollatorn/gåbordet.
- Använd inte produkten i trappor eller rulltrappor.
- Iakttag extra försiktighet när RA-rollatorn/gåbordet används i backar eller på ojämnt underlag.
- Sitt aldrig på RA-rollatorn/gåbordet och rulla dig fram med fötterna.
- Fördela vikten jämnt för att förhindra att RA-rollatorn/gåbordet välter när du sätter dig.
- Parkeringsbromsen skall vara ilagd om RA-rollatorn/gåbordet används som stöd när du sätter dig ned eller reser dig upp.
- Placera inget på den hopfällda RA-rollatorn/gåbordet vid förvaring eller transport då det kan skada den.
- Förvara inte RA-rollatorn/gåbordet nära en värmekälla då detta kan skada vissa detaljer.
- Var försiktig vid hantering av RA-rollatorn/gåbordet så att du inte skadar dig när den har varit utsatt för extremt höga eller låga temperaturer.
- Förvara inte RA-rollatorn/gåbordet utomhus.
- Spara bruksanvisningen för framtida användning.

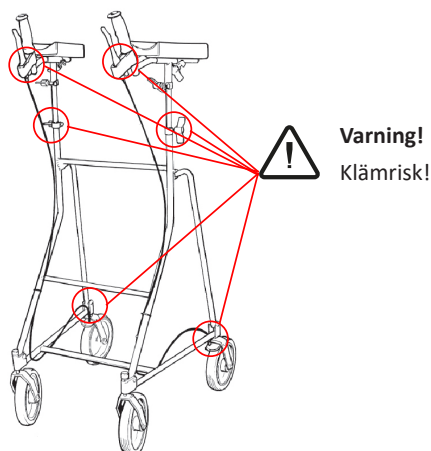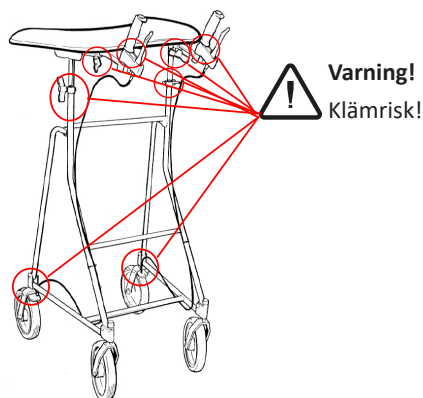

Parkeringsbroms


Tryck bromshandtaget neråt för parkeringsläge.

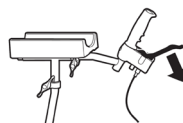

Färdbroms


Drag bromshandtaget inåt för färdbroms.

OBS! Kontinuerlig bromsning leder till onormalt slitage på hjul och broms.

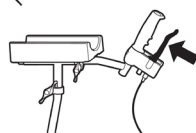

Bromsjustering

Vid dålig bromsverkan justera bromsvajern genom att skruva utåt.

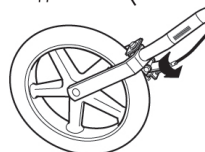

Rengöring och service

Vid rengöring rekommenderas vatten och mildt rengöringsmedel. Maskintvätt 60°C i 10 min kan användas, torkning max 70°C i 10 min, observera efterbehandlingskraven. Undvik att spola med tryck mot lager (hjul, framgafflar).



OBS!

Använd inte lacknafta, bensin eller andra lösningsmedel.



Viktigt!

Vid byte av delar på rollatorn ska endast originaldelar användas för att CE-märkningen ska gälla.



Viktigt!

Egna ingrepp/ändringar på rollatorn är inte tillåtet.



Viktigt!

Utför regelbunden översyn av rollatorn för att den ska fungera tryggt och säkert för brukaren.

Översyn bör genomföras regelbundet enligt rekonditioneringsanvisning:

Staffan GB, art. nr.: 99217

Staffan RA, art. nr.: 99218

För mer information om service, rekonditionering, reservdelar och tillbehör, se Human Cares hemsida: www.humancaregroup.com eller kontakta oss via adress, telefonnummer eller e-mailadress enligt sista sidan.

Garanti

Human Care HC AB:s garanti omfattar material- och tillverkningsfel på gånghjälpmedlet. Förslitning på hjul, bromsdelar och handtag omfattas ej. Ytbehandlingsskador uppkomna efter leverans omfattas ej. Garantin förutsätter att produkten har använts på avsett sätt samt att den rekonditionerats regelbundet och enligt vår rekonditioneringsanvisning. Produktens IDnr måste också gå att identifiera. Produkten får ej heller ha modifierats eller specialanpassats av annan än Human Care HC AB. Garantitiden är 1 år eller enligt avtal.

Vid reklamation, kontakta oss för instruktioner om åtgärd.

Följande uppgifter skall anges vid reklamation: Produktens ID-nummer, datum för senaste rekonditionering, kontaktperson hos avsändare och felbeskrivning.