



- Monteringsanvisning RA överdel för Carl-Oskar RA och Rebel RA
- Monteringsanvisning Pinnbult och Mutter för Carl-Oskar, Carl-Oskar RA, Carl-Oskar Gåbord, Rebel, Rebel RA, Rebel Gåbord
Art nr: 89032
- Monteringsanvisning Hjulkit för Carl-Oskar och Förstärkt Carl-Oskar Carl-Oskar RA och Carl-Oskar Gåbord. Art nr: 89010 / 89089
- Monteringsanvisning Framgaffelkit för Carl-Oskar, Förstärkt Carl-Oskar, Carl-Oskar RA & Carl-Oskar Gåbord. Art nr: 89085
- Monteringsanvisning Vajer och vajerhölje för: Carl-Oskar rollatorer, C-O RA, C-O GB / Rebel rollatorer, Rebel RA, Rebel GB / Parade rollator / Staffan GB, Staffan RA / Svea GB






#	Artiklar	Antal	Artikelnummer
1	RA Handtag (handtagsrör)	1	20-064
2	Handbroms komplett	1	10650
3	Handtag RA	1	00020
4	RA dyna	1	20-054
5	RA dynfäste komplett höger (inklusive RA dyna)	1	100-002H
6	RA dynfäste komplett vänster (inklusive RA dyna)	1	100-002V
7	Telskoprör (C-O och Rebel RA 67 RA Låg)	1	20-010K
7	Telskoprör (C-O och Rebel 67 RA Normal)	1	20-010L
7	Telskoprör (C-O och Rebel 72 RA Låg)	1	20-011K
7	Telskoprör (C-O och Rebel 72 RA Normal)	1	20-011L

*Bild på Carl-Oskar RA men kitet fungerar även för Rebel RA



Instruktioner

1. Demontera det gamla handtaget: se instruktioner på sida 2-5
2. Montera handbroms komplett (#2) på RA Handtag (#1) se sida 2-5
3. Ta det monterade RA handtaget och stick in röret i dynfästets främre del, vilket är där vingvredet är placerat och dra åt vingvredet.
4. Montera teleskopröret (#7) på dynfästet (#5 eller #6)
5. Montera RA-handtaget på rollatorn.
6. Justera RA handtaget och vilken vinkel den får enligt manual.

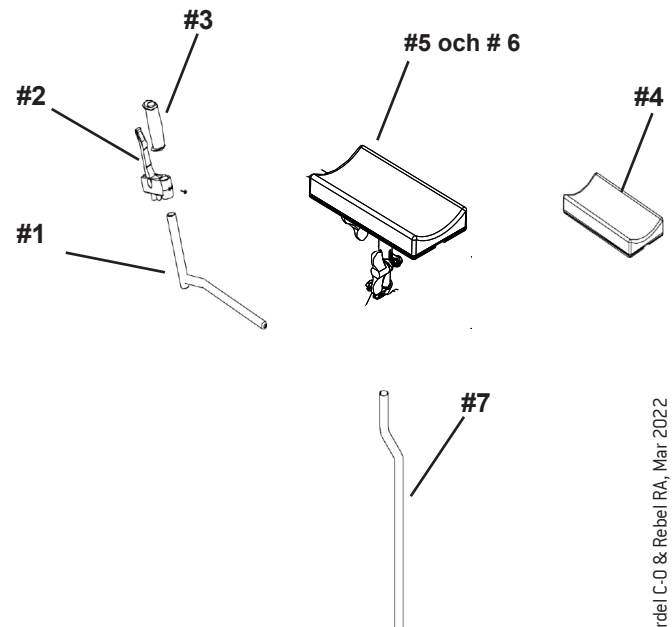



Instruktioner

Demontering av gammalt handtag:

1. Klipp av den gamla bromsvajer ovanför ändavslutningen vid bromsen vid hjulet.



2. Släpp på vajerlåset så att vjern blir lös.




3. Ta bort hylsan (#2)



4. Dra ut vjern ur vajerhöljet




5. Ta nu bort det gamla handtagsröret

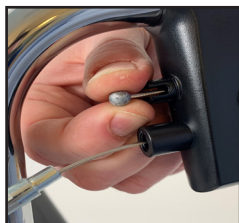

Montering av det nya handtagskitet:

1. Montera på hållaren handbroms komplett (#2) på RA Handtag (#1). Observera skillnaden på montering av **vänster eller höger hållare bromshandtag***

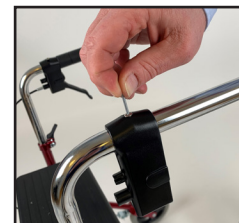

4. Stick in Popnit till bromshandtag i förborrat hål



5. Använd en popnitstång för att nita fast popniten





*Bild på Carl-Oskar

6. För in vajern in i det övre hålet på hanbroms komplett g (#2) tills ändkulan fastnar.




7. För vajern runt spåret i brickan och för sen in i bromshandtag. Lås fast brickan med sprint



8. Vajern förs igenom handtagshållarens nedre hål, för sedan in bromshandtaget in i hållare bromshandtag.



9. Dra igenom vajern genom vajerhöljet.


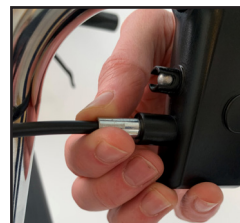


10. Tryck fast änden på vajerhöljet i i hållare bromshandtag.



11. Fäst hylsan.

12. Trä på fjädern på vajerns nedre del och för sedan igenom vajern genom bromsen och dra åt vajerlåset med insektnyckel 5 mm.

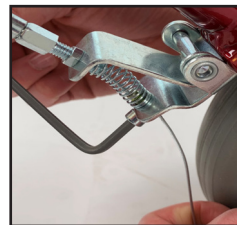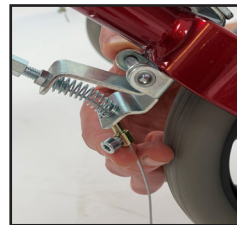

13. Justera vajern så att bromsfunktionen fungerar tillfredställande och dra åt låsmuttern med hjälp av skiftnyckel.




14. Trä på det nya handtag RA (#3). Påförandet underlättas om man fuktar insidan på handtaget med T-sprit. Handflatsstödet skall riktas innåt mot brukaren.





*Bild på Carl-Oskar men även relevant för Carl-Oskar RA och
Gåbord, samt Rebel, Rebel RA och Gåbord.


#	Innehåll	Antal
1	Hjulmutter	1
2	Pinnbult	1

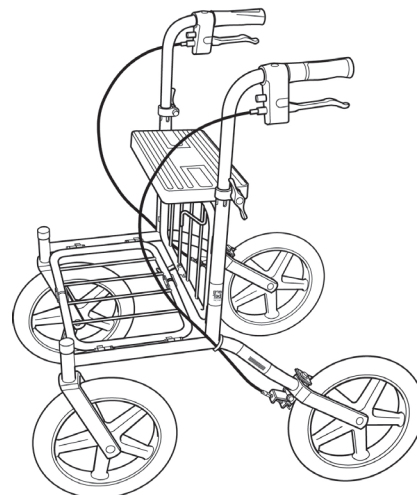

Instruktioner

1. Placera hjulet innuti gaffeln
2. Stick in pinnbulten (#2) genom gaffelhål och hjulhå
3. Skruva på hjulmuttern (#1) används två stycken insexnycklar 5 mm för att spänna åt bult och mutter

Pinnbult och hjulmutter måste bytas vid demontering av gaffeln.

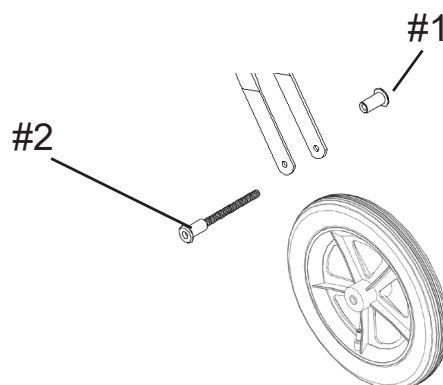




Kit för Carl-Oskar, Carl-Oskar RA & Carl-Oskar Gåbord

#	Hjulkit innehåll 89010	Antal
1	Komplett hjul	1
2	Hjulmutter	1
3	Pinnbult	1

*Bild på Carl-Oskar men även relevant för Förstärkt Carl-Oskar,
Carl-Oskar RA & Carl-Oskar Gåbord

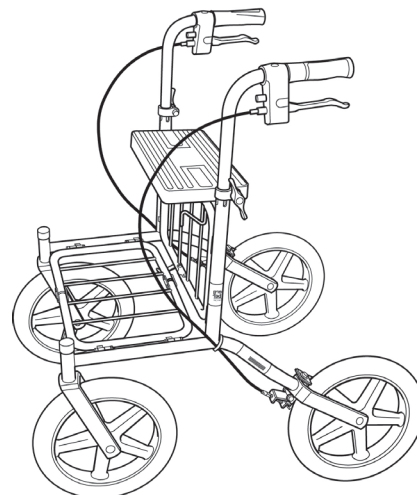


Kit för Förstärkt Carl-Oskar

#	Hjulkit innehåll 89089	Antal
1	Komplett hjul	1
2	Hjulmutter	1
3	Pinnbult	1

Instruktioner

1. Placera hjulet (#1) innuti gaffeln
2. Stick in pinnbulten (#3) genom gaffelhål och hjulhå
3. Skruva på hjulmuttern (#2) används två stycken insexnycklar 5 mm för att spänna åt bult och mutter

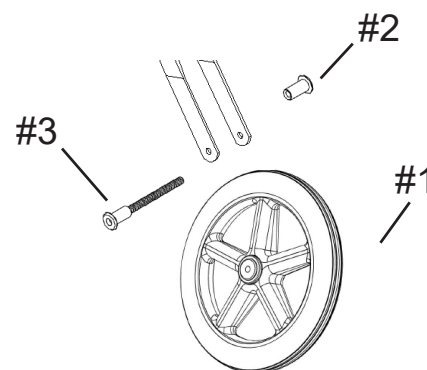

Pinnbult och hjulmutter måste bytas vid demontering av gaffeln.

INFO: Pinnbult till förstärkt Carl-Oskar är något längre än för standard Carl-Oskar.



Kit för samtliga ovannämnda Carl-Oskar modeller



*Bild på Carl-Oskar men även relevant för Förstärkt Carl-Oskar,
Carl-Oskar RA & Carl-Oskar Gåbord

#	Framgaffelkit innehåll	Antal
1	Framgaffel	1
2	Hjulmutter	1
3	Pinnbult	1
4	Kullager	2
5	Låsmutter	1
6	Täckhatt	1

Instruktioner

1. Sätt på ett kullager (#4) på framgaffeln (#1)
2. För in framgaffeln i ramen
3. Sätt på det övre kullagret (#4)
4. Montera på låsmuttern och dra åt med 19 mm fast nyckel(#5)
5. Montera på täckhatten (#6)
7. Montera hjulet med hjälp av den nya pinnbulten (#3) och hjulmuttern (#2) dra åt med med 5 mm insexnyckel

Pinnbult och hjulmutter måste bytas vid demontering av gaffeln.

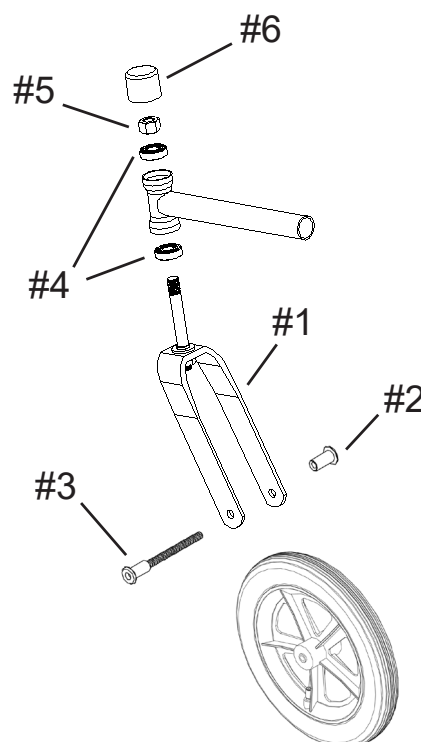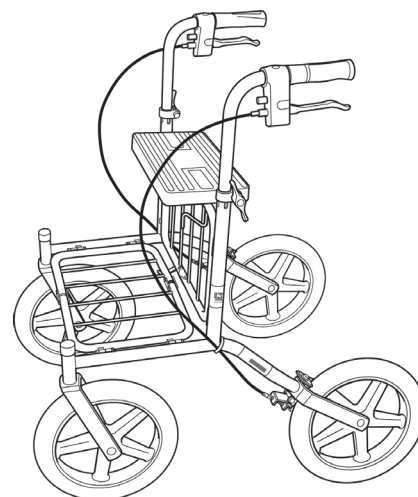



Vajrar

Model	Vajrar	Artikelnummer
Carl-Oskar		
Alla Carl-Oskar rollatorer	Vajer + Hölje	89050
Alla Carl-Oskar RA och GB	Vajer	00005
Carl-Oskar RA och GB låg	Hölje	00011
Carl-Oskar RA och GB normal	Hölje	00012
Rebel		
Alla Rebel rollatorer	Vajer + Hölje	89050
Alla Rebel RA och GB	Vajer	00005
Rebel RA och GB låg	Hölje	00011
Rebel RA och GB normal	Hölje	00012
Parade	Vajer + Hölje	89050
Staffan		
Staffan GB låg	Vajer	00005
Staffan GB hög	Vajer	00003
Staffan GB låg	Hölje	00013
Staffan GB hög	Hölje	00014
Staffan RA låg	Vajer + Hölje	89100
Staffan RA hög	Vajer + Hölje	89105
Svea		
Alla Svea GB	Vajer	00005
Svea 59 och 68 låg	Hölje	00011
Svea 59	Hölje	00012
Svea 68	Hölje	00013



Demontering av gammalt handtag:


1. Klipp av den gamla bromsvajern ovanför ändavslutningen vid bromsen vid hjulet.



2. Släpp på vajerlåset med hjälp av insexnyckel 5 mm, så att vajern blir lös. Spara fjäder.




3. Lossa hylsan, spara den till senare.

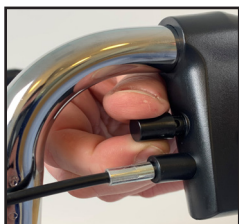

4. Dra ut den gamla vajern ur det gamla vajerhöljet.



6. För in den nya vajern i det övre hålet på hållare bromshandtag tills ändkulan fastnar.

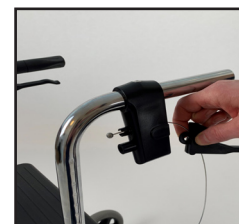


7. För den nya vajern runt spåret i brickan och för sen in bromshandtag. Lås fast brickan med sprint.



8. Den nya vajern förs igenom handtagshållarens nedre hål, för sedan in bromshandtaget in i bromshandtagshållaren.



9. Skruva bort det gamla vajerhöljet genom att lossa på låsmuttern med skiftnyckel eller fast nyckel.

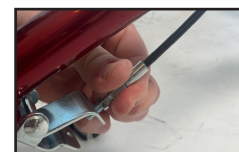


10. Skruva upp gängan vid vajerhöljets ände vid bromsen.



11. Klipp bort buntbandet som håller fast vajerhöljet vid rollatorns ram.



12. Ta det nya vajerhöljet och skruva fast det på bromsen med hjälp av skiftnyckel eller fast nyckel. Lås med låsmutter.

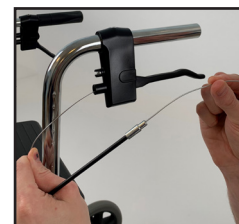

13. Ta ett nytt buntband och lås fast det nya vajerhöljet på samma plats på rollatorns ram.

14. Dra igenom vajern genom vajerhöljet.





15. Tryck fast änden på vajerhöljet i bromshandtagshållaren.



16. Fäst hylsan som du sparade.



17. Trä på fjädern som du sparade på vajerns nedre del och för sedan igenom vajern genom bromsen och dra åt vajerlåset med insexnyckel 5 mm.

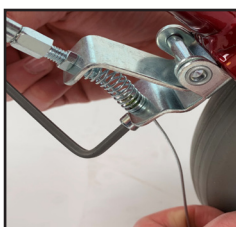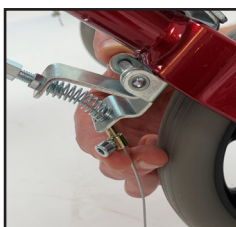

18. Justera vajern så att bromsfunktionen fungerar tillfredställande och dra åt låsmuttern med hjälp av skiftnyckel.



19. Om vajern är för lång - klipp den till lagom längd. Montera därefter Ändavslutningen och kläm fast med en tång.