




- Monteringsanvisning Bromskit för Carl-Oskar / Rebel / Svea Gåbord. Art nr: 89095
- Monteringsanvisning Vingvredskit för Carl-Oskar, Rebel & Parade, Staffan och Svea. Art nr: 50937
- Monteringsanvisning Vajer komplett för Carl-Oskar & Rebel. Art nr: 89050
- Monteringsanvisning Pinnbult och Mutter för Carl-Oskar, Carl-Oskar RA, Carl-Oskar Gåbord, Rebel, Rebel RA, Rebel Gåbord, Staffan RA / Gåbord
Art nr: 89032
- Monteringsanvisning Hjulkit för Rebel, Förstärkt Rebel, Rebel RA och Rebel GB, Staffan RA & Staffan Gåbord, Svea GB
Art nr: 89015 / 89088
- Monteringsanvisning Gaskolv för Svea Gåbord
- Monteringsanvisning Gåbordsdyna för Svea Gåbord
- Monteringsanvisning Vajer och vajerhölje för: Carl-Oskar rollatorer, C-O RA, C-O GB / Rebel rollatorer, Rebel RA, Rebel GB / Parade rollator / Staffan GB, Staffan RA / Svea GB





#	Bromskit Innehåll	Antal
1	Bromsinnerdel	1
2	Bromsytterdel	1
3	Nit till däckbroms	1
4	Slitbricka	1
5	Skruv M6x6	1
6	Bricka	1
7	Justerskruv m. kontramutter	1
8	Fjäder	1
9	Skruv M6x16	1
10	Hjulmutter	1
11	Pinnbult	1
*Sprängskiss visar inte redan ihopsatt broms-mekanism #1-#7		

*Bild på Carl-Oskar men kitet fungerar även för Rebel och Svea Gåbord

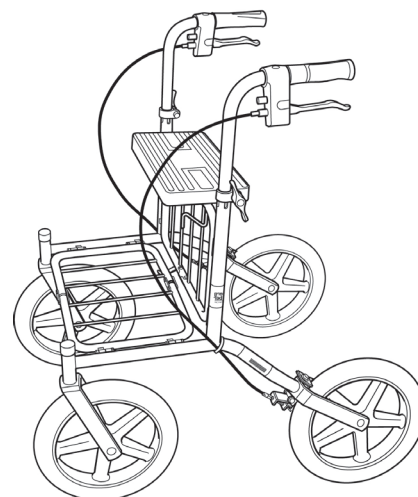



Instruktioner

INF0: #2, #1, #3, #5, #6, #4 och #7 kommer redan ihopsatta.

1. Montera bort hjulet
2. Kasta den gamla pinnbulten och hjulmuttern
3. Skruva bort den gamla bromsen och lösgör bromsvajern
4. Montera på den ihopsatta bromsmekanismen med skruv M6x16 (#9)
5. Återmontera bromsvajern. Om den gamla fjädern är skadad - använd den nya fjädern i kitet (#8)
6. Återmontera hjulet, använd den nya pinbulten och hjulmuttern
7. Justera så att bromsverkan är god genom åtskruvning med justerskruv m. kontramutter (#7)

OBS!

- Pinnbult och hjulmutter måste bytas vid demontering av gaffeln.
- Separat hjulmutter och pinnbult för Carl-Oskar förstärkt / Carl-Oskar förstärkt med luftpumpade hjul / Förstärkt Rebel. Använd istället kit med artikelnummer: 89091.

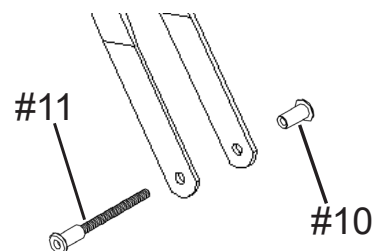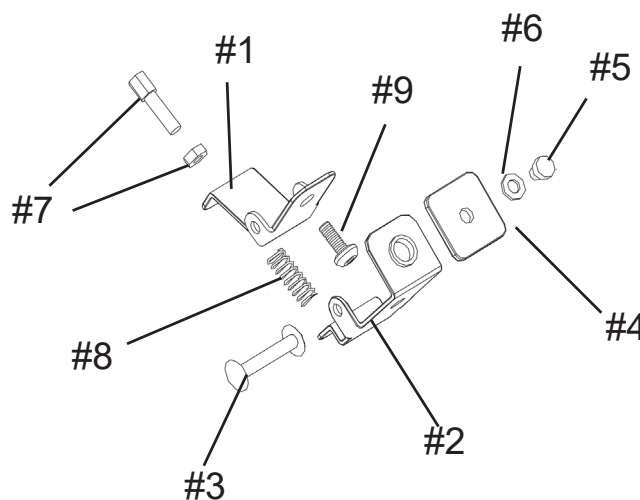


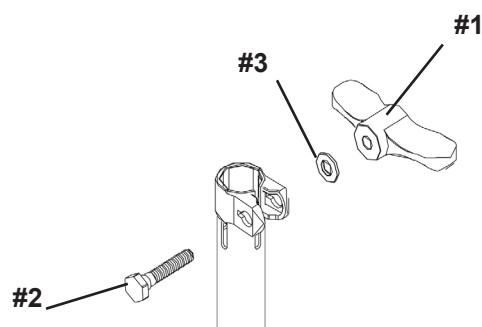


*Bild på Carl-Oskar men kitet fungerar även för Rebel och Parade, Staffan och Svea

#	Vingvredskit Innehåll	Antal
1	Vingvred	1
2	Skruv	1
3	Bricka	1

Instruktioner

1. Skruva loss det gamla vingvredet
2. Ta bort den gamla brickan och den gamla skruven
3. Ta den nya skruven (#2) och brickan (#3) och sätt på plats, den lilla klacken på skruven skall in i spåret
4. Vrid fast det nya vingredet (#1) med handtaget i rätt höjd

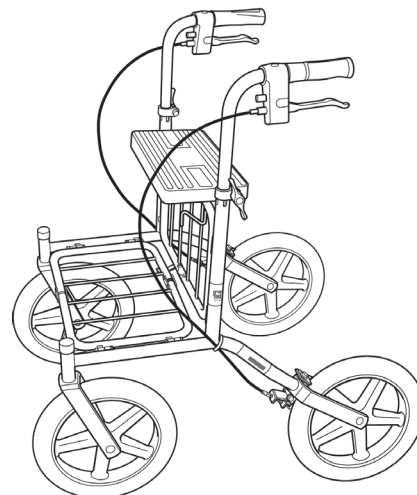




Instruktioner


#	Vajer komplett	Antal
1	Hölje	1
2	Vajer	1
3	Vajerlås	1
4	Ändavslutning	1

Demontering av gammalt handtag:

1. Klipp av den gamla bromsvajern ovanför ändavslutningen vid bromsen vid hjulet.

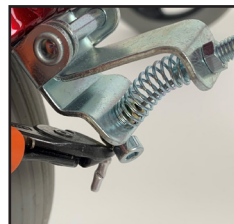



2. Släpp på vajerlåset så att vajern blir lös. Spara fjäder.

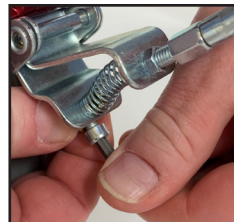

3. Lossa hylsan, spara den till senare.




4. Dra ut den gamla vajern ur det gamla vajerhöljet.

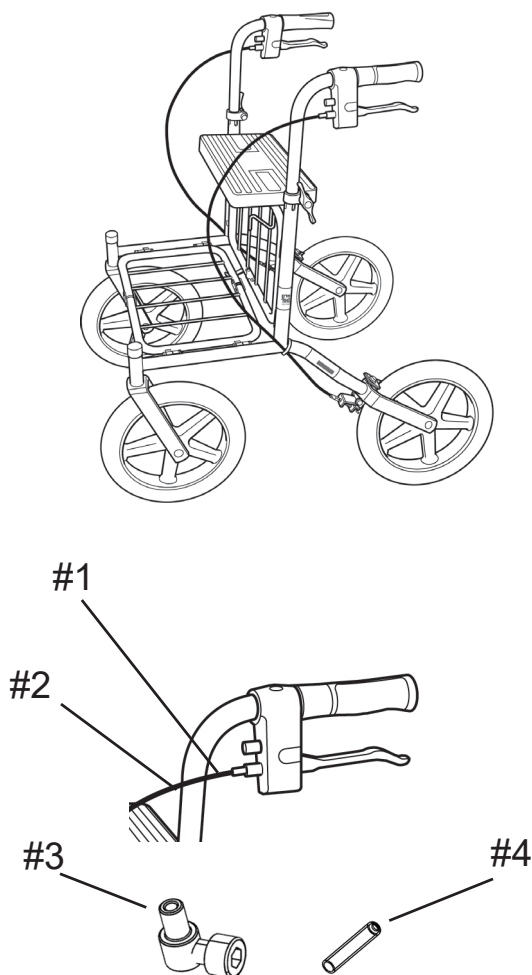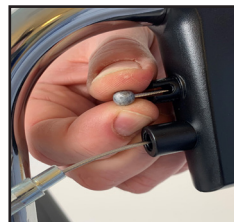



Instruktioner

6. För in den nya vjern i det övre hålet på hållare bromshandtag tills ändkulan fastnar.

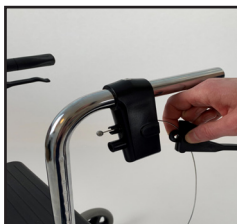


7. För den nya vjern (#2) runt spåret i brickan och för sen in bromshandtag. Lås fast brickan med sprint



8. Den nya vjern (#2) förs igenom handtagshållarens nedre hål, för sedan in bromshandtaget in i bromshandtagshållaren.



9. Skruva bort det gamla vajerhöljet genom att lossa på låsmuttern

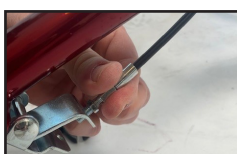


10. Skruva upp gängan vid vajerhöljets ände vid bromsen.



11. Klipp bort buntbandet som håller fast vajerhöljet vid rollatorns ram.



12. Ta det nya vajerhöljet (#1) och skruva fast det på bromsen. Lås med låsmutter.

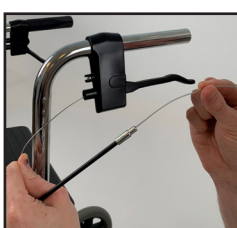

13. Ta ett nytt buntband och lås fast det nya vajerhöljet på samma plats på rollatorns ram.

14. Dra igenom vjern (#2) genom vajerhöljet (#1).

Instruktioner


15. Tryck fast änden på vajerhöljet (#1) i bromshandtagshållaren.




16. Fäst hylsan som du sparade.



17. Trä på fjädern som du sparade på vjerns nedre del och för sedan igenom vjern genom bromsen och dra åt vajerlåset (#3) med insexnyckel 5 mm.

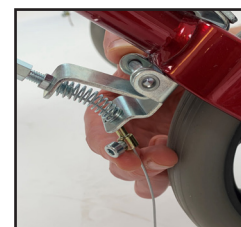

18. Justera vjern så att bromsfunktionen fungerar tillfredställande och dra åt låsmuttern med hjälp av skiftnyckel.

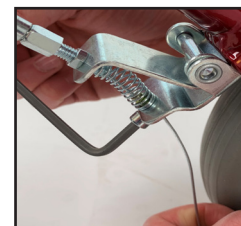


19. Om vjern är för lång - klipp den till lagom längd. Montera därefter Ändavslutningen (#4) och kläm fast med en tång.





*Bild på Carl-Oskar men även relevant för Carl-Oskar RA och GB, samt Rebel, Rebel RA / GB, Staffan RA / GB


#	Innehåll	Antal
1	Hjulmutter	1
2	Pinnbult	1

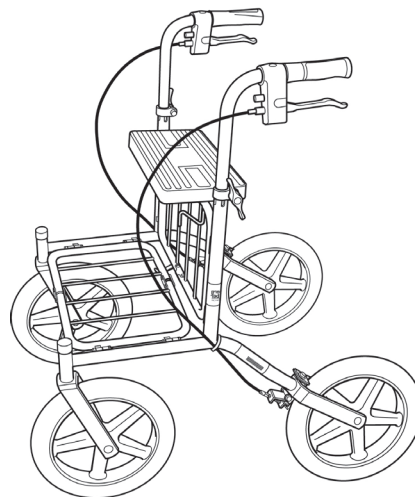

Instruktioner

1. Placera hjulet innuti gaffeln
2. Stick in pinnbulten (#2) genom gaffelhål och hjulhå
3. Skruva på hjulmuttern (#1) används två stycken insexnycklar 5 mm för att spänna åt bult och mutter

Pinnbult och hjulmutter måste bytas vid demontering av gaffeln.

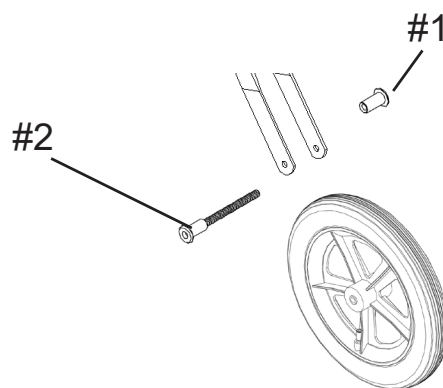




Kit för Rebel, Staffan RA och Staffan Gåbord

#	Hjulkit innehåll 89015	Antal
1	Komplett hjul	1
2	Hjulmutter	1
3	Pinnbult	1

*Bild på Rebel men även relevant för Förstärkt Rebel, Staffan RA och Staffan Gåbord.

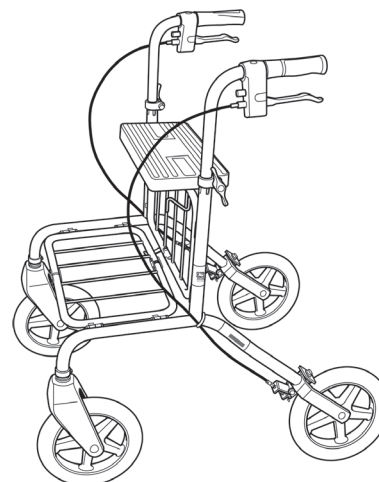


Kit för Förstärkt Rebel

#	Hjulkit innehåll 89088	Antal
1	Komplett hjul	1
2	Hjulmutter	1
3	Pinnbult	1

Instruktioner

1. Placera hjulet (#1) innuti gaffeln
2. Stick in pinnbulten (#3) genom gaffelhål och hjulhå
3. Skruva på hjulmuttern (#2) används två stycken insexnycklar 5 mm för att spänna åt bult och mutter

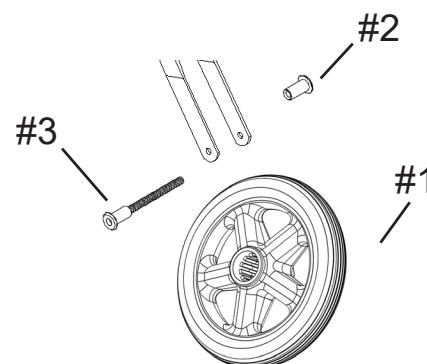

Pinnbult och hjulmutter måste bytas vid demontering av gaffeln.

INFO: Pinnbult till förstärkt Rebel är något längre än för standard Rebel.




#	Artiklar	Antal	Artikelnummer
1	Gaskolv	1	50552


*Bild på Svea Gåbord

Instruktioner

Instruktioner på nästa sida.

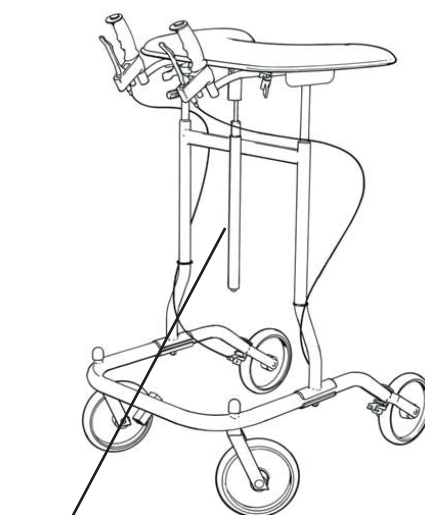

#1

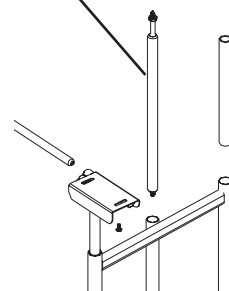

Demontering samt montering Gåbord


1. Lossa på gåbordets vingvred så att handtagen går att dra ut. Dra sedan ut handtagen ur rollatorramen.



2. Skruva loss bordet från rollatorramen underifrån med insexnyckel 5 mm, spara skruvarna. Nu bör de två teleskoprören sjunka ner i rollatorramen.



3. Skruva loss gåbordet från det T-formade dynfästet med insexnyckel 5 mm, spara skruvarna. Ta bort gåbordet, nu består bara gaskolven.

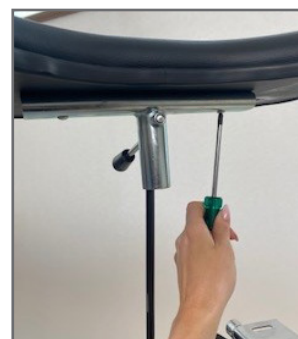


Demontering samt montering Gaskolv

1. Skruva loss det T-formade dynfästet från den gamla gaskolven genom att rotera det T-formade dynfästet samtidigt som du håller gaskolven på plats.



2. Lossa den nedre låsmuttern från gaskolven med en fast nyckel 17 mm.

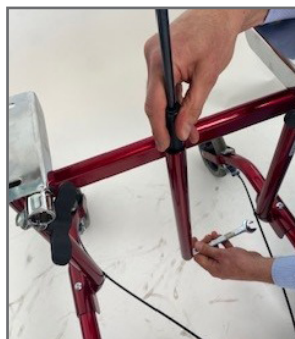

3. Ta loss den gamla gaskolven och montera den nya gaskolven på motsvarande sätt.




4. På den nya gaskolven (#1) finns det en mutter redan monterad. Gänga ner den på gaskolven till det lägsta läget.



5. Gänga på det T-formade dynfästet på den nya gaskolven och justera till det optimala läget: 1) spaken är ej lös 2) höj- och sänkfunktionen fungerar. Justera genom att rotera det T-formade dynfästet mot eller medsols tills du hittar rätt läge.

OBS!

Utför test innan montering av gåbordet så att den hydrauliska funktionen fungerar: det T-formade dynfästet skall åka ner till lägsta läge utan att sen åka upp igen av sig själv.

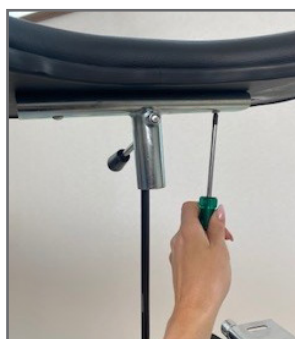


6. Montera sen tillbaka gåbordsdynan med de sparade skruvarna. Skruva först fast det T-formade dynfästet, skruva sedan fast dynan i de två dynfästena.



#	Artiklar	Antal	Artikelnummer
1	Gåbordsdyna 59cm, ink 4 dynskruvar	1	20-053
2	Gåbordsdyna 63 cm, ink 4 dynskruvar	1	20-086

*Bild på Svea Gåbord

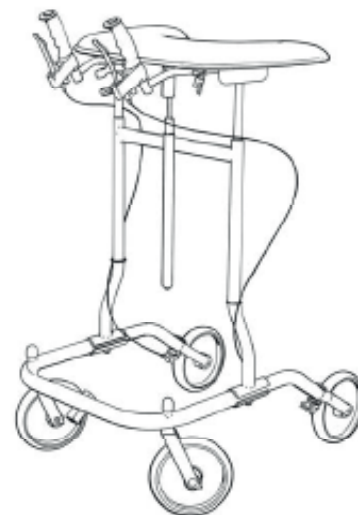

Instruktioner

1. Demontera den gamla Gåbordsdynan genom att skruva loss skruvarna på undersidan av gåbordsdynan.
2. Montera den nya Gåbordsdynan (#1) med de medföljande dynskruvarna i de gängade hålen på undersidan av Gåbordsdynan (#1)

#1 / #2






Vajrar

Model	Vajrar	Artikelnummer
Carl-Oskar		
Alla Carl-Oskar rollatorer	Vajer + Hölje	89050
Alla Carl-Oskar RA och GB	Vajer	00005
Carl-Oskar RA och GB låg	Hölje	00011
Carl-Oskar RA och GB normal	Hölje	00012
Rebel		
Alla Rebel rollatorer	Vajer + Hölje	89050
Alla Rebel RA och GB	Vajer	00005
Rebel RA och GB låg	Hölje	00011
Rebel RA och GB normal	Hölje	00012
Parade	Vajer + Hölje	89050
Staffan		
Staffan GB låg	Vajer	00005
Staffan GB hög	Vajer	00003
Staffan GB låg	Hölje	00013
Staffan GB hög	Hölje	00014
Staffan RA låg	Vajer + Hölje	89100
Staffan RA hög	Vajer + Hölje	89105
Svea		
Alla Svea GB	Vajer	00005
Svea 59 och 68 låg	Hölje	00011
Svea 59	Hölje	00012
Svea 68	Hölje	00013




Demontering av gammalt handtag:


1. Klipp av den gamla bromsvajern ovanför ändavslutningen vid bromsen vid hjulet.

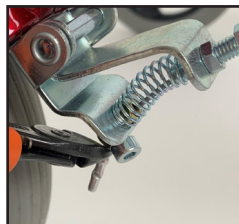

2. Släpp på vajerlåset med hjälp av insexnyckel 5 mm, så att vajern blir lös. Spara fjäder.

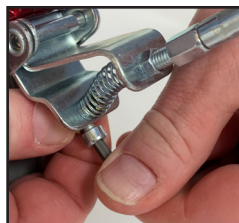


3. Lossa hylsan, spara den till senare.

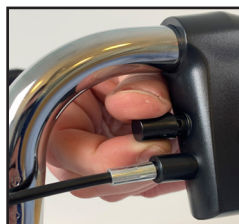

4. Dra ut den gamla vajern ur det gamla vajerhöljet.



6. För in den nya vajern i det övre hålet på hållare bromshandtag tills ändkulan fastnar.

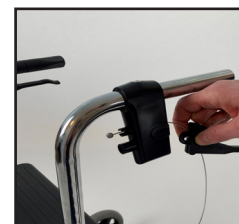


7. För den nya vajern runt spåret i brickan och för sen in bromshandtag. Lås fast brickan med sprint.



8. Den nya vajern förs igenom handtagshållarens nedre hål, för sedan in bromshandtaget in i bromshandtagshållaren.



9. Skruva bort det gamla vajerhöljet genom att lossa på låsmuttern med skiftnyckel eller fast nyckel.

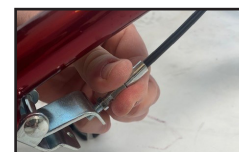


10. Skruva upp gängan vid vajerhöljets ände vid bromsen.



11. Klipp bort buntbandet som håller fast vajerhöljet vid rollatorns ram.



12. Ta det nya vajerhöljet och skruva fast det på bromsen med hjälp av skiftnyckel eller fast nyckel. Lås med låsmutter.

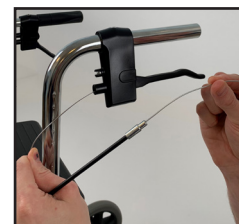

13. Ta ett nytt buntband och lås fast det nya vajerhöljet på samma plats på rollatorns ram.

14. Dra igenom vajern genom vajerhöljet.





15. Tryck fast änden på vajerhöljet i bromshandtagshållaren.



16. Fäst hylsan som du sparade.



17. Trä på fjädern som du sparade på vajerns nedre del och för sedan igenom vajern genom bromsen och dra åt vajerlåset med insexnyckel 5 mm.

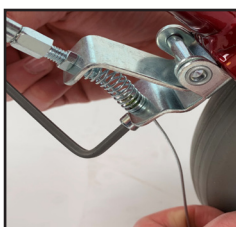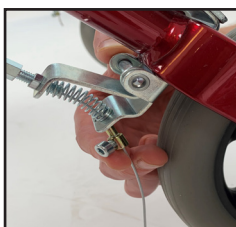

18. Justera vajern så att bromsfunktionen fungerar tillfredställande och dra åt låsmuttern med hjälp av skiftnyckel.



19. Om vajern är för lång - klipp den till lagom längd. Montera därefter Ändavslutningen och kläm fast med en tång.