



Bekväm

Smal design

Nackstöd



Human Care's höga skalsele Silhouette Sling är en bekväm sele utan förstärkningar, handtag eller vaddering. Selen anpassar sig till patienten och ger bra stöd för hela kroppen. kalselen kan användas i de flesta lyftsituationer, men är speciellt lämplig för överföring till rullstolar med formgjutna sitsar och sittskal.



Två materialval

Skalselen finns i två materialval – Polyester Nät och Soft Air Mesh. Soft Air Mesh och Polyester Nät tillåter fukt och värme att effektivt transporteras bort från användaren, vilket gör att lyftselen kan lämnas med användaren under en kort tid efter att förflyttningen är klar. Vid vistelse i till exempel badmiljöer, är Polyester Nät ett utmärkt val, eftersom det är ett luftigt material, som torkar snabbt.


med en 2-punkts, 3-punkts eller 4-punkts upphängning och är lämplig för patienter med dålig bålstabilitet. Silhouette Sling finns i storlekar Junior Small till Extra large, alltså rymmer den en stor variation av användare.

Enkel skötsel och enkel passform

Våra selar tillverkas enligt högsta kvalitetsstandard. De har förstärkta remmar och höghållfast nylonband runt selen för att göra dem tillräckligt starka för att motstå även den mest aktiva användningen. Varje seletikett är färgkodad för att säkerställa ett snabbt och enkelt val av rätt lyftsele och remmarna är färgkodade för enkel bestämning av önskad positionering.

Smalt övergripande bredd

Silhouette Sling (skalsele) har en smal totalbredd vilket gör den till ett idealiskt alternativ för användare som är mindre i storlek. Silhouette Sling kan användas för de flesta lyftsituationer

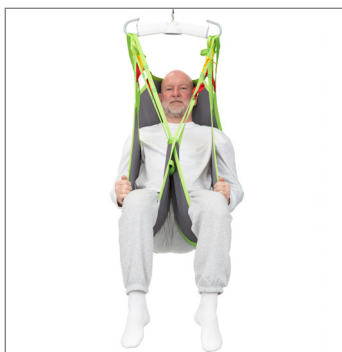

Gånghjälpmedel



Vårdsäng



Lyftlösningar



Hygienprodukter



Transportstol

Tillbehör



Extension Loops

Används för att förlänga lyftbyglarna för att kunna anpassa lyftposition eller för att hålla ihop bendelar. Olika längder. NR.:21180-*



Benpolstring och benstöd

Utmärkt för användare med känslig hud eller som har smärta. Benpolstring, art nr. 21146-S, M och L. Förstyvade



Bygelpolstring

Det polstrade fodralet skyddar användaren från sammanstötningar med lyftbygeln. Ska inte användas våta miljöer. Art. nr. 50866



Lyftbyglar för

4-punktsupphängning Art. nr. 55619 Lyftbygel till 4-punktsupphängning i portabel lyft. Art. nr. 70800 4-punktsbygel till stationär lyft.

Lyftsituationer




Till och från sängen

Lämplig för förflyttningar och ompositionering till och från sängen.



Till och från rullstolen


Lämplig för förflyttningar och ompositionering till och från rullstolen.

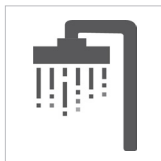

Duschning

Använd enbart Polyester Nät vid.

Skötsel och angivningar

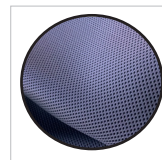

Soft Air Mesh

Lätt, svalt och ventilerande material. fungerar väl med kunder med känslig hud.



Polyester nät

Hållbar, låg friktion, lätt att rengöra, applicera och ta bort




Skötsel

Skötselinstruktioner lokerade på etikett. Använd som sjukhus gradsvätt.

Tekniska specifikationer

Artikelnummer					A	B	C
Polyester Net	Polyester Net Padded Legs	Soft Air Mesh	Storlek	Färg			
25015-JS	25018-JS	25019-JS	Junior Small	JS	18 cm / 7,1"	62 cm / 24,4"	64 cm / 25,2"
25015-JM	25018-JM	25019-JM	Junior Medium	JM	22 cm / 8,7"	67 cm / 26,4"	71 cm / 28"
25015-S	25018-S	25019-S	Small	S	26 cm / 10,2"	77 cm / 30,3"	79 cm / 31,1"
25015-M	25018-M	25019-M	Medium	M	29 cm / 11,4"	87 cm / 34,2"	90 cm / 35,4"
25015-L	25018-L	25019-L	Large	L	35 cm / 13,8"	93 cm / 36,6"	96 cm / 37,8"
25015-XL	25018-XL	25019-XL	Extra Large	XL	40 cm / 15,8"	97 cm / 38,2"	106 cm / 41,8"
Maximal användarvikt					300kg / 660lb		

* Tillgängliga i följande längder: 10cm/3.9" (21180-10), 15cm/5.9" (21180-15), 20cm/7.8" (21180-20), 25cm/9.8" (21180-25), 35cm/13.7" (21180-35)

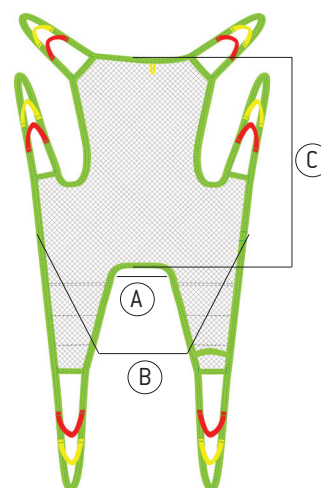

99020 Rev 5, SE, Product Sheet, Silhouette Sling, Jan 26



Vi förbättrar rörelsefriheten
och kvalitetsomhändertagande av människor

www.humancaregroup.com



HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
+46 8 665 35 00
info@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road
ON K2E 7K1 Ottawa
+1 613 723 6734
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE THE NETHERLANDS

Elsperweg 124
8076 PA Vierhouten
+31 577 41 21 71
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES

8006 Cameron rd, Suite K
TX 78754 Austin
+1 512 76 7199
info.us@humancaregroup.com