


Amputee Sling

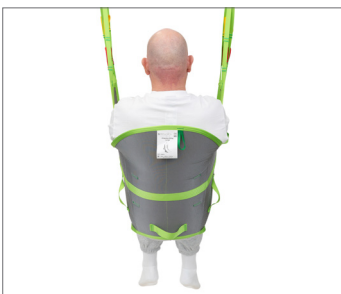

Amputee Sling är designad för trygg och säker förflyttning av patienter med dubbelsidig och enkelsidig benamputation. Den är också ett bra val för patienter med höftproblem eller som löper risk att glida ur en lyftsele med större öppning.

Tillbakalutat läge

Selen är tillverkad i polyestertyg som gör appliceringen snabb och enkel. Modellen med polyestertyg har låg förstärkt rygg och delade benstöd. Det tillbakalutade läget hjälper till att förhindra att patienten glider ut ur selen. Amputee Sling finns i Polyester och Polyester Nät. Vid vistelse i badmiljöer, är Polyester Nät ett utmärkt val. Polyester Nät saknar förstärkning i ryggen och är i ett luftigt nätmaterial. Den torkar snabbt. Amputee Sling kan med fördel användas med Human Cares midjebälte för extra stabilitet. Midjebältet finns tillgängligt som tillbehör i flera storlekar, utrustade med kardborreband eller spänne.

Funktioner

Amputee Sling kan användas med bendelarna korsade i 2- eller 3-punktsupphängning eller med bendelarna omlott i en 2-punktsbygel. Något som gör att de kan anpassas till flera olika behov.

Användarvänliga detaljer

Våra selar tillverkas enligt den högsta kvalitetsstandarden. De har förstärkta remmar och vävda nylonband med hög hållfasthet runt selen, för att göra dem tillräckligt robusta, för att motstå även den mest aktiva användningen. Etiketten på selen är färgkodad, för att säkerställa ett snabbt och enkelt val av rätt storlek på selen. Remmarna har färgkodade öglor, för att enkelt hitta fram till önskad positionering.



Gånghjälpmedel



Vårdsängar



Lyftlösningar



Hygienprodukter



Transportselar

Tillbehör



Förlängningsband

Används för att förlänga lyftbanden och alternera lyftläge samt att hålla ihop bendelarna. Flera längder. Art. nr. 21180.*



Benpolstring och benstöd

Utmärkt för användare med känslig hud eller som har smärta. Benpolstring, art nr. 21146-S, M och L. Förstuvade benstöd, art. nr. 25102.



Bygelpolstring

Det polstrade fodralet skyddar användaren från sammanstötningar med lyftbygeln. Ska inte användas i våta miljöer. Art. nr. 50866



Midjebälte

Stäng med kardborre-band (Art. nr 25145-**) eller spänne (Art. nr. 25146-***). Finns i junior- och vuxenstorlek.

Lyftsituationer



Till och från sängen

Lämplig för förflyttningar och ompositionering till och från sängen.



Till och från rullstolen

Lämplig för förflyttningar och ompositionering till och från rullstolen.



Till och från golvet


Kan placeras över en patient i ryggläge för överföringar och lyft med en taklyft.



Använd vid hygienbesök


Polyester nät fungerar bäst vid hygienbesök. Även polyestermodellen fungerar.

Skötsel och instruktioner

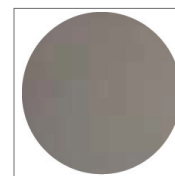


Polyester

Mjukt, tunt material som andas och torkar snabbt. Idealisk för bad eller duschning.

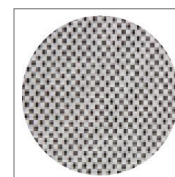

Polyester Nät

Hållbar, låg friktion, lätt att rengöra, applicera och ta bort

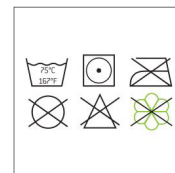


Skötsel


Skötselinstruktioner finns på selens etikett. Använd en tvättpåse godkänd för sjukhustvätt.



Tekniska specifikationer

Art. nr.	Storlek		Färg	A	B	C
Polyester	Polyester Nät					
25040-JM	25140-JM	Junior Medium	JM	19cm	61cm	55cm
25040-S	25140-S	Small	S	26cm	72cm	57cm
25040-M	25140-M	Medium	M	36cm	78cm	59cm
25040-L	25140-L	Large	L	46cm	88cm	62cm
25040-XL	25140-XL	Extra Large	XL	50cm	101cm	65cm
Maximal användarvikt	300 kg					

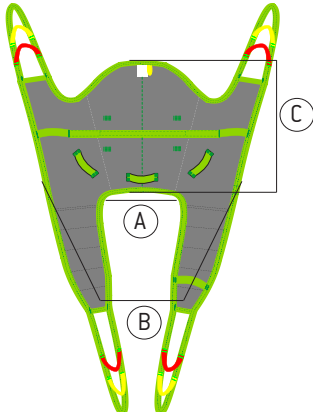

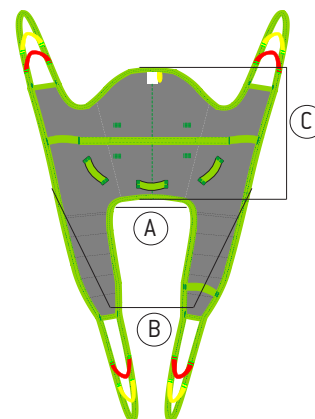

* Finns i olika längder: 10cm (21180-10), 15cm (21180-15), 20cm (21180-20), 25cm (21180-25), 35cm (21180-35)

** Juniorstorlekar: 40cm (25145-40B), 50cm (25145-50B), 60cm (25145-60B); Vuxenstorlekar: 60cm (25145-60), 70cm (25145-70), 80cm (25145-80), 90cm (25145-90), 110cm (25145-110), 120cm (25145-120)

*** Juniorstorlekar: 40cm (25146-40B), 50cm (25146-50B), 60cm/23.6" (25146-60B); Vuxenstorlekar: 60cm/(25146-60), 70cm (25146-70), 80cm (25146-80), 90cm (25146-90), 100cm (25146-100), 110cm (25146-110), 120cm (25146-120), 130 cm (25146-130).

