

# Floorline LTC



Höjd under 10cm

Optimalt val för vård-  
& äldreboenden

Lätt att fälla ihop  
och stuva undan



Vår Floorline LTC är den perfekta sänglösningen för hemsjukvård, äldreboenden och vårdhem. Den är lätt att fälla ihop och stuva undan samt att transportera. Utförandet i träfanér är ett populärt val vid hemsjukvård då den smälter väl in i heminredningen.

## Ultralåga sängar reducerar fallskador

Floorline LTC har i lägsta läge ett avstånd från golvet om 9,5 cm. Varför spelar några centimeter roll? Om avståndet bara hade varit 5 cm mer (14,5 cm), hade kraften i ett fall från sängen ökat med 50%. Skillnaden kan vara ett enkelt blåmärke jämfört med en bruten höftled. En bruten höftled kan innebära utökad sjukhusvistelse eller till och med att patienten avlider. Förutom de fysiska effekterna ger fallskador också psykologiska effekter som lägre tillit till den egna balansen och en ökad rädsla för att falla igen. Samhällets kostnader för fallolyckor bland äldre uppskattas till ungefär 14 miljarder kronor per år i Sverige. Varje förhindrad fallolycka har en enorm positiv betydelse för både individ och samhälle.

## Anpassad för äldreboenden och hemsjukvård

När vi designade Floorline LTC var det i våra användartudier tydligt att vårdhem önskade att sängen skulle vara enkel att fälla ihop och stuva undan när den inte användes. För hemsjukvård ställdes dessutom kravet att sängen skulle vara enkel att transportera. Därför har vi designat Floorline LTC så att den är lätt att fälla ihop och stuva undan. Sängen är ihopfällt läge kompakt och består inte av lösa delar. Vid hemsjukvård är den lätt att transportera.

## Säkerhet, kvalitet och användbarhet

För oss är säkerhet, kvalitet och användbarhet av största vikt. Vi strävar ständigt efter att säkerställa och förbättra högsta kvalitet hos alla våra produkter. I varje detalj, i varje aspekt, håller våra produkter vad de lovar.



Walking Aids



Healthcare Beds



Lifting Solutions




Hygiene



Convertible chairs

## Tillbehör

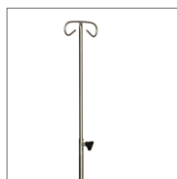

### Droppställning.

Justerbar höjd. Kan monteras på båda ändarna av sängen. Max SWL 7kg. Art.nr. IVP.



### Stöd- och vändhandtag

Designad för att hjälpa patienter på ett säkert sätt ur sängen. Ergonomisk design. Art. nr. 90702.



### Förlängningskit

Förlänger sängen med 17,5cm för längre patienter. Art. nr. 90709.



### Lyftbåge

För att hjälpa patienten att komma upp och ändra ställning. Maximum SWL 75kg. Art. nr. SHP600.



### Sänggrindar

1/4 strl, art. nr: 72794  
1/2 strl, art. nr: 72795  
3/4 strl, art. nr: 72797



### Bumper

Bumpern skyddar huvudänden av sängen, monteras på det lägre staget, mellan hjulen. Art. nr. 90705.



### Syrgashållare

Fäste för placering av syrgasflaska i C-storlek. Art.nr. 90707.

## Funktioner



### Kompakt

Enkel att fälla ihop för att stuva undan samt vid transport. Höjd: 107 cm Bredd: 100 Djup: 30



### Standardpositioner

Inkluderar autokontur, ryggstöd, knäböj, Trendelenburg, omvänd Trendelenburg, kardiak.



### Riktningsslås

Ett hjul med riktningsslås och tre med vanliga lås, ger enkel manövrerbarhet.

## Tekniska specifikationer – Floorline LTC

Floorline LTC			
Art. nr. Standard	90600	Art. nr. Träpanel	90601
Sovyta [L x B]	200cm x 90cm	Sängmått [L x B]	215cm x 90,5cm
Mått ihopfäld [L x B x D]	10cm x 30cm x 100cm	Plattformshöjd (Min-Max)	9,5cm - 70cm
Elektrisk spänning	Max. 24V DC	IP-klassning	IPX4
Matningsspänning	230V, 50Hz	Produktvikt	106kg
Max användarvikt	165kg	Säker arbetslast (SWL)	200kg
Driftsperiod	2 minuters drift, 18 minuters vila		

