



Fellow Classic

Denna rekonditioneringsanvisning gäller för rollatorn och dess tillgängliga tillbehör och reservdelar.

 För att hjälpmedlet skall fungera tryggt och säkert för brukaren bör översyn av hjälpmedlet göras en gång per år. Därför rekommenderas följande åtgärder.

☐ Rengöring & Desinfektion

Vid rengöring rekommenderas vatten och mildt rengöringsmedel. Maskintvätt 60°C i 10 min kan användas, torkning max 70°C i 10 min, observera efterbehandlingskraven. Undvik att spola med tryck mot lager (hjul, framgafflar). **OBS:** Använd inte lacknafta, bensin eller andra lösningsmedel.

Desinfektion utförs av behörig personal med lämplig skyddsutrustning och enligt desinfektionsmedelstillverkarens instruktioner. Vid rengöring använd en svamp eller mjuk trasa som inte repar produkten. Använd ett godkänt kemiskt desinfektionsmedel som innehåller 70-80% etanol. Använd ej rengöringsmedel med slipmedel, klor eller fenol. Vid frågor om desinfektion eller lämpliga desinfektionsmedel kontakta Human Care.

☐ Efterbehandling

Efter tvätt skall alla leder, trånga utrymmen samt dräneringshål blåsas torra och sprejas med tunnflytande olja. Om avfettningsmedel använts bör de rörliga delarna smörjas.

☐ Lacken

Kontrollera skador i lacken. För att förhindra korrosionsskador, bättra på repor. Bättringsfärg kan beställas från Human Care HC AB.

☐ Rörstomme

Svets och skruvförband kontrolleras. Vid större korrosion ska rollatorn bytas.



☐ Handtag

Ska sitta fast. Kontrollera att handtagsrören går att skjuta ner i chassit. Byt greppet vid behov.

☐ Bromsar

Kontrollera att både färd- och parkeringsbroms fungerar. Vajrar ska vara hela och uppklamrade.

☐ Stabilitet

Kontrollera att alla hjul står stadigt på underlaget och att det inte finns någon skevhet i chassit.

☐ CE-märkning

Kontrollera att CE-märkningen finns kvar och att den går att läsa.

☐ Vingvred

Kontrollera funktionen.

☐ Reflexer

Kontrollera att reflexerna är kvar och att de syns.

☐ Navkapslar

Kontrollera att de inte saknas.

☐ Hjul

Kontrollera att hjulen inte är slitna och att de snurrar lätt utan oljud.

☐ Täckhatt och spårriktare

Kontrollera att täckhatten och spårriktaren sitter fast. **OBS!** Spårriktaren skall bytas vid demontering (gäller rollatorer med äldre framgaffelkonstruktion).

☐ Framgafflar

Kontrollera att infästning och lager inte glappar. Kontrollera framgaffelns rotationströghet genom att låta hjulet pendla mellan klockan 3 och 9. De båda hjulen ska pendla 2-4 gånger med max 2 pendlingars differens mellan repsektive hjul. Rotationströghet går att efterjustera till önskad tröghet genom att dra åt respektive lossa låsmuttern (gäller rollatorer med ny framgaffelkonstruktion).

☐ Sittdyna

Kontrollera att dynan sitter fast och att skruvarna är åtdragna.

☐ Ihopfällningsmekanismen

Ska vara hel och låsningen ska fungera.

☐ Säkerhetsspärr

Kontrollera att säkerhetsspärren faller i läge av sin egen vikt.

☐ Provkörning

Gör en slutlig kontroll genom en provkörning.



Rekonditioneringen skall endast ske av en person som har god kännedom om hur arbetet ska utföras. En felaktig utförd rekonditionering kan resultera i en olycka/tillbud. Vid oklarheter kontakta alltid återförsäljare.

Vid demontering av hjul måste fläsmuttern bytas, då den innehåller en självlåsning som förstörs när den demonteras.

Om det har uppstått korrosion som är kraftigare än ytrost ska rollatorn tas ur bruk och lämnas för återvinning.

Rollatorn får endast användas som gångstöd samt sittstöd vid stillastående. Egna ingrepp i hjälpmedlet är inte tillåtet.

[illegible]


Reservdelslista

Nr	Benämning	Antal	Art. nr.	Övrig information
	Framgaffel och hjul			Gäller t.o.m. 201209
1	Plasthatt	2	93015075	
2	Spärryttare	2	93013012	Ska bytas vid demontering.
3	Bricka	2	00856	
4	Vågbricka	6	93012008	
5	Passbricka	4	93015026	t=0,8mm
6	Passbricka	4	93015025	t=2mm
7	Glycodurlager med fläns	12	930130013	Behöver inte smörjas.
8	Framgaffel	1+1	200.1010	Ange höger alt. vänster.
9	Hjul komplett	4	93017025	Komplett med glycodurlager.
10	Flänsmutter	2	93011008	Ska bytas vid demontering.
11	Navkapsel	2	89202	
	Framgaffel och hjul			Gäller fr.o.m. 201210
12	Plasthatt	2	89305	
13	Låsmutter	2	00888	
3	Bricka	2	00856	
4	Vågbricka	6	93012008	
5	Passbricka	4	93015026	t=0,8mm
6	Passbricka	4	93015025	t=2mm
7	Glycodurlager med fläns	12	930130013	Behöver inte smörjas.
14	Framgaffel höger	1	89310	
15	Framgaffel vänster	1	89300	
9	Hjul komplett	4	93017025	Komplett med glycodurlager.
10	Flänsmutter	2	93011008	Ska bytas vid demontering och säkras med Loctite 243.
10	Låsmutter	2	00832	På rollatorer fr.o.m. 201506
11	Navkapsel	2	89202	
	Broms			
16a	Vajer komplett med justerskruv	2	00891	För rollatorer tillverkade innan 202206
16b	Vajer komplett med justerskruv (Fellow standard, smal, bred, hög)	2	93981	För rollatorer tillverkade f.r.o.m 202206
16c	Vajer komplett med justerskruv (Fellow låg)	2	93984	För rollatorer tillverkade f.r.o.m 202206
17	Bromsfjäder	2	AL-10142	
18	Bromsbygel	2	AL-10139	
19	Mutterskydd	4	200.1005	
10	Flänsmutter	6	93011008	Ska bytas vid demontering.
	Handtag (För rollatorer tillverkade innan 202206)			
20a	Bromshandtag komplett (handtag, spak, skruvar, wire, hölje, fjäder och handtagsrör ingår).			
	Höger sida		00902	Fellow standard, smal, bred och hög
	Vänster sida		00903	Fellow standard, smal, bred och hög
	Höger sida		00904	Fellow låg
	Vänster sida		00905	Fellow låg

REKONDITIONERINGSANVISNING

Handtag (För rollatorer tillverkade f.r.o.m 202206)				
20b	Bromshandtag komplett (handtag, spak, skruvar, wire, hölje, fjäder och handtagsrör ingår).			
	Höger sida		93330	Fellow standard, smal, bred och hög
	Vänster sida		93331	Fellow standard, smal, bred och hög
	Höger sida		93332	Fellow låg
	Vänster sida		93333	Fellow låg
Vingvred				
21	Skruv	2	00071	
22	Bricka	2	000124	
23	Vingvred	2	20-052	Smörjs vid behov.
Sittdyna				
24	Sittdyna	1	93015086	
25	Plåtskruv	5	93010007	Kontrollera att skruvarna är åtdragna.

26	Låsbygel komplett	1	200.2100	Komplett med låsspärr.
27	Reflex	3	00028	
	Bättringsfärg		F4	För rollatorer före 201506
	Bättringsfärg			För rollatorer efter 201506
Handtag				
28	Grepp	2	AL-10153	
29	Skruv	8	00897	
30	Täckhatt	2	AL-10159	

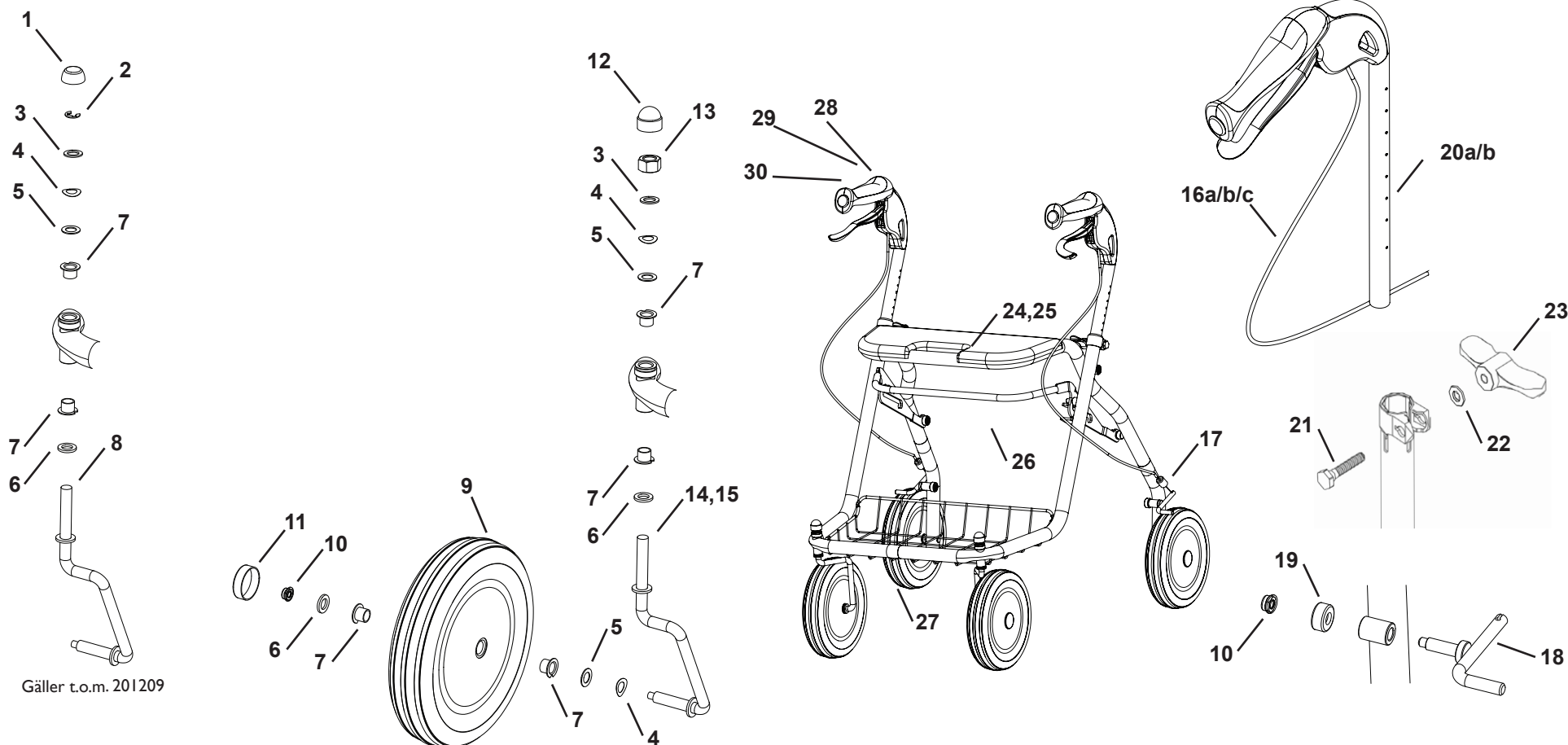

Gäller t.o.m. 201209

Gäller fr.o.m. 201210

Årstaängsvägen 21B, 117 43 Stockholm
Tel. 08 - 510 132 00
www.humancaregroup.com