

Staffan RA



För att hjälpmedlet skall fungera tryggt och säkert för brukaren bör översyn av hjälpmedlet göras en gång per år. Därför rekommenderas följande åtgärder.

Rengöring

Vid rengöring av rollatorn rekommenderas maskintvätt, 60 grader i 10 minuter. Vid användning av högtryckstvätt, undvik att spola direkt mot kullagren. Utöver maskintvätt rekommenderas regelbunden rengöring med ett mildt rengöringsmedel. **OBS!** Använd INTE lacknafta, bensin eller andra lösningsmedel.

Efterbehandling

Efter tvätt skall alla leder, trånga utrymmen samt dräneringshålerna blåsas torra och sprejas med tunnflytande olja. Om avfettningsmedel använts bör de rörliga delarna smörjas.

Lacken

Kontrollera skador i lacken. För att förhindra korrosionsskador, bättra på repor. Bättringsfärg kan beställas från Human Care HC AB.

Rörstomme

Svets och skruvförband kontrolleras. Vid större korrosion ska rollatorn bytas.



Handtag

Ska sitta fast. Kontrollera att handtagsrören går att skjuta ner i chassit. Byt greppet vid behov.

Bromsar

Kontrollera att både färd- och parkeringsbroms fungerar. Wirar ska vara hela och uppklamrade.

Vingvred

Kontrollera funktionen.

CE-märkning

Kontrollera att CE-märkningen finns kvar och att den går att läsa.

Hjul

Kontrollera att hjulen inte är slitna och att de snurrar lätt utan oljud.

Smörjning

Framgafflarna ska fungera utan oljud, smörj vid behov.

Framgafflar

Kontrollera att de snurrar lätt.



Stabilitet

Kontrollera att alla hjul står stadigt på underlaget och att det inte finns någon skevhet i chassit.

Provkörning

Gör en slutlig kontroll genom en provkörning.

Reservdelslista

Nr	Benämning	Antal	Art. nr	Övrig information
1	Knopp	2	20-014	
	Hjulkit	4	89015	<i>Pinnbult och hjulmutter måste bytas vid demontering av hjulet.</i>
2	Komplett hjul	4		
3	Hjulmutter	4		
4	Pinnbult	4		
	Vingvred komplett	4	50937	<i>Smörj vingvredet vid behov.</i>
5	Vingvred	4		
6	Skruv	4		
7	Bricka	4		
8	RA handtag	2	20-064	
9	Handbroms komplett	2	10650	<i>Komplett med hållare, bromshandtag och nit.</i>
10	Handtag	2	00020	
11	RA-dynan	2	20-054	
12	RA-armstöd höger	1	400-001H	<i>Staffan RA låg</i>
12	RA-armstöd höger	1	400-028H	<i>Staffan RA hög. Komplet med teleskoprör.</i>
13	RA-armstöd vänster	1	400-001V	<i>Staffan RA låg</i>
13	RA-armstöd vänster	1	400-028V	<i>Staffan RA hög. Komplet med teleskoprör.</i>
14	Teleskoprör	1	400-025	<i>Staffan RA låg</i>
	Vajer och hölje	2	89100	<i>Staffan RA låg</i>
	Vajer och hölje	2	89105	<i>Staffan RA hög</i>

