

Periodisk inspektion av lyftselar

Riktlinjer för periodisk inspektion av Human Care lyftselar enligt SS/EN/ISO 10535:2021, bilaga Annex B.

För att säkerställa säkerhet och god funktion skall kontroll av selen göras vid varje användningstillfälle. Dessutom bör en dokumenterad inspektion genomföras minst var 6:e månad. Periodisk inspektion bör genomföras av en person som är lämplig och väl kvalificerad och har god kännedom om konstruktion, användning och skötseln av lyftselar/personlyftar. **Om selen inte blir godkänd efter inspektion skall selen kastas.**

Sele / artikelnummer / storlek:.....

Tillverkningsdatum / serienummer:.....

Brukarens namn:.....

Kontroll av sele:		Svar: Ja eller Nej
☐	Går selens etikett att läsa?	
☐	Är selens tyg helt? - Inga revor, hål eller dylikt? - Onormalt slitage?	
☐	Är selens sömmar, kantband och upphängningsöglor intakta?	
☐	Finns selens bruksanvisning tillgänglig?	
☐	Finns det ett utprovningsprotokoll till selen?	

Kommentarer.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Godkännande av selen:

Datum:

Inspektion utförd av: