

Selar utprovningsprotokoll

Brukarinformation:

Namn:

Rum:

Lokal:

Lyft:

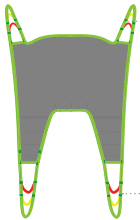
Lyftbygel:

Selmodell:

Namn/Artikelnummer:

Material:

Storlek:



Upphängningsögla:



Grön ögla

Gul ögla

Röd ögla

Förlängningsband överdel:

21180-10 (10cm/3.9")
21180-15 (15cm/5.9")
21180-20 (20cm/7.8")
21180-25 (25cm/9.8")
21180-35 (35cm/13.7")

Upphängningsögla:



Grön ögla

Gul ögla

Röd ögla

Förlängningsband underdel:

21180-10 (10cm/3.9")
21180-15 (15cm/5.9")
21180-20 (20cm/7.8")
21180-25 (25cm/9.8")
21180-35 (35cm/13.7")



Överflyttnings Situation:



Till/frånsäng:



Till/frånstol



Till/från golv



Hygien

Armplacering:



Insida sele



Utsida sele

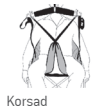
Benplacering:



Delad, avslappnad



Öppen (3-Punkt)



Korsad



Omlott

Upphängning:

2-Punkt



4-Punkt



3-Punkt



4-ESB

4-MSB



Tillbehör:



21146 Benpolstring - Small
21146 Benpolstring - Medium
21146 Benpolstring - Large



25102 Förstärkta benstöd - One Size



50866 Bygelpolstring för lyftbygel
Använd ej i våtutrymmen.

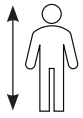
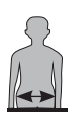
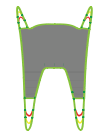
Kommentarer:

Utprovningsprotokoll utfört av:

Position/Titel:

Datum:

Storleksguide:

					
Användarvikt kg	Brukarlängd cm	Brukar rygg höjd* cm	Brukar höftbredd* cm	Rekommenderad storlek*	Färg
15-20	110-130	55-65	23-30	Junior Small (JS)	JS
20-35	120-150	60-75	29-38	Junior Medium (JM)	JM
30-60	140-170	70-85	36-42	Small (S)	S
55-90	160-190	80-95	41-47	Medium (M)	M
85-120	180-206	90-103	46-55	Large (L)	L
110-150	180-210	98-112	54-67	Extra Large (XL)	XL
140-200	180-210	103-117	60-74	Extra Extra Large (XXL)	XXL
190-300	180-210	108-125	63-78	Extra Extra Extra Large (XXXL)	XXXL

* För att mäta klientens rygg höjd, mät från klientens coccyx till toppen av huvudet.

* För att mäta klientens höftbredd, låt klienten sitta ner och mäta i en rak linje (inte omkretsen).

* Dessa storlekar är enbart rekommendationer. En korrekt utprovning skall alltid utföras av kliniskt kunnig personal med hjälp av lyftselens användammanual. Observera att vissa lyftsalar inte finns i alla storlekar. Du hittar ritningar på varje lyftsele i bruksanvisningen, levererad med produkten och tillgänglig på våra webbplatser.

Utprovningsprotokoll utfört av:

Namn:

Datum:

Position/Titel:



Viktigt! Detta utprovningsprotokoll ersätter inte användarmanualen. Läs alla instruktioner innan användning.