




# Upprättningsprotokoll

Activity Sling  
Model 25100

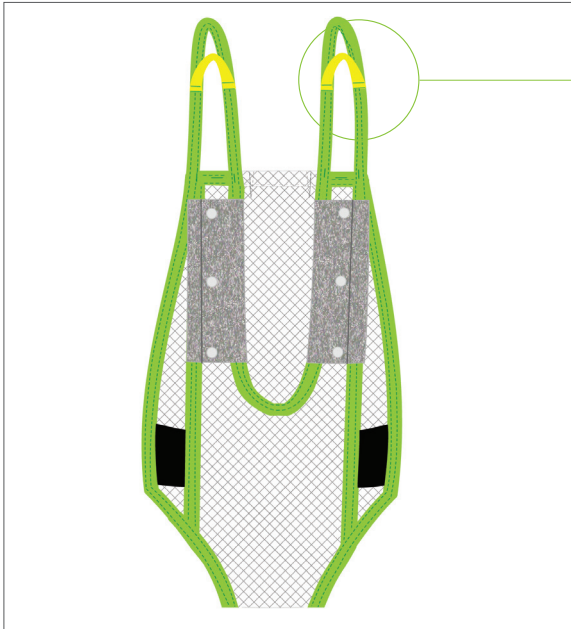

- Grön lyftögla
- Gul lyftögla

Förlängningsband

- 21180-10 (10cm/3.9")
- 21180-15 (15cm/5.9")
- 21180-20 (20cm/7.8")
- 21180-25 (25cm/9.8")
- 21180-35 (35cm/13.7")

Välj den öglekombination som ger den mest bekväma och säkra upphängningshöjden, med tanke på patientens funktionsförmåga

**Viktigt:** Montera selen i ryggläge.



Maximal användarvikt: 100kg/220lb

Model 25100 - Polyester Net

Förfluttningsalternativ:

- Till/Från Säng
- Till/Från Stol
- Gå/Ståträning

Tillgängliga storlekar:

Storleksindikering

- JS
- JM
- JL
- S

Benplacering:

- Inte tillgänglig för denna sele  
Divided relaxed position
- Inte tillgänglig för denna sele  
Open position
- Inte tillgänglig för denna sele  
Divided position
- Inte tillgänglig för denna sele  
Closed position

Upphängningsalternativ:

- 2-Point  
Inte tillgänglig för denna sele
- 3-Point  
Inte tillgänglig för denna sele

Nödvändiga tillbehör:

- 50866 Bygelpolstring för lyftbygel. Ska inte användas i våta miljöer.

Patient Information:

Namn		
Enhet	Rum	Selens serienummer:
Lyft använd		Lyftbygel använd

Activity Sling är designad för att hjälpa barn eller unga tonåringar med gångträning eller rehabiliteringsövningar. Activity Sling är gjord av ett polyesternet och har en förlängd baksida för att stödja huvudet och nacken under rörelse. Den har elastiska band på sidorna för maximal flexibilitet och kan användas med ett midjebälte för extra stöd. Activity Sling är designad för 2-punktsupphängning och kan endast användas med taklyft.

### Ytterligare instruktioner:

Till Personal/Vårdgivare:


Till Patient:


Utprovningsprotokoll ifylld av:

Namn	
Datum	Position/titel



**Viktigt!** Detta utprovningsprotokoll ersätter inte bruksanvisningen. Läs alla instruktioner före användning!

[www.humancaregroup.com](http://www.humancaregroup.com)

#### HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B  
117 43 Stockholm  
Phone:- +46 8 665 35 00  
Fax:- +46 8 665 35 10  
info.se@humancaregroup.com

#### HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road  
Ottawa, ON K2E 7K1  
Phone: +613.723.6734  
Fax: +613.723.1058  
info.ca@humancaregroup.com

#### HUMAN CARE NEDERLAND

Elspeterweg 124  
8076 PA Vierhouten  
Phone: +31 577 412 171  
Fax: +31 577 412 170  
info.nl@humancaregroup.com

#### HUMAN CARE UNITED STATES

8006 Cameron Road, Suite K  
Austin, TX 78754  
Phone: +512.476.7199  
Fax: +512.476.7190  
info.us@humancaregroup.com