


Brukarinformation RA-rollator





Montering armstöd

1. För ner handtagsrören i rollatorns ram (bild A)
2. Montera armstöden på handtagsrören (bild A)
3. Bakre delen av bromsröret får ej gå utanför bakre delen av dynan (bild A)
4. Justera handtagsrören så att de pekar mot brukaren och brukarens gångrytt. De får ej justeras in i det streckade området i bild B.


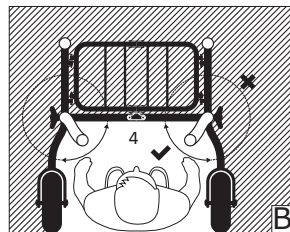


Utfällning, RA-rollator med sits

1. För handtagen
 2. Tryck sitsen framåt.
- utåt.

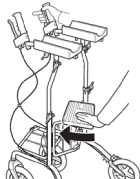
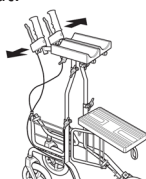


3. **Viktigt!** Kontrollera att låset grepar om grinden.

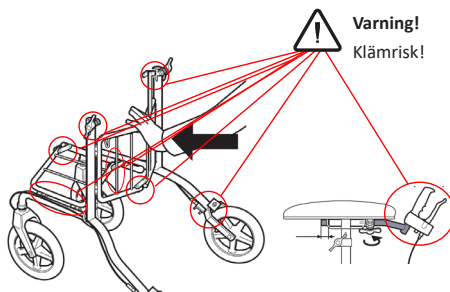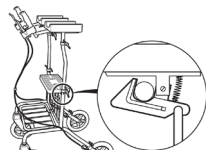


Hopfällning, RA-rollator med sits

1. Dra i den röda ögla så att låset frigör grinden.
2. Dra sitsen bakåt och för handtagen inåt.

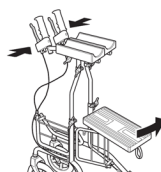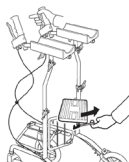


Utfällning, RA-rollator utan sits

Fäll ner spärren.

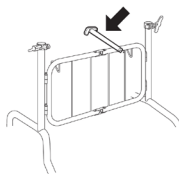



Hopfällning, RA-rollator utan sits

Vik upp spärren, dra grinden bakåt och för handtagen inåt.

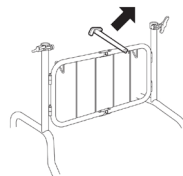

Justering av höjd



Lossa vingvreden och justera körhandtagen till rätt handledshöjd. Lås vingvreden.

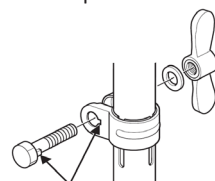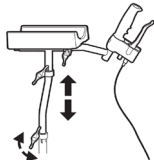


Viktigt! Rören får inte höjas över markeringen "0".

Montering av dynan

Montera fast dynfästena i dynan med de tillhörande skruvarna.

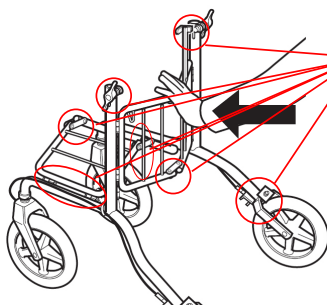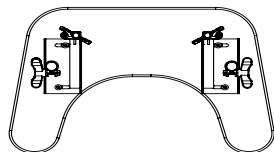


Varning!
Klämrisk!

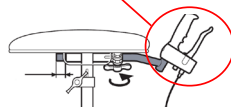


Utfällning


1. För sidorören utåt.

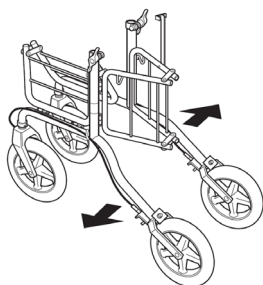


2. Tryck grinden framåt.

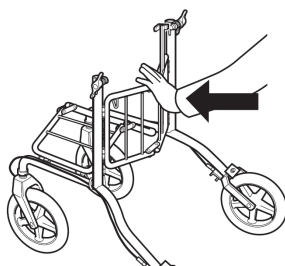

3. Lås grinden genom att fälla ner spärren.

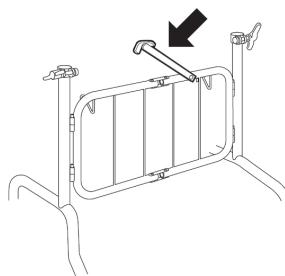


4. Sätt dit bordet och skruva fast det med vingvreden.

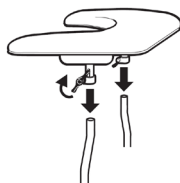

Viktigt!

Vid fastskruvning med vingvreden är det viktigt att klacken på skruven hamnar i spåret i skruvhålet.

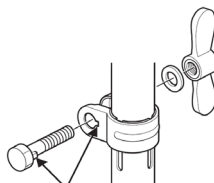

Hopfällning

Hopfällningen av gåbordet görs i omvänd ordning mot utfällningen.


Justering av höjd

Justera bordet till rätt höjd. Lossa vingvreden och justera handtagen till rätt höjd. Lås vingvreden.



Justera avståndet till handtagen

Det inre röret får inte gå innanför det yttre röret.

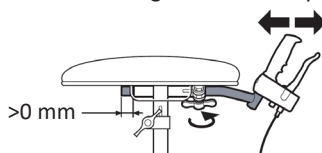

Viktigt! Rören får inte höjas över markeringen "0".

Brukarinformation, Gåbord & RA-rollator

- Läs alla varningar och instruktioner noggrant innan du använder RA-rollatorn/gåbordet.
- Säkerställ att RA-rollatorn/gåbordet är ordentligt uppfälld innan användning.
- RA-rollatorn/gåbordet får endast användas som gång- och sittstöd.
- Det är förbjudet att stå på RA-rollatorn/gåbordet.
- Använd inte produkten i trappor eller rulltrappor.
- Iakttag extra försiktighet när RA-rollatorn/gåbordet används i backar eller på ojämnt underlag.
- Sitt aldrig på RA-rollatorn/gåbordet och rulla dig fram med fötterna.
- Fördela vikten jämnt för att förhindra att RA-rollatorn/gåbordet välter när du sätter dig.
- Parkeringsbromsen skall vara ilagd om RA-rollatorn/gåbordet används som stöd när du sätter dig ned eller reser dig upp.
- Placera inget på den hopfällda RA-rollatorn/gåbordet vid förvaring eller transport då det kan skada den.
- Förvara inte RA-rollatorn/gåbordet nära en värmekälla då detta kan skada vissa detaljer.
- Var försiktig vid hantering av RA-rollatorn/gåbordet så att du inte skadar dig när den har varit utsatt för extremt höga eller låga temperaturer.
- Förvara inte RA-rollatorn/gåbordet utomhus.
- Spara bruksanvisningen för framtida användning.


Parkeringsbroms

Tryck bromshandtaget neråt för parkeringsläge.



Varning!

Parkeringsbromsa innan Du sätter dig, gäller endast modeller med sits.

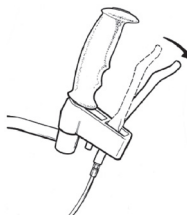


Färdbroms

Drag bromshandtaget inåt för färdbroms.




OBS!

Kontinuerlig bromsning leder till onormalt slitage på hjul och broms.

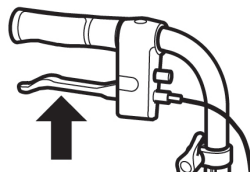

Bromsjustering

Lossa låsmuttern, justera bromsen genom att skruva på justerhylsan. Efter justering skruva åt låsmuttern.

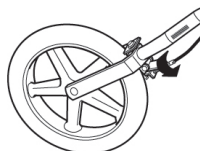

Rengöring och service

Vid rengöring rekommenderas vatten och mildt rengöringsmedel. Maskintvätt 60°C i 10 min kan användas, torkning max 70°C i 10 min, observera efterbehandlingskraven. Undvik att spola med tryck mot lager (hjul, framgafflar).



OBS!

Använd inte lacknafta, bensin eller andra lösningsmedel.



Viktigt!

Vid byte av delar på rollatorn ska endast originaldelar användas för att CE-märkningen ska gälla.



Viktigt!

Egna ingrepp/ändringar på rollatorn är inte tillåtet.



Viktigt!

Utför regelbunden översyn av rollatorn för att den ska fungera tryggt och säkert för brukaren.

Översyn bör genomföras regelbundet enligt rekonditioneringsanvisning:

Carl-Oskar RA & GB, art. nr.: 99213

Rebel RA & GB, art. nr.: 99214

För mer information om service, rekonditionering, reservdelar och tillbehör, se Human Cares hemsida: www.humancaregroup.com eller kontakta oss via adress, telefonnummer eller e-mailadress enligt sista sidan.

Garanti

Human Care HC AB:s garanti omfattar material- och tillverkningsfel på gånghjälpmedlet. Förslitning på hjul, bromsdelar och handtag omfattas ej. Ytbehandlingsskador uppkomna efter leverans omfattas ej. Garantin förutsätter att produkten har använts på avsett sätt samt att den rekonditionerats regelbundet och enligt vår rekonditioneringsanvisning. Produktens IDnr måste också gå att identifiera. Produkten får ej heller ha modifierats eller specialanpassats av annan än Human Care HC AB. Garantitiden är 1 år eller enligt avtal.

Vid reklamation, kontakta oss för instruktioner om åtgärd.

Följande uppgifter skall anges vid reklamation: Produktens ID-nummer, datum för senaste rekonditionering, kontaktperson hos avsändare och felbeskrivning.