

HP handtag

Carl-Oskar och Rebel

Art. nr: 22115, HP handtag vänster, enhandsbroms höger
22116, HP handtag höger, enhandsbroms vänster



Montering

Användning

HP handtaget är utformat för brukare med behov av extra stöd vid gång.

OBS!

HP handtaget får endast användas för Carl-Oskar och Rebel rollatorer med bredd 62, 67 och 72 cm

Vid montering av HP handtaget skall tillhörande enhandsbroms monteras.

Viktigt!

HP handtaget får endast justeras så att tyngdpunkten är inom rollatorns hjulbas.

Justering - Handtag

Justera handtagets placering. Fixera det genom att dra åt vingvredet.

Justering - Sidled

Justera HP handtaget i sidled genom att vrida det. Fixera det genom att dra åt vingvredet.

Justering - Sid/Höjddled

Justera HP handtagets höjd (se MAX-markering på röret) och vinkel i sidled. Fixera det genom att dra åt vingvredet.

OBS! Vinkeln på handtagsröret får ej peka utåt.



• Årstaängsvägen 21C, SE-117 43 Stockholm, Sweden •
• Tel. +46(0)8 - 510 132 00 • Fax +46(0)8 - 665 35 10 •
• www.humancaregroup.com •