




Utprovningsprotokoll

Multi Sling
Model 25105

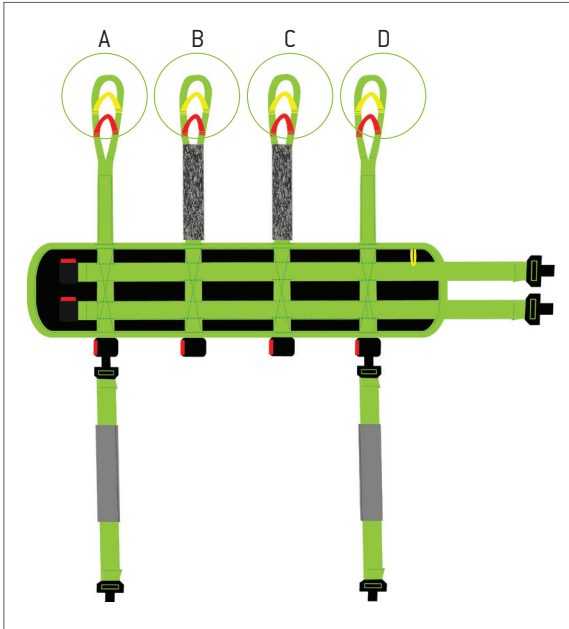

Ögla A (Framsida)

- Röd ögla
- Gul ögla
- Grön ögla

Ögla B (Baksida)

- Röd ögla
- Gul ögla
- Grön ögla

Ögla C (Baksida)

- Röd ögla
- Gul ögla
- Grön ögla

Ögla D (Framsida)

- Röd ögla
- Gul ögla
- Grön ögla

Multi Sling komponenter:



Bröstbälte
Artikelnr. 25106




Ljumskestöd
Artikelnr. 25108




Axelstöd
Artikelnr. 25109

Välj den öglekombination som ger den bästa höjden för den avsedda användningen. Matcha färger på båda sidor av patienten (2 främre remmar och 2 bakre remmar av bröstbälte).

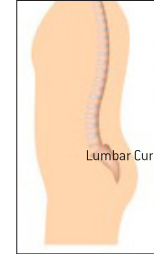

När du placerar bröstbältesdelen av Multi Sling, se till att den vilar på ländryggen ovanför svanskotan.

Om du använder ett midjebälte, för in det genom de inre öglorna på bröstbälte.

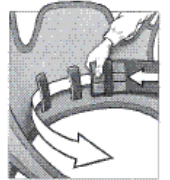

Multiselen ska appliceras medan patienten är i sittande läge.

Maximal användarvikt: 150kg/330.7lb

Model 25105 - Polyester

Förflyttningsituation:

- To/From a Bed
- To/From a Chair
- Gait Training/Mobilization
- Dressing/Undressing

Tillgängliga storlekar:

Storleksindikering

- S
- M
- L
- XL

Benplacering:

- Inte tillgänglig för denna sele
Divided relaxed position
- Inte tillgänglig för denna sele
Open position
- Inte tillgänglig för denna sele
Divided position
- Inte tillgänglig för denna sele
Closed position

Upphängningsalternativ:

- 2-Point
- 4-Point
- 3-Point
- Inte tillgänglig för denna sele ESB

Nödvändiga tillbehör:



25150 Nackkudde



25145 Midjebälte - Kardborr
(Förs in genom de inre öglorna på bröstbälte)



25146 Midjebälte - Säkerhetslås
(Förs in genom de inre öglorna på bröstbälte)



25107 Höftbälte



50866 Bygelpolsträng för lyftbygel. Ska inte användas i våta miljöer.

Midjebälte (Vald storlek)

Tillgängliga storlekar:
-60 (60cm/23.6")
-70 (70cm/27.6")
-80 (80cm/31.5")
-90 (90cm/34.4")
-100 (100cm/39.4")
-110 (110cm/43.3")
-120 (120cm/47.3")
-130 (130cm/51.2")
*Model 25146 enbart

Patient Information:

Namn:

Enhet: Rum: Selens serienummer:

Lyft använd: Lyftbygel använd:

Multi Sling är designad för gångträning och rehabiliteringsövningar. Den kan användas i många situationer och kan tillsammans med ett brett utbud av tillbehör fungera som stöd vid stå-, gång- och balansövningar samt vid toalettbesök eller på- och avklädning. Multi Sling är lämplig för patienter med viss kroppsstabilitet och delvis användning av benen och är godkänd för 2-punkts, 3-punkts eller 4-punktsupphängning. När det används med ett höftbälte ger det utmärkt stöd för patienter med allvarliga funktionsnedsättningar som stroke. Att lägga till ett ljumskstöd ger extra stöd och säkerhet.

Ytterligare instruktioner:

Till Personal/Vårdgivare:

Till Patient:

Utprovningsprotokoll ifylld av:

Namn	
Datum	Position/titel



Viktigt! Detta utprovningsprotokoll ersätter inte bruksanvisningen. Läs alla instruktioner före användning!

www.humancaregroup.com

HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
Phone:- +46 8 665 35 00
Fax:- +46 8 665 35 10
info.se@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road
Ottawa, ON K2E 7K1
Phone: +613.723.6734
Fax: +613.723.1058
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE NEDERLAND

Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
Phone: +31 577 412 171
Fax: +31 577 412 170
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES

8006 Cameron Road, Suite K
Austin, TX 78754
Phone: +512.476.7199
Fax: +512.476.7190
info.us@humancaregroup.com