


Alpha Leg Support & Extension

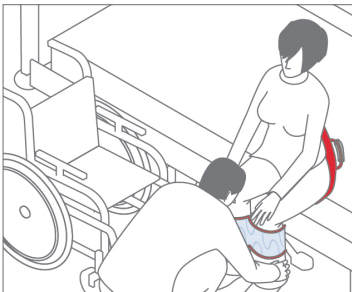

Alpha Leg Support hjälper till vid förflyttningen av en sittande brukare till och från en rullstol, på toaletten, en stol eller liknande situation. Benbältet fungerar bra i kombination med ett glidbräda, vändskivor, eller vårdbälten. Det gör överflyttningen mycket mer ergonomisk för vårdgivaren och enklare för brukaren. Det underlättar rörelseomfånget och ökar säkerheten vid överflyttningen avsevärt.

Benbältet placeras försiktigt runt benen på den sittande brukaren, under knänivån och fästs med kardborrebandet. Vårdgivaren placerar sedan försiktigt sin egen fot mellan brukarens fötter. Under överflyttningen låses benstödet på plats och gör det möjligt för vårdgivaren att stabilisera rotationen genom att placera lätt mottryck på benstödet. Benstödet kan förlängas med benstödförlängningen på 50 cm.

Produktspecifikation

Produktnamn	Art. nr.	Dimensioner	Material	Max brukarvikt
Alpha Leg Support	PM-3005	100 x 22 cm	PES/Carbon, latexfri	200kg
Alpha Leg Support Extension	PM-3007	50 x 20 cm	PES/Carbon, latexfri	200kg




PETERMANN
part of the Human Care Group

Human Care AB är distributör av
Petermann GmbH produkter i Sverige

Besök www.humancaregroup.com för de senaste produktuppdateringarna.