

Lyftbåge



Art. nr: 896

Service Manual

För att hjälpmedlet skall fungera tryggt och säkert för brukaren bör regelbunden översyn av hjälpmedlet göras. Därför rekommenderas följande åtgärder.

OBS! Produkten får endast användas som förflyttningshjälpmedel vid säng.

Produkten är MD-märkt enligt Medicintekniska direktivet.

Rengöring

Vid rengöring av produkten – tvätta lyftbågen med handvarmt vatten och ett mildt rengöringsmedel. Använd ej rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel, slipmedel eller har ett lägre PH-värde än 5,0.

Vid maskintvätt skall samtliga delar placeras stående så att vatten inte samlas. Benen skall tas bort från stativet innan rengöring påbörjas och stativets över- och underdel separeras. För att undvika rostangrepp i benen – ta loss dem från lyftbågsstativet och låt dem torka efter rengöring.

Lacken

Kontrollera skador i lacken. För att förhindra korrosionsskador, bättra på repor. Bättringsfärg kan beställas från Human Care HC AB.

Stabilitet

Kontrollera att lyftbågen står stadigt på underlaget och att det inte finns någon skevhet i stativet. Kontrollera även att finjusteringen i varje ben fungerar. Med dess gummifötter regleras små ojämnheter i golvet.

Etikett

Kontrollera att etiketten finns kvar och att den går att läsa.


Rörstomme

Kontrollera svetsfogarna.

Skruvar

Kontrollera att alla skruvar och fästelement är åtdragna.

Reservdelar

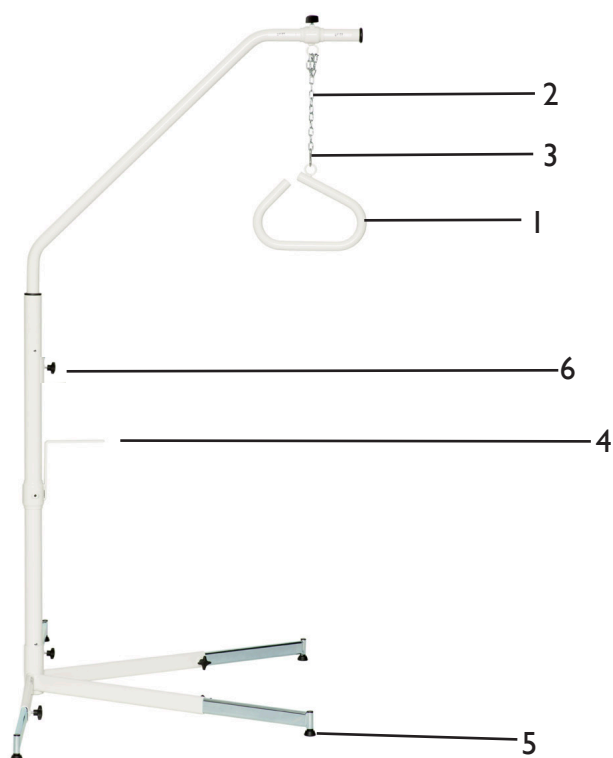

Pos.	Benämning	Art.nr.	Antal
	Handtag komplett	89500	
1	Handtag		1
2	Kätting		1
3	Ändavslutning		2
4	Hylsa för sänglåsning	1116000	1
5	Justerbar fot	93081	1
6	Vingvred M8	93094	1



• Årstaängsvägen 21B, SE-117 43 Stockholm, Sweden
• Tel. +46(0)8 - 510 132 00 • www.humancaregroup.com •