

# Lyftbåge



Art. nr: 896

## Om produkten




### Viktigt! Läs noga igenom anvisningen!

1. Får endast användas som förflyttningshjälpmedel vid säng.
2. Samtliga ben och fötter måste vara i kontakt med golv vid användning
3. Produkten är CE-märkt enligt Medicintekniska förordningen 2017/745.

### Maxbelastning beroende på hylsplacering

Hylsan kan förskjutas 190 mm i vågrätt läge. Vredet på hylsan skall vara åtdraget så att hylsan inte kan flytta sig när lyftbågen används.

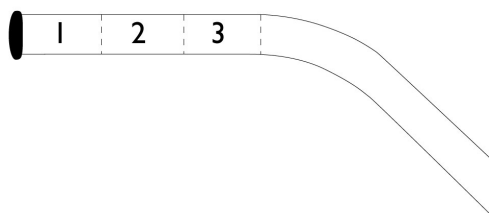

### Rengöring

Vid rengöring av produkten – tvätta lyftbågen med handvarmt vatten och ett mildt rengöringsmedel.


Vid maskintvätt skall samtliga delar placeras stående så att vatten inte samlas. Benen skall tas bort från stativet innan rengöring påbörjas och stativets över- och underdel separeras.

Använd ej rengöringsmedel som innehåller slipmedel eller har ett lägre PH-värde än 5,0.

För att undvika rostangrepp i benen – ta loss dem från lyftbågsstativet och låt dem torka efter rengöring.

### Övrigt

Om önskan finns, att använda andra likvärdiga på marknaden förekommande reservdelar samt tillbehör, kontakta först Human Care.

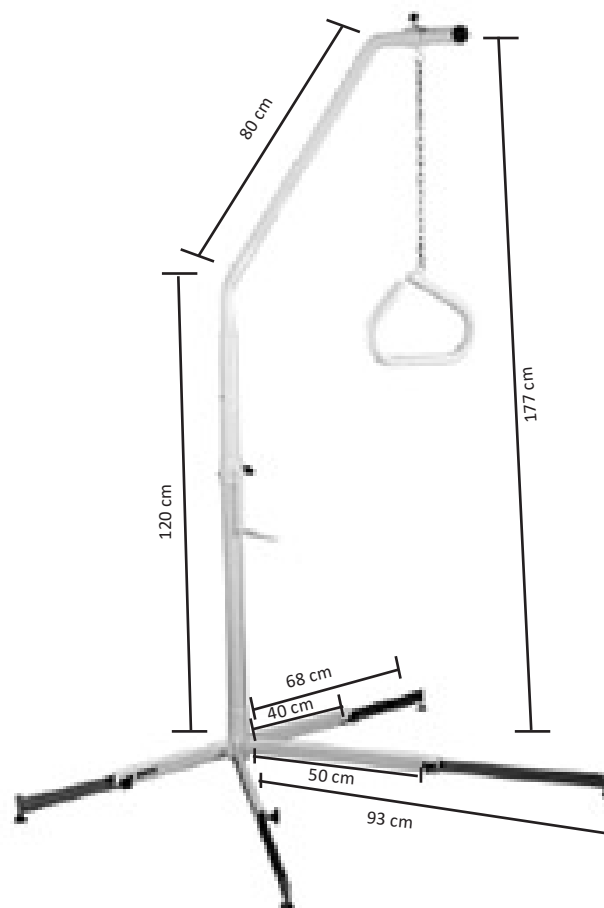

- Benens/fötternas höjd är 7 cm
- Frigång under ben/fötter är 2 cm
- Höjd från golv till greppet på trapetsen kan variera mellan 104 - 140 cm
- Höjd från infästning av kätting till trapetsens grepp kan variera mellan 30 - 66 cm
- Vikt: 12 kg.

Art.nr.	Benämning	Maxlast läge 1	Maxlast läge 2	Maxlast läge 3
896	Lyftbåge inkl. hylsa sänglåsning	60	65	70

# Monteringsanvisning

## 1. Golvstativet

Drag ut de blanka plattovala rören i bredd med sängsidorna.  
OBS! Dras ut till halva stoppmarkeringen (röda punkten).

Lås fast rattarna.

Vid ojämnt underlag vrid gummifötterna på undersidan till dess stabilitet uppnås.

## 2. Mellanröret

Sätt i röret i mellanröret. Genom att vrida det åt sidan märker Du att den är rätt isatt när det stoppar vid 30° i utsvängt läge.

## 3. Fixeringsdetalj

(Hylsa sänglåsning art.nr. 1116000)

För upp hylsan med plattjärnet mot sängens undersida och skruva fast. Ratten kan flyttas till motsatta sidan om utrymmet så fordrar.

**OBS! Om höj- och sänkbar säng används kan ej sänglåsningen användas. Lyftbågen skall dessutom stå fritt från sängen så att en eventuell höjning eller sänkning av sängen inte påverkar eller kan påverka lyftbågen i något läge.**


## 4. Hylsa med handtag

Hylsan kan förskjutas 190 mm i vågrätt läge. Vredet på hylsan skall vara åtdraget så att hylsan inte kan flytta sig när lyftbågen används.

## 5. Vringvredet

Vid behov fixera användarläget i fast läge med vringvredet.

Handtaget är reglerbart i höjd genom ändring av kedjelängden.

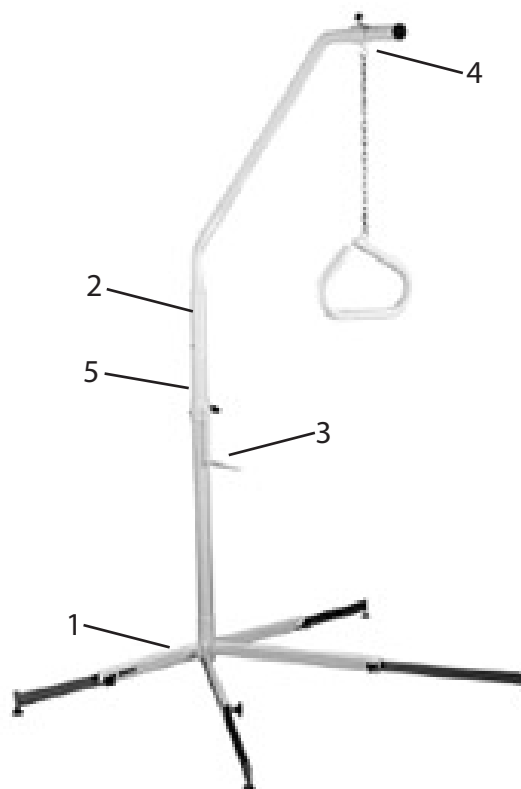

• Årstaängsvägen 21B, 117 43 Stockholm • Tel. 08 - 510 132 00 • Fax 08 - 665 35 10 •  
• www.humancaregroup.com •