

Lyftbåge

Art. nr: 896

Om produkten



Viktigt! Läs noga igenom anvisningen!


- Får endast användas som förflyttningshjälpmedel vid säng.
- Samtliga ben och fötter måste vara i kontakt med golv vid användning
- CE symbolen indikerar att produkten uppfyller kraven i EUs direktiv 93/42/EEC och/eller EUs förordning 2017/745.
- MD symbolen indikerar att produkten är medicinsk utrustning enligt definitionen av medicinsk utrustning i EUs direktiv 93/42/EEC (MDD) och / eller EU-förordningen 2017/745 (MDR).

Maxbelastning beroende på hylsplacering

Hylsan kan förskjutas 190 mm i vågrätt läge. Vredet på hylsan skall vara åtdraget så att hylsan inte kan flytta sig när lyftbågen används.

Avsedd användning: Lyftbågen är avsedd att hjälpa brukare att lyfta överdelen av kroppen medan de ligger i en vårsäng och användas med sängar som har höjdjustering eller som inte är försedda med höjdjustering.

Förväntad livslängd: 5 år.

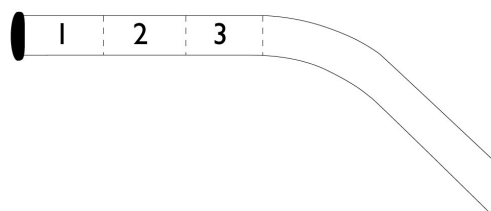

Rengöring

Vid rengöring av produkten – tvätta lyftbågen med handvarmt vatten och ett mildt rengöringsmedel.


Vid maskintvätt skall samtliga delar placeras stående så att vatten inte samlas. Benen skall tas bort från stativet innan rengöring påbörjas och stativets över- och underdel separeras.

Använd ej rengöringsmedel som innehåller slipmedel eller har ett lägre PH-värde än 5,0.

För att undvika rostangrepp i benen – ta loss dem från lyftbågsstativet och låt dem torka efter rengöring.

Övrigt

Om önskan finns, att använda andra likvärdiga på marknaden förekommande reservdelar samt tillbehör, kontakta först Human Care.

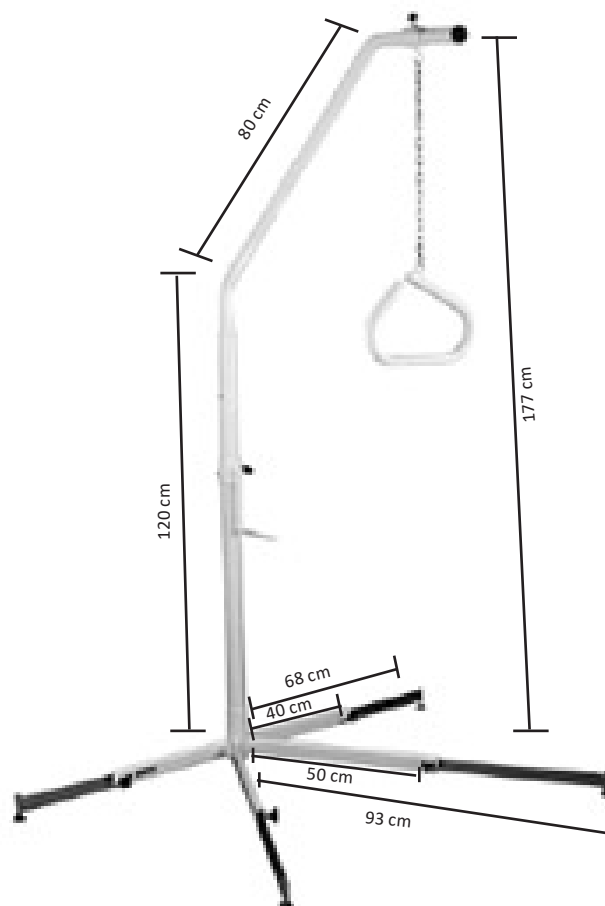

- Benens/fötternas höjd är 7 cm
- Frigång under ben/fötter är 2 cm
- Höjd från golv till greppet på trapetsen kan variera mellan 104 - 140 cm
- Höjd från infästning av kätting till trapetsens grepp kan variera mellan 30 - 66 cm
- Vikt: 12 kg.
- Lyftbågen kan belastas med upp till 70 kg beroende på hylsplacering. Detta motsvarar en maximal brukarvikt på ungefär 110 kg.

Art.nr.	Benämning	Maxlast läge 1	Maxlast läge 2	Maxlast läge 3
896	Lyftbåge inkl. hylsa sänglösning	60	65	70

Monteringsanvisning

1. Golvstativet

Drag ut de blanka plattovala rören i bredd med sängsidorna.
OBS! Dras ut till halva stoppmarkeringen (röda punkten).

Lås fast rattarna.

Vid ojämnt underlag vrid gummifötterna på undersidan till dess stabilitet uppnås.

2. Mellanröret

Sätt i röret i mellanröret. Genom att vrida det åt sidan märker Du att den är rätt isatt när det stoppar vid 30° i utsvängt läge.

3. Fixeringsdetalj

(Hylsa sänglåsning art.nr. 1116000)

För upp hylsan med plattjärnet mot sängens undersida och skruva fast. Ratten kan flyttas till motsatta sidan om utrymmet så fordrar.

OBS! Om höj- och sänkbar säng används kan ej sänglåsningen användas. Lyftbågen skall dessutom stå fritt från sängen så att en eventuell höjning eller sänkning av sängen inte påverkar eller kan påverka lyftbågen i något läge.

4. Hylsa med handtag

Hylsan kan förskjutas 190 mm i vågrätt läge. Vredet på hylsan skall vara åtdraget så att hylsan inte kan flytta sig när lyftbågen används.

5. Vringvredet

Vid behov kan vingvredet användas för att parkera lyftbågens svängarm i ett bestämt läge när den är obelastad och därigenom förhindra att den hamnar utom räckhåll för patienten.

Handtaget är reglerbart i höjd genom ändring av kedjelängden.

