



# HUMAN CARE

Your Life. Your Way.



## Monteringsanvisning

Droppställning

Art.nr 92907



# Innehållsförteckning

Monteringsanvisning .....	1
Allmän information.....	3
Droppställning .....	3
Motvikt.....	4

# Monteringsanvisning

SV

Art. nr: 92907

Den här monteringsanvisningen förklarar hur droppställningen ska monteras på

rollatorerna Carl-Oskar, Rebel, Carl-Oskar RA och Rebel RA.

## Allmän information

SV

Droppställningen passar till alla bredder av Carl-Oskar och Rebel, samt förstärkta modeller. Ställningen kan också monteras på Carl-Oskar RA och Rebel RA, men begränsar då positioneringen av underarmsstöden. Användning av droppställning på RA-rollatorer är därför beroende av hur underarmsstöden ska anpassas för brukaren.

Droppställningen är inte kompatibel med Carl-Oskar gåbord eller Rebel gåbord.

Droppställningen får ej belastas med mer än tre kilo. För maximal stabilitet, användarvänlighet och fallhöjd rekommenderas droppåsar med en liter när det finns tillgängligt.

# Monteringsanvisning

SV



Montering av monteringsklämman.

### Droppställning

1. Fäst monteringsklämman på det röda handtagsröret precis ovanför det övre av de två grindgångjärnen med rörfästet riktat framåt. Dra åt de två skruvarna ordentligt.
2. Ställ droppställningen i rörfästet så att droppställningen vilar med den utstickande axeln på rörfästets övre kant och dra åt det svarta vredet ordentligt.
3. Justera droppställningens höjd genom att

[www.humancaregroup.com](http://www.humancaregroup.com)



Monteringsklämma.



Montering av  
droppställning.



Placering av motvikter i  
rollatorns främre grind.

lossa det svarta vredet och skjuta upp det inre röret. Skruva fast vredet igen när önskad höjd är inställd. Säkerställ god stabilitet.

### **Motvikt**

4. På motsatt sida av droppställningen ska tre motvikter monteras på grinden. Lägg motvikterna på varandra och dra igenom ett buntband i varje hörn.

5. Håll viktpaketet i mellanrummet på den främre grindens kortsida och närmsta stag.

6. Spänn fast viktpaketet med buntbanden. Dra åt lite i taget så att viktpaketets position i förhållande till ramen kan justeras. Om rollatorn ska användas med korg bör viktpaketet justeras, för att undvika att det inte sticker upp över grindens ram. Klipp av överflödet på buntbanden.

På Rebel och Carl-Oskar 57 är avståndet mellan grindens ram och stag mindre. På dessa modeller fästs de tre viktplattorna på grindens undersida.

### **HUMAN CARE SWEDEN (HQ)**

Årstaängsvägen 21B  
117 43 Stockholm  
Phone:- +46 8 665 35 00  
Fax:- +46 8 665 35 10  
E-post: [info.se@humancaregroup.com](mailto:info.se@humancaregroup.com)  
[www.humancare.se](http://www.humancare.se)

### **HUMAN CARE CANADA**

10-155 Colonnade Road  
Ottawa, ON K2E 7K1  
Phone:- +1 613.723.6734  
Fax:- +1 613.723.1058  
Email: [info.ca@humancaregroup.com](mailto:info.ca@humancaregroup.com)  
[www.humancaregroup.com](http://www.humancaregroup.com)

### **HUMAN CARE UNITED STATES**

Human Care USA Inc.  
8006 Cameron Street, Suite K  
Austin, TX 78754 USA  
Phone: +1 512 476 7199  
Fax: +1 512 476 7190  
[info.us@humancaregroup.com](mailto:info.us@humancaregroup.com)

### **HUMAN CARE AUSTRALIA**

Unit 4, 49 Bertie Street  
Port Melbourne, Victoria 3207  
Phone:- +61 1300 132 736  
Fax:- +61 (03) 9645 4954  
Email: [info.au@humancaregroup.com](mailto:info.au@humancaregroup.com)  
[www.humancaregroup.com](http://www.humancaregroup.com)

### **HUMAN CARE THE NETHERLANDS**

Els peterweg 124  
8076 PA Vierhouten  
Phone: +31 577-412171  
Fax: +31 577-412170  
Email: [info.nl@humancaregroup.com](mailto:info.nl@humancaregroup.com)  
[www.humancaregroup.com](http://www.humancaregroup.com)

[www.humancaregroup.com](http://www.humancaregroup.com)

