



HUMAN CARE

Your Life. Your Way.



Monteringsanvisning

Fellow Classic Tvärhandtag vänster hand, art nr: 55799

Fellow Classic Tvärhandtag höger hand, art nr: 55850



Monteringsanvisning

Tvärhandtag vänster (55799) Tvärhandtag höger (55850)

För rollator modell: Fellow Classic Standard (88009)

Nummer/Benämning	Antal
1. Täckhatt	1
2. Ändavslut	2
3. Bromsjusteringsskruv	2
4. Vajerlås	2
5. Plastcylinder	1
6. Vajerhölje lång	1
7. Vajerhölje kort	1
8. Tvärhandtag vänster (ink. enhandsbroms med vajer)	1
9. Tvärhandtag höger	1



Verktyg att ha tillgängligt:

- Insexnyckel storlek 4
- Blocknyckel storlek 8
- Avbitartång
- Tång



Montering:


Steg 1.

Montera bort de befintliga handtagsrören och bromsvajrarna från bromsen.

(Spara bromsfjädrarna från dessa)


Steg 2.

Montera ihop handtagsrör vänster (8) och handtagsrör höger (9) genom att trä på dom i varsin ände på plastcylindern (5).

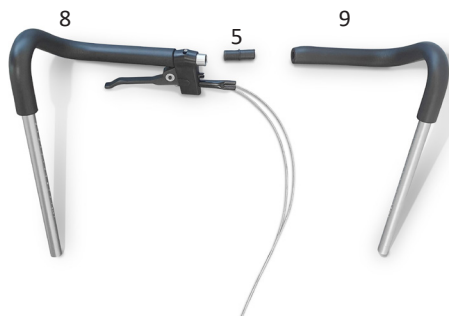

Steg 3.

Trä den undre vajern från bromshandtaget igenom vajerhölje lång (6) och den övre vajern igenom vajerhölje kort (7). Sätt även på täckhaten (1) på bromshandtaget.

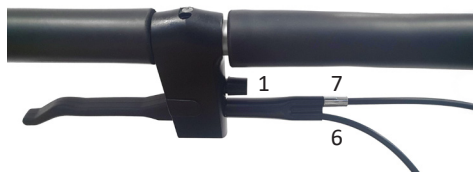

Steg 4.

Trä på en bromsjusteringsskruv (3) på vardera vajer och trä den sedan igenom bromsvajerfästet på rollatorn och skruva därefter åt muttern en aning.

Steg 5.

Trä på dom gamla fjädrarna samt ett vajerlås (4) med den smala pipen uppåt på vardera vajer.

Steg 6.

Skjut in den smala pipen på vajerlåset (4) i spåret på bromsarmen och skruva åt.

Steg 7.

Testa bromsarna och om nödvändigt justera därefter muttern på bromsjusteringsskruven (3).

Steg 8.

Knipsa av vajern nedtill, men behåll ca 3-4 cm i änden. Montera därefter ett ändavslut (2) och kläm åt med en tång.



HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B

117 43 Stockholm

Phone: +46 8 665 35 00

Fax: +46 8 665 35 10

Email: info.se@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road

Ottawa, ON K2E 7K1

Phone: +1 613 723 6734

Fax: +1 613 723 1058

Email: info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES

8006 Cameron Street, Suite K

Austin, TX 78754 USA

Phone: +1 512 476 7199

Fax: +1 512 476 7190

Email: info.us@humancaregroup.com

HUMAN CARE NEDERLAND

Elspeterweg 124

8076 PA Vierhouten

Phone: +31 577 412 171

Fax: +31 577 412 170

Email: info.nl@humancaregroup.com

www.humancaregroup.com

