



Stödande
Två material
Enkel

Low Basic Sling



Vår Low Basic Sling är en bra lösning för användare som har bålstabilitet och kontroll över överkroppen. Designen liknar Basic Sling, men den har ett kortare ryggstöd. Low Basic Sling ger stöd från svanskotan upp under armarna och under benen. Armarna kan hållas inuti, men hålls oftast utanför selen. Det är en perfekt sele för en mer aktiv användare. Low Basic Sling är designad för två-, tre- och fyrapunktsupphängning.



Två material

Low Basic Sling är en bekväm sele som finns i två tygval - Polyester och Polyester Net. Polyesternätmaterialen tillåter fukt och värme att överföras effektivt från klienten vilket gör att selen kan lämnas bakom klienten under en kort tid efter att överföringen är klar. Polyester Net-tyget är flexibelt, luftigt och torkar snabbt vilket gör det lämpligt att använda i badmiljöer.

kan användas med 2-punkts, 3-punkts eller 4-punktsupphängning beroende på behov.

Enkel skötsel och enkel användning

Våra selar är tillverkade enligt högsta kvalitetsstandard. De har förstärkta lyftöglor och höghållfast nylonband runt selen för att göra dem starka nog att motstå även den mest aktiva användningen. Varje lyftseletikett är färgkodad för att säkerställa ett snabbt och enkelt val av rätt lyftsele likaså är lyftöglorna färgkodade för enkel bestämning av önskad placering.

Upprätt sittande

Vår Low Basic Sling ger stöd så att klienten kan ha sina armar på utsidan av selen. De är lämpliga för patienter med bålstabilitet och upprätt sittande, vilket är särskilt användbart för att säkerställa korrekt positionering när patienten placeras i en stol eller annan sittplats. De



Tillbehör



Förlängningsband

Används för att förlänga lyftbyglarna för att kunna anpassa lyftposition eller för att hålla ihop bendelar. Olika längder. NR.:21180-*



Benpolstring och benstöd

Utmärkt för användare med känslig hud eller som har smärta. Benpolstring, art nr. 21146-S, M och L. Förstuvade benstöd, art. nr. 25102



Bygelpolstring

Det polstrade fodralet skyddar användaren från sammanstötningar med lyftbygeln. Ska inte användas i våta miljöer. Art. nr. 50866



Lyftbyglar för 4-punktsupphängning

Art. nr. 55619 Lyftbygel till 4-punktsupphängning i portabel lyft. Art. nr. 70800 4-punktsbygel till stationär lyft.

Lyftsituation




Till och från sängen

Lämplig för förflyttningar och ompositionering till och från sängen.




Till och från rullstolen

Lämplig för förflyttningar och ompositionering till och från rullstolen.

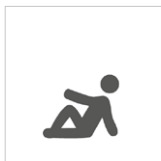

Använd från golv

Fungerande vid förflyttning från golv.

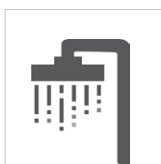

Använd vid duschning

Bara Polyester Nät kan användas för detta.

Skötsel och funktioner




Polyester

Mjukt, tunt material som andas och torkar snabbt. Idealisk för bad eller duschning.



Polyester Net

Hållbar, låg friktion, lätt att rengöra, applicera och ta bort.

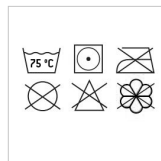


Skötsel

Skötselinstruktioner lokerade på etikett. Använd som sjukhus gradsvätt.

Tekniska specifikationer

Artikelnummer	Storlek	Färg	A	B	C	
Polyester nät	Polyester					
25047-JS	25072-JS	Junior Small	JS	22 cm	65 cm	30 cm
25047-JM	25072-JM	Junior Medium	JM	28 cm	71 cm / 28"	37 cm
25047-S	25072-S	Small	S	35 cm	83 cm / 32,7"	42 cm
25047-M	25072-M	Medium	M	40 cm	94 cm / 37"	43 cm
25047-L	25072-L	Large	L	44 cm	104 cm	45 cm
25047-XL	25072-XL	Extra Large	XL	48 cm	108 cm	48 cm
25047-XXL	25072-XXL	Extra Extra Large	XXL	52 cm	111 cm	52 cm

Maximal användarvikt: 300 kg

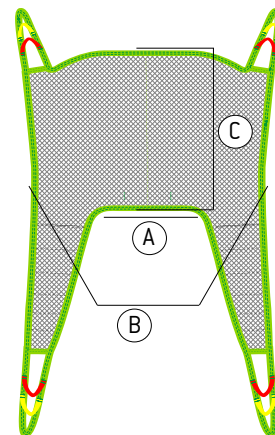

*Tillgänglig i följande längders: 10cm/3.9" (21180-10), 15cm/5.9" (21180-15), 20cm/7.8" (21180-20), 25cm/9.8" (21180-25), 35cm/13.7" (21180-35)



We improve freedom of movement and quality of care for people.

www.humancaregroup.com



HUMAN CARE SWEDEN (HO)

Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
+46 8 665 35 00
info@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road
ON K2E 7K1 Ottawa
+1 613 723 6734
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE THE NETHERLANDS

Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
+31 577 41 21 71
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES

8006 Cameron rd, Suite K
TX 78754 Austin
+1 5 124 76 7199
info.us@humancaregroup.com