

## Periodisk inspektion av lyftselar

Riktlinjer för periodisk inspektion av Human Care lyftselar enligt  
SS/EN/ISO 10535:2007, bilaga Annex B.

För att säkerställa säkerhet och god funktion skall kontroll av selen göras vid varje användningstillfälle. Dessutom bör en dokumenterad inspektion genomföras minst var 6:e månad. Periodisk inspektion bör genomföras av en person som är lämplig och väl kvalificerad och har god kännedom om konstruktion, användning och skötseln av lyftselar/personlyftar.

Sele / artikelnummer / storlek:.....

Tillverkningsdatum / serienummer:.....

Brukarens namn:.....

### Kontroll av sele:

	Går selens etikett att läsa?
	Är selens tyg helt? - Inga revor, hål eller dylikt? - Onormalt slitage?
	Är selens sömmar, kantband och upphängningsöglor intakta?
	Finns selens bruksanvisning tillgänglig?
	Finns det ett utprovningsprotokoll till selen?

Kommentarer:.....  
.....  
.....  
.....  
.....

### Godkännande av selen:

Datum:  
Inspektion utförd av: