

General Purpose Sling



Hållbar
En-patient möjlighet
Loop eller Clip



Våra General Purpose selar har en hög viktkapacitet och en generös total bredd för att erbjuda en sträckt sittställning som är väl lämpad för att lyfta tyngre brukare i alla situationer. Det integrerade huvudstödet gör att patienten kan lyftas även från golvet.



Värnar om infektionskontroll

Dessa selar för engångsbruk erbjuder det bekväma alternativet att kassera efter användning i kombination med den extra fördelen med hygienkontroll. Eftersom lyftselen endast kan användas av en patient åt gången, stöds lätt protokoll för infektionskontroll.

bära en maximal kapacitet på 318 kg/700 lb.

Optimala funktioner

Dessa selar har delade ben och en hög rygg för extra stöd. De är gjorda av en stark men mjuk polyester/bomullsblandning och är idealiska för sittande, horisontella eller halvliggande förflyttning. Det unika materialet leder bort vätskor och kan lämnas bakom en patient. Modell #NSB-104 kan användas med en spridarbygel. Modell #NSB-105 har öglor som kan fästas på en hängstång med 2-punkts, 3-punkts eller 4-punktsupphängning.

Två bekväma alternativ

General Purpose-selen finns antingen med förstärkta öglor som säkerställer hållbarhet och användarvänlighet, eller med klämmor för enkel och säker fastsättning. Båda alternativen är en idealisk lösning för plötsliga ändringskrav. Dessa selar finns i vuxenstorlekar Small till Extra Large och kan



Gånghjälpmedel



Vårdsängar



Lyftlösningar



Hygienprodukter



Transportstolar

Accessories



Förlängningsband

Används för att förlänga lyftbyglarna för att kunna anpassa lyftposition eller för att hålla ihop bendelar. Olika längder. NR.:21180-*



Benpolstring

Utmärkt för användare med känslig hud eller som har smärta. Art nr. 21146-S, M



Lyftbyglar för 4-punktsupphängning

Art. nr. 55619 Lyftbygel till 4-punktsupphängning i portabel lyft. Art. nr. 92938. 4-punktsbygel till

Lifting Situations



Till och från sängen

Lämplig för förflyttningar och ompositionering till och från sängen.



Till och från rullstolen

Lämplig för förflyttningar och ompositionering till och från rullstolen.



Använd från golvet

Fungerande vid förflyttning från golvet.

Care and Features




Klämma eller slinga

Två bekväma monteringsalternativ - klämmor eller öglor.



Förstärkta öglor

Färgkodade förstärkta remmar för enkel bestämning av önskad positionering.

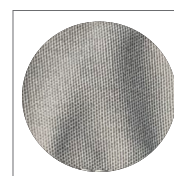


Polyester/Bomull

Materialet gör att vätskor sugas bort från patienten. Tvätta inte. Engångsansvändning.

Tekniska Specifikationer

Artikelnummer	Storlek	Färg	A	B	C
NSB-104C-S	Small	S	30cm / 12"	84cm / 33"	78cm / 31"
NSB-104C-M	Medium	M	43cm / 17"	88cm / 35"	97cm / 38"
NSB-104C-L	Large	L	53cm / 21"	103cm / 41"	114cm / 45"
NSB-104C-XL	Extra Large	XL	68cm / 27"	114cm / 45"	133cm / 53"
NSB-105-S	Small	S	30cm / 12"	84cm / 33"	78cm / 31"
NSB-105-M	Medium	M	43cm / 17"	88cm / 35"	97cm / 38"
NSB-105-L	Large	L	53cm / 21"	103cm / 41"	114cm / 45"
NSB-105-XL	Extra Large	XL	68cm / 27"	114cm / 45"	133cm / 53"
Maximal användarvikt	318kg				

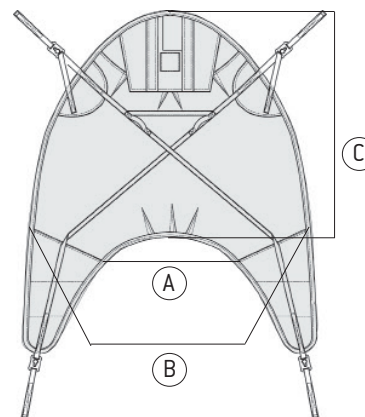

* Tillgängliga i fler storlekar: 10cm/3.9" (21180-10), 15cm/5.9" (21180-15), 20cm/7.8" (21180-20), 25cm/9.8" (21180-25), 35cm/13.7" (21180-35)



Vi förbättrar rörelsefriheten och kvalitetsomhändertagande av människor

www.humancaregroup.com



HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
+46 8 665 35 00
info@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road
ON K2E 7K1 Ottawa
+1 613 723 6734
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE THE NETHERLANDS

Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
+31 577 41 21 71
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES

8006 Cameron rd, Suite K
TX 78754 Austin
+1 512 76 7199
info.us@humancaregroup.com