




K058 PTS (Delbar Version)

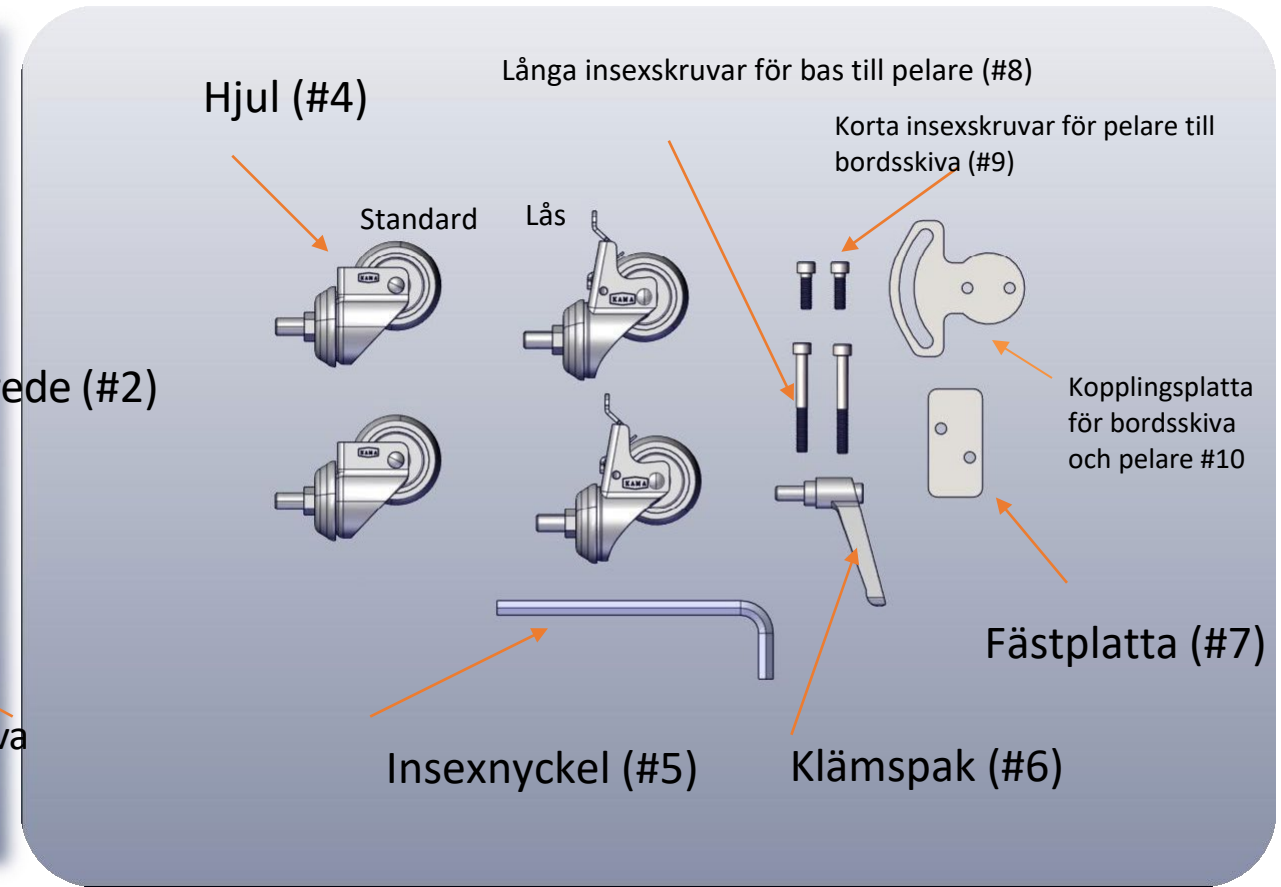



Innehåller följande delar:

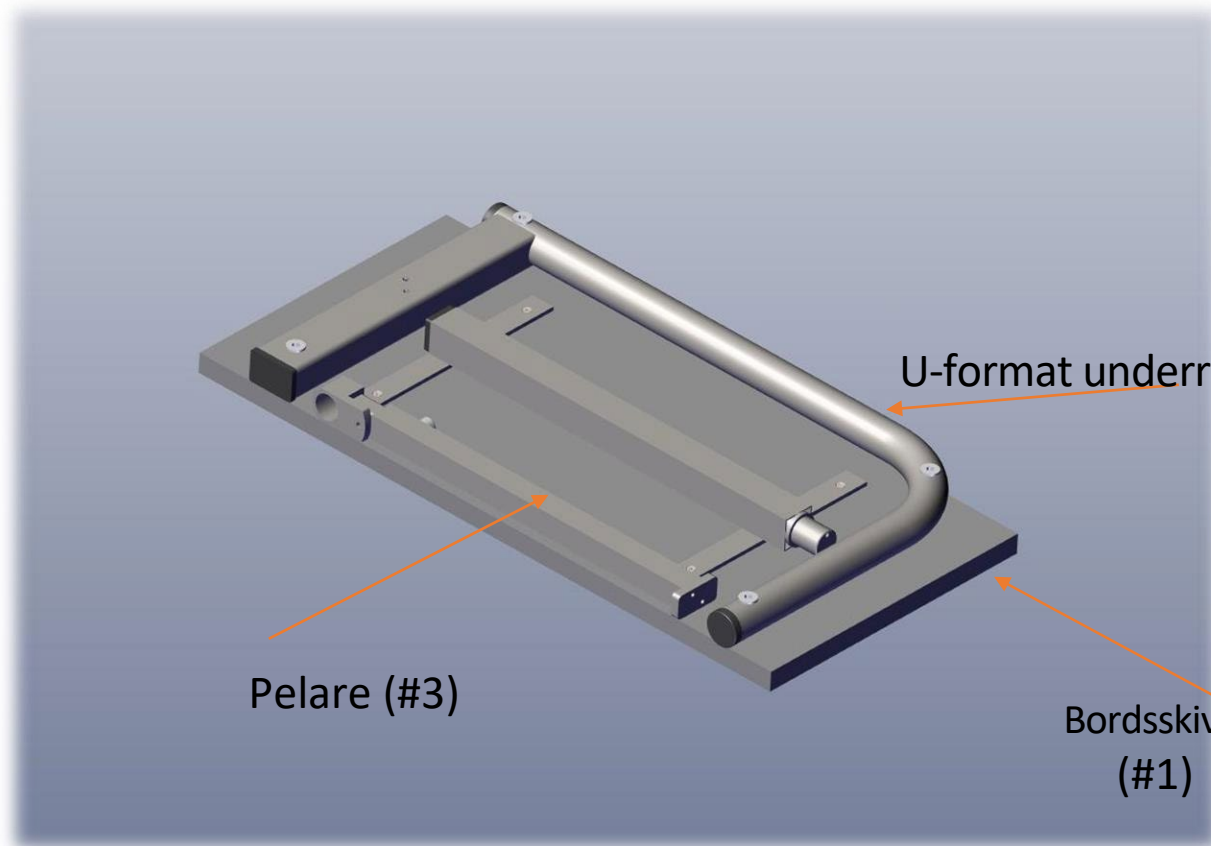



Ta ut innehållet från kartongen och lägg bordsskivan upp och ner på en plan slät yta

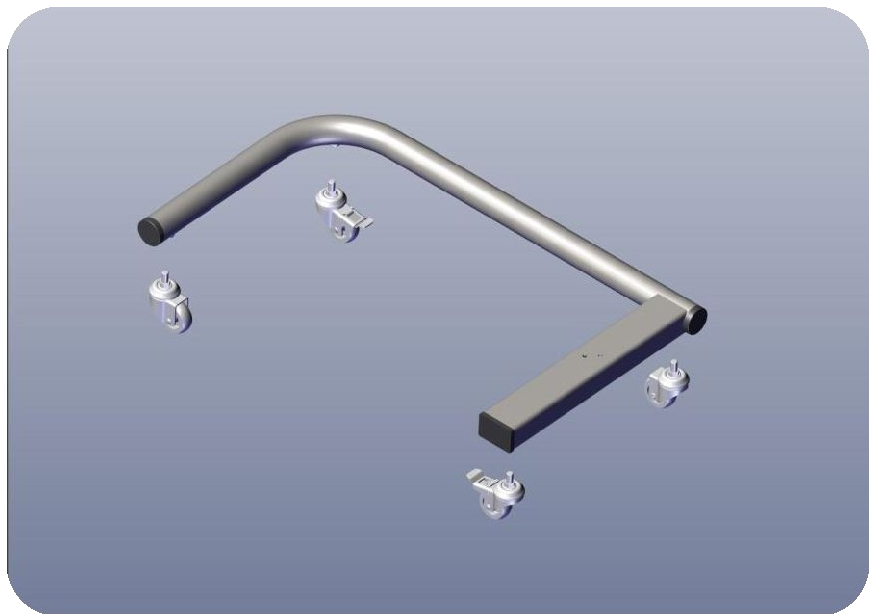


Skruva fast hjulen (#4) i underredet och se till att låshjulen är diagonalt placerade enligt bild.

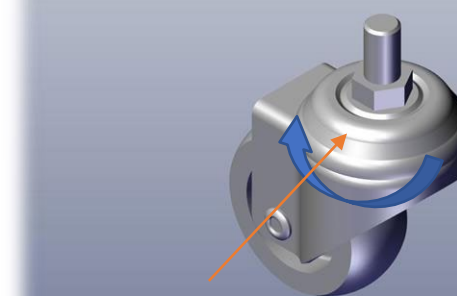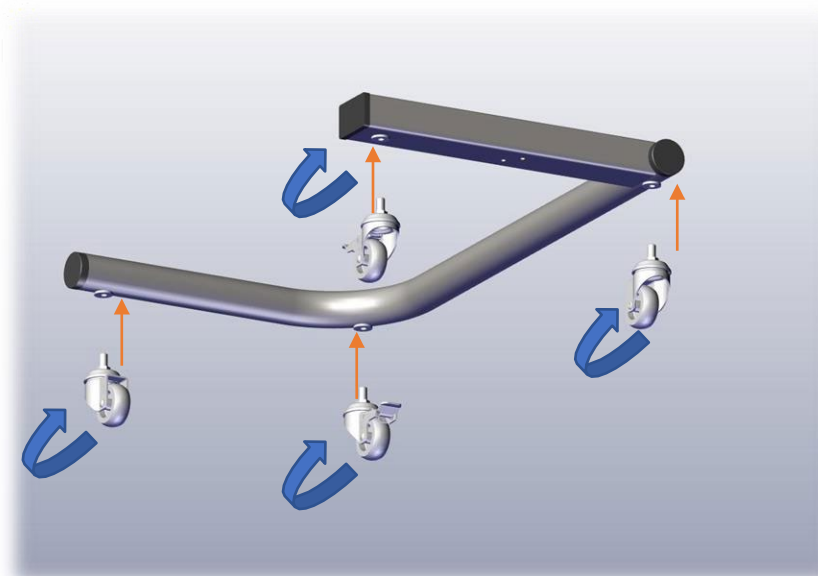


Rotera här!

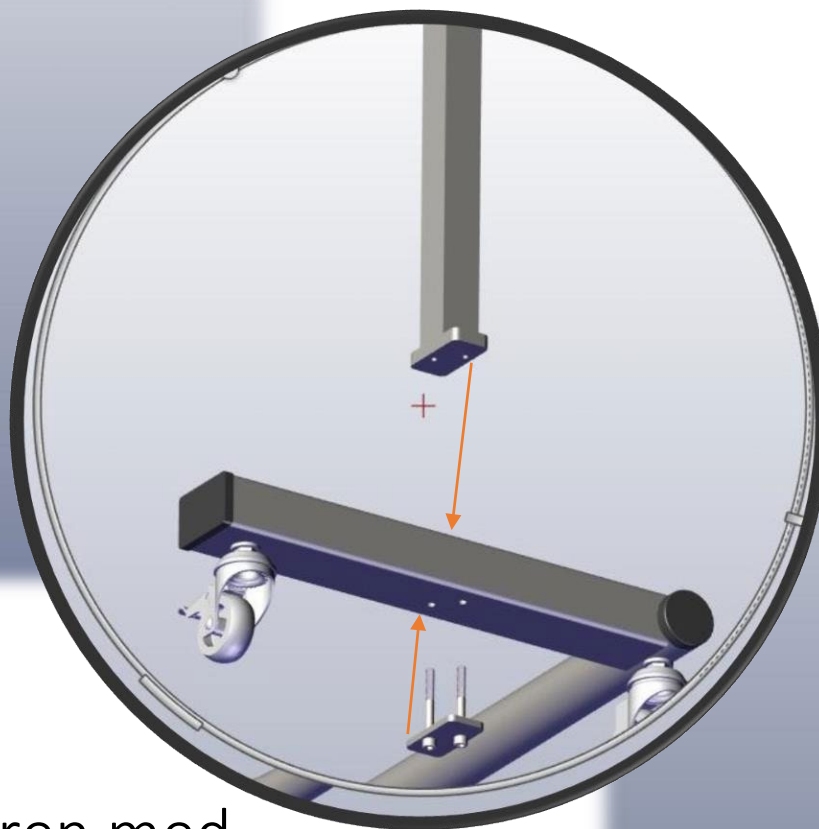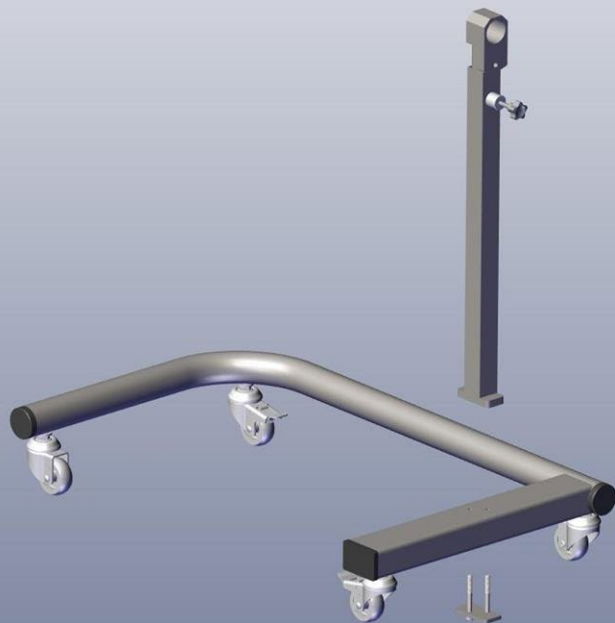

Montera underredet till pelaren med fästplattan (#7) och långa insexskruvar (#8)

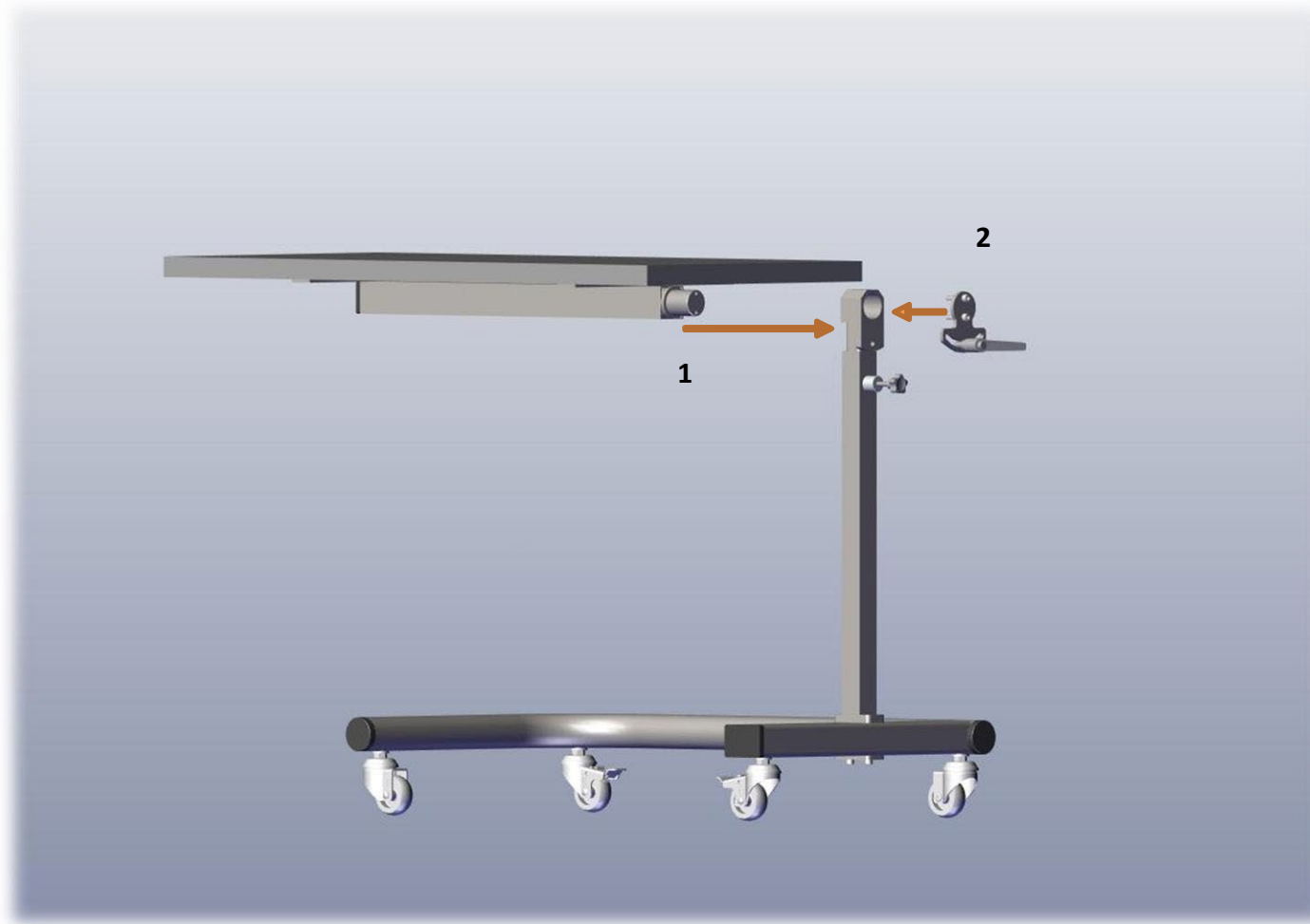

Fäst bordsskivan (#1) till toppen av pelaren (#3) och fäst kopplingsplatta #10 och korta insexskruvar #9 vid monteringen. Montera #6 klämspanen genom kopplingsplattan.

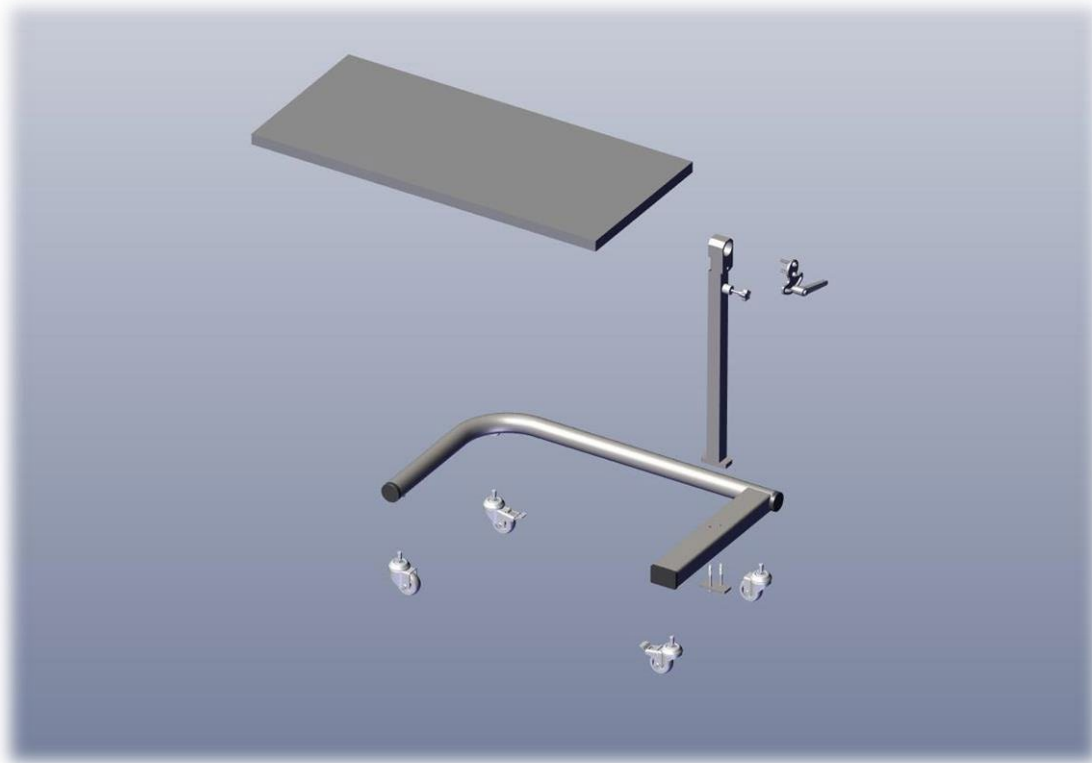

Redo att använda!

