

Mobi Pro Flexi



Smidig
Mjuk
Transport




Mobi Pro Flexi är en ergonomisk och kompakt överflyttningsplattform. Idealisk för personer med låg benstyrka och viss balans i bålen som har svårt att gå. Utmärkt för säker patienthantering för tidig mobilisering.



Roterande säte

Mobi Pro Flexi är ett effektivt och säkert verktyg för vårdgivaren att flytta en brukare, vilket förbättrar säkerheten och vårdgivarens tidshantering. Modellen har vridbara vadderade sittdynor, och knästödd för enkel applicering. Fötterna placeras på en stabil fotplatta med antihalkyta och därefter kan brukaren dra sig upp till stående position med hjälp av det integrerade handfästet. Genom att helt enkelt vrida på sittdynan blir Mobi Pro Flexi en bekväm sits som brukaren kan vila och flyttas på.

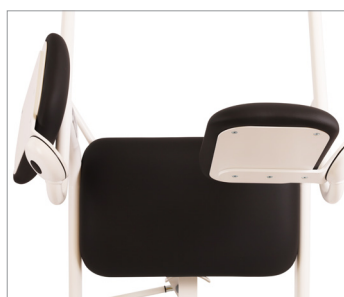

Mångsidig design

Att använda Mobi Pro Flexi uppmuntrar inte bara brukarens aktivisering utan ger vårdgivaren snabb, stabil och säker förflyttning av en patient till sängen, stolen eller toaletten och tillbaka vid behov.

Mobi Pro Flexi är utrustad med en mekanism för att bredda bendelarna, vilket säkerställer att den fungerar med de flesta sittplatser (som en toalett eller rullstol). Bredden justeras enkelt in efter behov, 3 inställningsmöjligheter, med hjälp av en spak. Knästödet har även en justerbarhet på 9 cm i höjddled.

Kvalitet

Våra produkter är designade och tillverkade för att uppfylla alla krav i relevanta standarder. I varje skede av utvecklingsprocessen ägnas varje enskild produkt stor uppmärksamhet i design, utveckling och tillverkning. Detta betyder att en användare av denna produkt känner sig trygg med dess tillförlitlighet och att vårdgivaren känner sig trygg med dess säkerhet.



Funktioner



Fotplatta

Inkluderad i produkten.
Hållbart ABS plast,
inkluderar antihalk.



Hjul

Dubbelhjul 7.5cm.



Ergonomiska handtag

Gjorda av gummi för
maximal komfort.



Justerbart benstöd

Vadderat justerbart (upp
och ner) benstöd.

Lyftsituationer




Till/från säng

Lämplig för förflyttningar
och ompositionering till
och från sängen.




Till/från rullstol

Lämplig för förflyttningar
och ompositionering till
och från rullstolen.

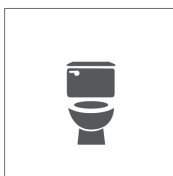

Använd vid hygienbesök

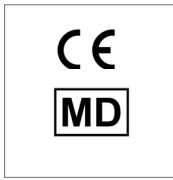


Funktioner



Enkel rörelse

Mobi Pro Flexi flyttas enkelt
av en ensam vårdare.
En liten svängradie gör
den idealisk för mindre
utrymmen.

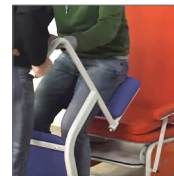

Justerbar bas

Manuell justering av benen
gör att den passar under de
flesta sittplatser.



Vadderade roterande sittdelar

Gör att enheten kan
användas för sittplatser
som ett alternativ till en
rullstol.



Vadderat knäskydd

Mjuk, vadderade
knäskydd för att lägga till
patientkomfort och minska
trycket vid knäna medan
du står.

Tekniska specifikationer

Mobi Pro Flexi	
Artikelnummer	11992146
Bredd	58.5 cm
Längd	97 cm
Höjd	104 cm
Hjul diameter	7.5 cm
Justerbart ben (Min - Max)	43 cm - 70 cm
Vikt	33 kg
Vikt kapacitet	180 kg
Frigång	10 cm
Bredd insteg	45 cm
Höjd insteg	7 cm
Knästöd mått	50 cm x 30 cm [6 cm tjock]
Knästöd distanslängd från fotplatta (upp och ner) (Min-Max)	Översida benstöd: 50 cm - 59 cm Undersida benstöd: 20 cm - 29 cm

Måtten kan ha avvikelser på +/- 2 %.



We improve freedom of movement
and quality of care for people.

www.humancaregroup.com



HUMAN CARE SWEDEN (HQ)
Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
+46 8 665 35 00
info@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA
10-155 Colonnade Road
ON K2E 7K1 Ottawa
+1 613 723 6734
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE THE NETHERLANDS
Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
+31 577 41 21 71
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES
8006 Cameron rd, Suite K
TX 78754 Austin
+1 5 124 76 7199
info.us@humancaregroup.com