


COSMOS TAKLYFT

SNABBGUIDE




Komponenter

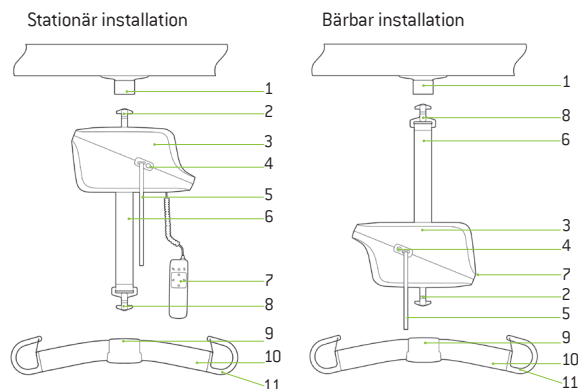

Komponenter:

1. Cosmos löpvagn/adapter
2. Ankarnyckel
3. Lyft
4. Nödstoppsknapp
5. Band för nersänkning i nödsituationer
6. Lyftband
7. Handkontroll
8. Ankarnyckel
9. Låsmekanism
10. Lyftbygel
11. Krok

Funktioner på handkontrollen

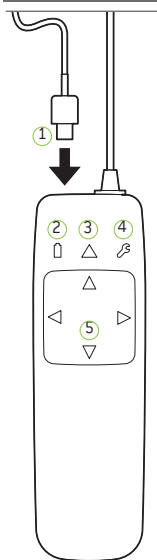

(1) USB-C		För laddning och dataöverföring från lyften
(2) Batteri-symbol		Fast grönt sken: Batterinivån är fulladdad – normal. Långsamt pulserande grönt sken: Batteriet laddas. Snabbt blinkande grönt sken: Batterinivån är låg. Ladda lyften så snart som möjligt. Om batteriet når en kritiskt låg nivå är endast sänkning möjlig och uppåtpilindikatorn släcks. Inget sken: Lyften är i viloläge. Om laddaren är ansluten är batteriet fulladdat.
(3) Varnings-symbol		Stabilt gult ljus plus stabilt grönt ljus i nedåtpilen indikerar överbelastning eller överhettning. Endast nersänkingsfunktionen är tillgänglig.
(4) Service-symbol		Stabilt gult ljus: Det är dags att utföra service på lyften. Service och årlig inspektion måste utföras.
(5) På/Upp och Ned		Tryck på valfri knapp. Lyften är påslagen och klar för användning. De gröna pilarna är tillgängliga funktioner, upp och ned.
Varningstriangel och skiftnyckel		Stabilt gult ljus: Felfunktion eller lyftens serviceintervall har passerat. Det är inte längre säkert att använda lyften. Service måste utföras omedelbart. Kontakta en certifierad tekniker (se felsökningstabellen).



För brukare med pacemaker bör handkontrollen hållas på avstånd från överkroppen, med ett minsta avstånd på 153 mm/6 tum, på grund av magnetfältet.



Viktigt!

Den här snabbguiden ersätter inte bruksanvisningen. Den senaste versionen kan laddas ner på www.humancaregroup.com.

Läs alla instruktioner före användning!

Innan du använder lyften


Inspektion före användning

– Kontrollera snabbanslutningarna innan du använder lyften: den gröna markeringen på ankarnyckeln ska vara synlig på både lyftbygel och lyften för att säkerställa en säker anslutning.

Daglig inspektion – Inspektera alltid lyften för att se om det förekommer synliga tecken på skador före användning. Se till att lyften är korrekt monterad på mellanstycket eller löpvagnen samt på lyftbygel. Kontrollera alltid selar och lyftband före användning för att se om det förekommer tecken på slitage. Använd inte om det finns uppenbart slitage.

Inspektion varje månad – Kontrollera lyftbandet för att se om det förekommer skador eller slitage. Rulla ut lyftbandets hela längd för att säkerställa att det fungerar korrekt.

Årlig inspektion – Lyften måste inspekteras minst en gång per år av en person med Human Care-behörighet och i enlighet med Human Cares anvisningar.

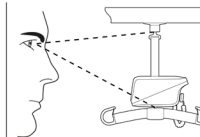

Lyftning

Sänk lyftbandet till en bekväm arbetshöjd. Anslut en lämplig lyftbygel till lyften (läs om hur du ansluter lyftbygel i bruksanvisningen).

Använd handkontrollen för att placera lyftbygel direkt ovanför brukaren.

Fäst selen genom att först fästa selens axelöglor på lyftbygel och därefter benöglorna.

Lyft upp brukaren en bit med lyften och utför en säkerhetskontroll. Fortsätt sedan med överföringen.

Håll inte i krokarna när du utför en lyftning.

Använd inte lyftbygel för att flytta brukaren och lyften.

Allmän skötsel

	Torka av med en lätt fuktad torkduk.
	Använd aldrig starka rengöringsmedel på lyften.
	Aktivera nödstoppet när lyften inte används.
	Ladda lyften varje natt.
	Desinficera.
	Sänk inte ner i vatten.



Viktigt! Använd handtaget vid transport av lyften. Använd inte lyftbandet eller handkontrollkabeln!

Felsökning

Titta i bruksanvisningen om du har problem.

Om inget händer när du trycker på Upp-knappen eller Ned-knappen på handkontrollen och indikatorlampan inte tänds.

1) **Batterierna är helt urladdade. Ladda lyften omedelbart.** 2) **Nödstoppsknappen är utdragen. Inaktivera genom att trycka in knappen igen.**

Om inget händer när du trycker på Upp-knappen eller Ned-knappen på handkontrollen och indikatorlampan för service tänds.

1) **Kontrollera handkontrollen. Om handkontrollen är skadad måste den bytas ut. Kontakta en servicetekniker.**

Om inget händer när du trycker på Upp-knappen eller Ned-knappen på handkontrollen.

1) **Lyftmotorn är överhettad. Vänta ett tag och försök igen.** 2) **Lyften är överbelastad. Sänk ned med knappen för nersänkning i nödsituationer.**

Om inget händer när du trycker på Upp-knappen eller Ned-knappen på handkontrollen.

1) **Laddning pågår. Avbryt laddning.**

Om inget händer när du trycker på Upp-knappen på handkontrollen.

1) **Batteriet är kritiskt lågt. Ladda lyften.** 2) **Lyften är i sitt maximala övre läge. Tryck på nedåtknappen på handkontrollen.**

Om inget händer när du trycker på Ned-knappen på handkontrollen.

1) **Lyften är i sitt nedersta läge. Tryck på Upp-knappen på handkontrollen för att höja lyften.** 2) **Lyften är inte belastad. Dra försiktigt i bandet eller häng upp en lyftbygel och tryck på Ned-knappen på handkontrollen för att sänka den.**


I händelse av en nödsituation

Nödstopp och nersänkning

Nödstopp – I en nödsituation aktiverar du nödstoppet genom att dra i det röda bandet. Denna åtgärd kommer att omedelbart stoppa lyften samtidigt som den röda knappen trycks ut. Återställ nödstoppet genom att trycka tillbaka den röda knappen.

Säkerhetsänkning – Dra först i det röda bandet för att aktivera nödstoppet. Dra och håll sedan i det röda bandet så att säkerhetsänkningen aktiveras. Säkerhetsänkningen får endast användas i nödsituationer, eftersom det är lätt att tappa kontrollen över lyftsituationen och det kan ge upphov till skador.

Nersänkning i nödsituationer – Vid avsaknad av ström eller elektriskt fel i produkten, när brukaren är i lyften, aktiveras nersänkningen i nödsituationer och brukaren sänks ner på ett säkert och tillförlitligt sätt. Beroende på brukarens vikt kan vårdgivaren behöva hjälpa till för att dra ner patienten.

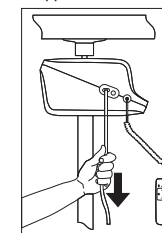

Återställ nödstopp

